

Bed Grip MASTER[®]



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System



Art. nr. MC 003-3510
Hmi nr. [36414](#)
Bed Grip MASTER Soft
L 180 x B 10 cm
Antal håndtag: 9




Art. nr. MC 003-3520
Hmi nr. [36415](#)
Bed Grip MASTER Hard
L 180 x B 4 cm
Antal håndtag: 8



Art. nr. MC 003-3530
Hmi nr. [63305](#)
Bed Grip MASTER Single
L 150 x B 5 cm
Antal håndtag: 1

Når mobiliteten forringes ...

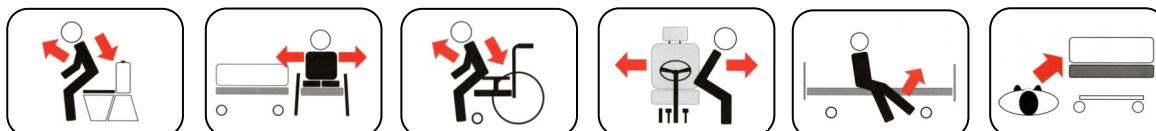

... forbedrer vi livskvaliteten !

Bed Grip MASTER[®] CE

The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

BRUGERVEJLEDNING



A. Montering af Bed Grip MASTER Soft




1

Før den nederste del af Bed Grip MASTER Soft igennem f.eks. sengegavlens rør.




2

Hold derefter i det nederste øje og før sengebåndet med dets håndtag igennem dette.

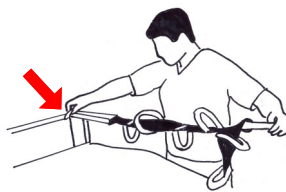


3

Træk derefter indtil sengebåndet er helt strammet til rundt om sengegavlens rør.

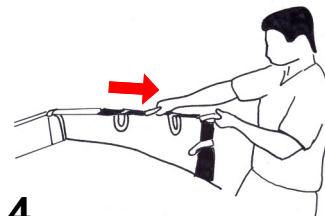


4

Bed Grip MASTER Soft er nu klar til brug

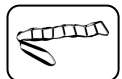

B. Montering af Bed Grip MASTER Hard

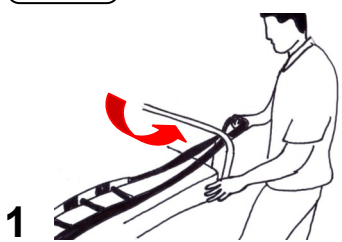


1

Før den nederste del af Bed Grip MASTER Hard igennem f.eks. sengegavlens rør.




2

Hold derefter i det nederste øje og før sengebåndet med dets håndtag igennem dette.

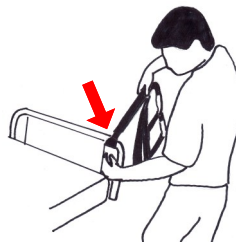

3

Træk derefter indtil sengebåndet er helt strammet til rundt om sengegavlens rør.

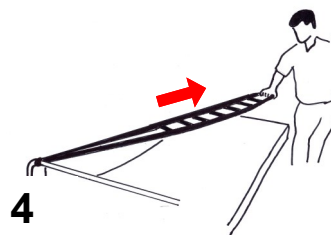


4

Bed Grip MASTER Hard er nu klar til brug



C. Montering af Bed Grip MASTER Single

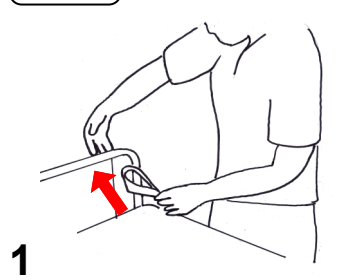


1

Før den nederste del af Bed Grip MASTER Single igennem f.eks. sengegavlens rør.



2

Hold derefter i det nederste øje og før sengebåndet med dets regulerbare håndtag igennem dette.

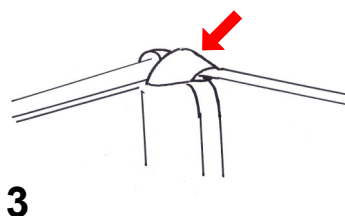

3

Træk derefter indtil sengebåndet er helt strammet til rundt om sengegavlens rør.



4

Bed Grip MASTER Single er nu klar til brug


Bed Grip MASTER[®] CE

The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

BRUGERVEJLEDNING




D. Bed Grip MASTER Single gøres kortere

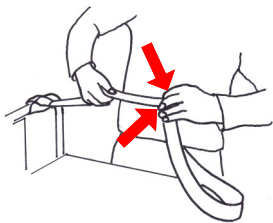


1

Tag fat i det sorte regulerings-spænde med tommel og pege-finger.

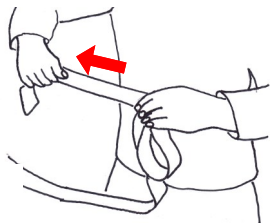


2

Træk i båndets løse ende

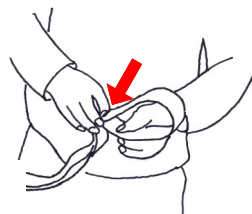

3

Tag fat igen i det sorte regule-ringsspænde.

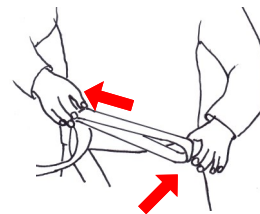


4

Tag fat i sengebåndets øje som danner håndtaget og flyt øjet yderligere ind, indtil du har opnået den ønskede længde af Bed Grip MASTER Soft




E. Bed Grip MASTER Single gøres længere

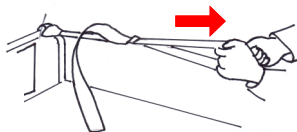


1

Nu er Bed Grip MASTER blevet kortere

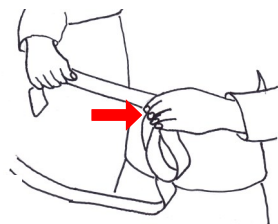


2

For at gøre Bed Grip MASTER Single længere tager man fat i båndets ende med den ene hånd

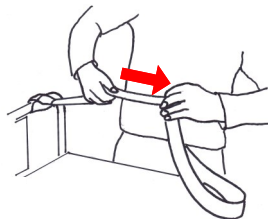


3

Tag derefter fat i det sorte regulerings-spænde og nu glider du dette ud igen.

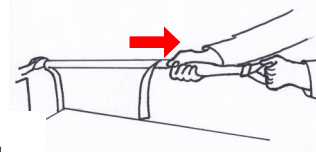


4

Nu gøres Bed Grip MASTER Single længere.

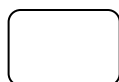


F. Nogle af mulighederne med Bed Grip MASTER Sengebånd

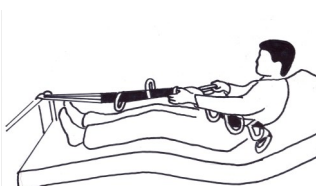


1

Bed Grip MASTER er ideel, når man skal sætte sig op i sengen.

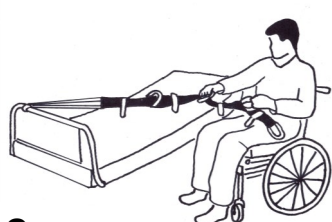

2

Bed Grip MASTER er ideel til at gribe i ved overflytning mellem seng og kørestol. Hertil anbefaler vi også en glidende overflytning med vores Master GLIDE Glidebrætter.

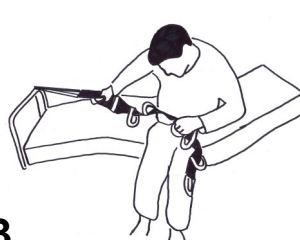

3

Bed Grip MASTER er ideel at holde i, når man står ved sengen og skal sidde ned på denne eller rejse sig.

Bed Grip MASTER®



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

Beskrivelse af de forskellige modeller

Bed Grip MASTER® Soft

Består af et blødt sengebånd med polstrede håndtag. Dette for at undgå tryk, hvis bruger kommer til at ligge på det.

Bed Grip MASTER® Hard

Består af et blødt sengebånd med hårde håndtag. Dette for at få behagelige greb og for at de yderste fingre ikke klemmes sammen, når man tager fat i dets håndtag.

Bed Grip MASTER® Single

Regulerbart sengebånd med 1 håndtag i enden. Dette er et blødt bånd af 100% bomuld, som er enkelt og har trinløs regulering.

Vaskeanvisning

Bed Grip MASTER kan vaskes ved 80 grader C.



Max. Belastning: 150 kg.

ADVARSEL

Sørg altid for at det punkt, hvor sengebåndet er gjort fast til, kan tåle den belastning, der opstår, når man trækker i sengebåndet.

Fjern evt. sengebåndet fra sovende bruger.

Dette for at undgå at vedkommende vikles ind i dette med alvorlige ulykker til følge.

VIGTIGT

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhen-sigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Bed Grip MASTER består af sengebånd, der leveres i 3 forskellige modeller.

Bed Grip MASTER er kendetegnet af dets høje kvalitet.

Bed Grip MASTER model Soft har bløde behageligt polstrede håndtag. Bed Grip MASTER Hard er en mere afstivet udgave med hårde håndtag. Disse giver bruger følelse af stabilitet og gode greb.

Bed Grip MASTER Single er et mere enkelt sengebånd der trinløst kan reguleres i længden efter behov.

Anvendelsesmuligheder:

Bed Grip MASTER kan bl.a. anvendes til at sætte sig op i seng, sætte sig ned fra stående, rejse sig op fra seng, toilet eller gulv, til overflytning mellem kørestol og seng/ bilsæde

Erfaringsmæssig holdbarhed:

Minimum 5 år



Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk