


Bed Grip MASTER®

Brugervejledning

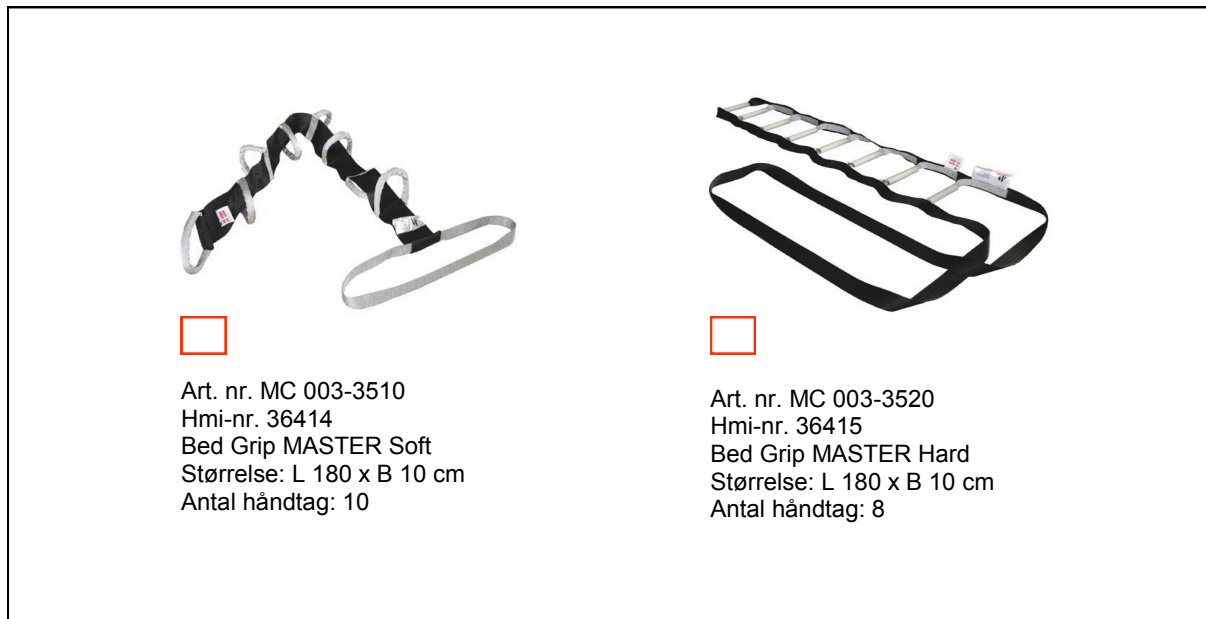

Når mobiliteten forringes....

Lav vægt

Fleksibel

Tryghed

Komfortabel

Aktivering

Visionær




The Original Scandinavian Human Handling System

... forbedrer vi livskvaliteten

Bed Grip MASTER

The Original Scandinavian Human Handling System

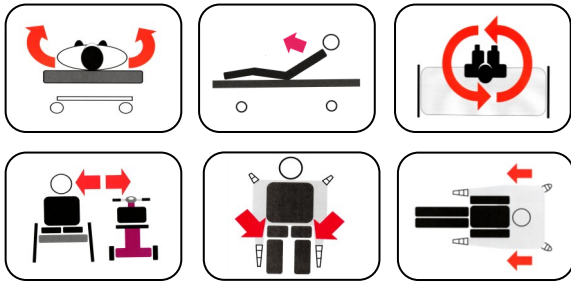

Produktbeskrivelse:

Bed Grip MASTER består af et fleksibelt polyesterbånd med runde grebsvenlige håndtag. Model "Soft" har bløde runde håndtag og model "Hard" har stive polstrede håndtag. Bed Grip MASTER har funktion som en rebstige, hvor enden f.eks. fæstnes rundt om sengens fodende, således at bruger kan gribe i fat i den og trække sig op i siddende stilling.

Bed Grip MASTER anvendes også til, at bruger kan vende sig i seng, dreje ud på sengekant, ved overflytning over større afstande, til placering af løftesejl både i siddende og liggende stilling mm.

Bed Grip MASTER øger brugerens mobilitet og fremmer derved bevægelighed og aktiv deltagelse i forflytning.

Vigtigt

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger og håndtag mindst en gang hver halve år.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

Ansvar

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Bånd:	100% Polyester gjord	
Håndtag Model Soft:	Rørbånd 100 % Polyester	
Polstring håndtag Model Soft:	Polyæthylenskum	
Håndtag Model Hard:	Plast	
Polstring Model Hard:	Rørbånd 100 % Polyester	



VASKEANVISNING



Bed Grip MASTER kan vaskes ved 70 grader C.

Produkterne kan også spritrenses med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.



Der må ikke anvendes skyllemiddel.

Master CARE
Højvænget 1
8330 Beder
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
info@master-care.dk
www.master-care.dk