

Foot MASTER

®

Brugervejledning



Når mobiliteten forringes....

Lav vægt

Fleksibel

Tryghed

Komfortabel

Aktivering

Visionær




The Original Scandinavian Human Handling System

... forbedrer vi livskvaliteten



Foot MASTER

The Original Scandinavian Human Handling System

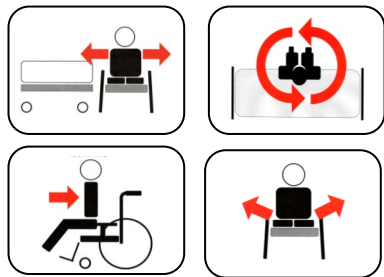

Produktbeskrivelse:

Foot MASTER anvendes til støtte af fødder ved overflytning fra f. eks. kørestol til toilet, kørestol til seng, tilbage i stol, ved positionering i stol, mm.

Til overflytning kan Master GLIDE Glidebræt og Master BELT med fordel anvendes.

Maksimal bruger vægt 200 kg.

ADVARSEL

- Anvend aldrig et defekt hjælpemiddel.
- Ved forflytning af personer med indskrænket bevægelighed anvendes produktet kun med hjælper.
- Vær opmærksom på at brugers fødder er placeret korrekt på Foot MASTER, og at Foot MASTER står fast på gulvet.
- Vær opmærksom at Foot MASTER ikke står i vejen på gulv, så man ikke falder over den

Ansvar

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:	Latexfri polyæthylen
Farve:	Blå
Vægt:	420 gr.



VASKEANVISNING

Foot MASTER kan aftørres med klud med rengøringsmidler.

Produktet kan også spritrenses med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.

Master CARE
Sofienlystvej 3
8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
info@master-care.dk
www.master-care.dk