

Master BELT[®]

The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System



Art. nr. MC 003-1120
Hmi nr. 33237
Master BELT Multi Small
Livmål: 65-100 cm
Antal håndtag: 7
Inderside: Velour



Art. nr. MC 003-1125
Hmi nr. 33238
Master BELT Multi Medium
Livmål: 80-120 cm
Antal håndtag: 9
Inderside: Velour



Art. nr. MC 003-1126
Hmi nr. 33239
Master BELT Multi Large
Livmål: 95-130 cm
Antal håndtag: 11
Inderside: Velour



Art. nr. MC 003-1127
Hmi nr. 42302
Master BELT Multi X-Large
Livmål: 130-150 cm
Antal håndtag: 13
Inderside: Velour



Art. nr. MC 003 - 1220
Hmi nr. 45645
Master BELT Multi Small
Livmål: 65-100 cm
Antal håndtag: 7
Inderside: Non-Slip



Art. nr. MC 003-1225
Hmi nr. 45646
Master BELT Multi Medium
Livmål: 80-120 cm
Antal Håndtag: 9
Inderside: Non-Slip




Art. nr. MC 003-1226
Hmi nr. 45647
Master BELT Multi Large
Livmål: 95-130 cm
Antal håndtag: 11
Inderside: Non-Slip



Art. nr. MC 003-1227
Hmi nr. 45648
Master BELT Multi X-Large
Livmål: 130-150 cm
Antal håndtag: 13
Inderside: Non-Slip

Når mobiliteten forringes....

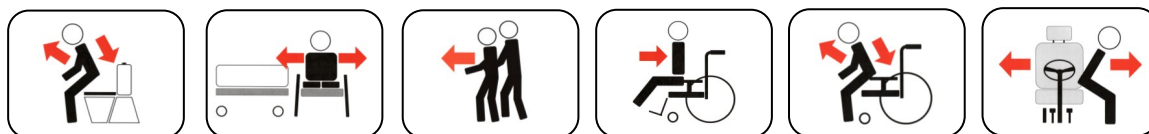


... forbedrer vi livskvaliteten !




BRUGERVEJLEDNING

A. På- og afmontering af Master BELT

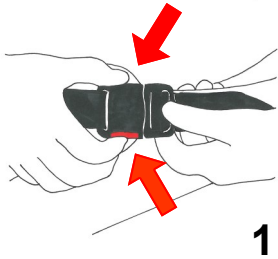


1

Master BELT monteres rundt om brugerens talje. Master Belt fastgøres ved at benytte dets regulerbare låsespænde.

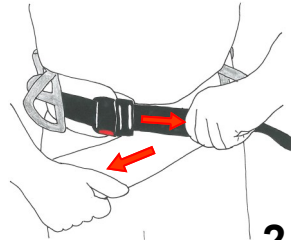

2

For at tilpasse Master BELT til brugerens talje trækker man i selve bæltets ende - samtidigt trækkes i modsatte retning i bæltets gjord i låsespændet. Der strammes til.

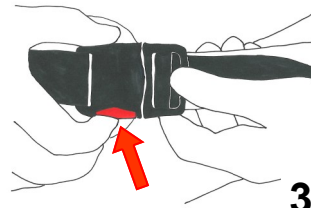


3

For at afmonteres Master BELT holder man tommelfinger øverst på låsespændet - samtidigt trykker man den røde knap ind med pegefingeren.




B. Rejse bruger op fra siddende til stående

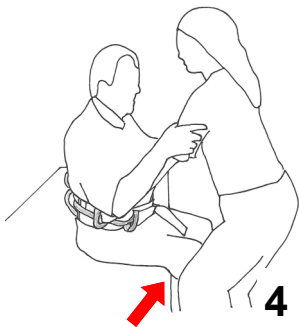


4

Sørg for at brugeren har ståfunktion inden vedkommende skal hjælpes op fra siddende til stående ved brug af Master BELT. Hjælper stiller sig foran brugeren og støtter med sine ben mod brugerens ben.

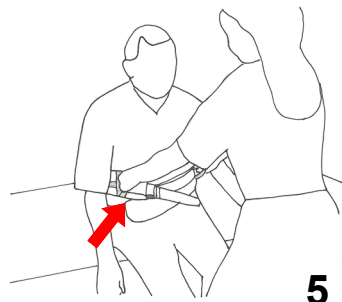


5

Hjælper griber fat i håndtag i Master BELT, læner sig bagover og rejser sig op samtidig med at brugeren rejser sig.

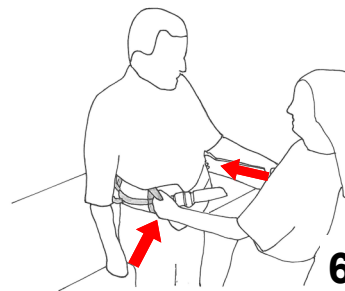


6

Bruger er nu rejst op i stående. Hjælper støtter ved fortsat at holde i håndtag på Master BELT.

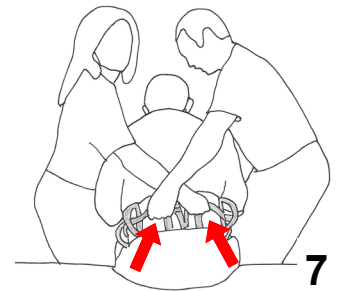


7

Hvis bruger er ustabil, bør man være 2 hjælpere. Hjælpere griber fat i håndtag bag på Master BELT. Hjælpere krydser sine arme over hinanden. Dette giver sikkerhed og skaber god forflytningsteknik.

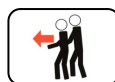


C. Gangtræning

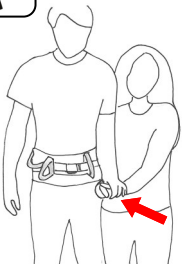


1

Hjælper stiller sig ved siden af bruger og holder denne i hånden.

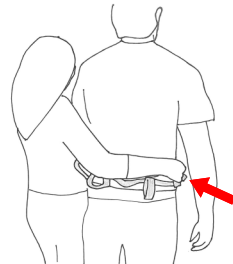


2

Hjælper rækker den anden hånd om bag brugeren og griber i håndtag på modsatte side.

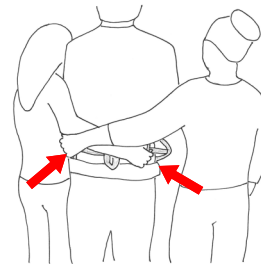

3

Er der 2 hjælpere, griber begge hjælpere på samme måde i håndtag, således at hjælperes arme krydser og støtter brugerens ryg.

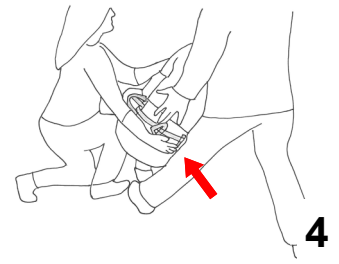


4

FORSØG ALDRIG PÅ AT HOLDE BRUGER, HVIS VEDKOMMENDE FALDER OM. Lad i stedet brugeren glide ned langs hjælpernes ben.

BRUGERVEJLEDNING




D. Sætte bruger ned fra stående

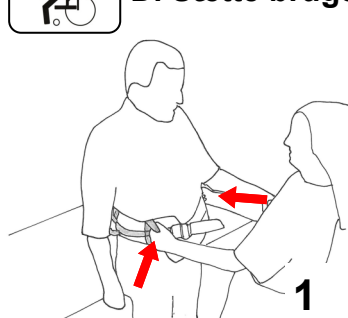


1

Hjælper stiller sig foran bruger og tager fat i håndtag på Master BELT. Hjælper finder en god arbejdsstilling.

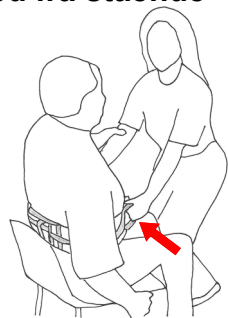


2

Hjælper støtter med sit knæ mod brugerens og bøjer sig ned i knæene med ret ryg for at følge brugerens bevægelser, når vedkommende sætter sig på plads i stolen.

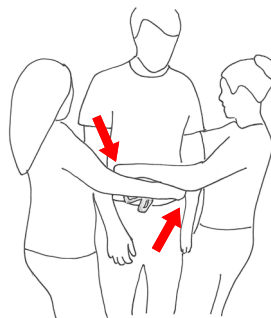


3

Ved 2 hjælpere griber disse i håndtag på Master BELT.

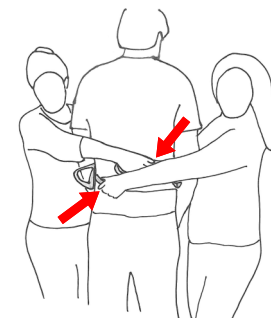


4

Hjælpernes arme krydser om bag brugerens ryg og sætter nu bruger trygt ned. Hjælperne følger bruger ned. Vær opmærksom på at have gode arbejds-

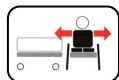


E. Overflytning mellem kørestol og seng med 1 hjælper/2 hjælpere

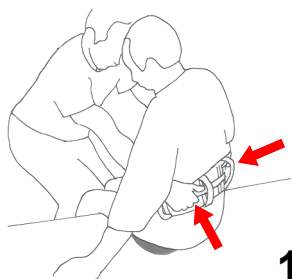


1

Ved 1 hjælper
Monter Master BELT rundt om brugerens talje. Bruger støtter en smule på benene. Hjælper tager fat i håndtag på Master BELT, støtter mod brugerens knæ.

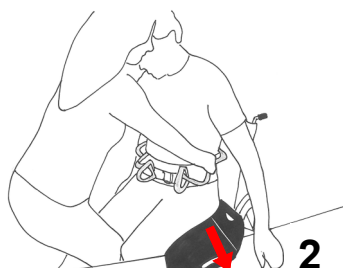


2

Hjælper anvender vægtoverføring og flytter bruger etapevis over fra stol til seng.

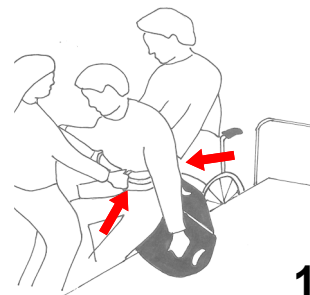


1

Ved 2 hjælpere
Den ene hjælper støtter foran og den anden bagved brugeren.

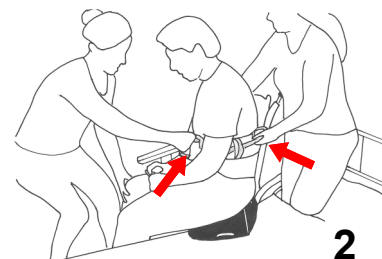


2

Har bruger dårlig ståfunktion kan Master GLIDE Glidebrædt med stor fordel anvendes. Hjælperne griber i håndtag på Master BELT, støtter og forflytter ved hjælp af vægtoverføring og lader bruger glide siddende fra kørestol til seng.

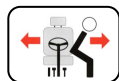


G. Mellem kørestol og bilsæde

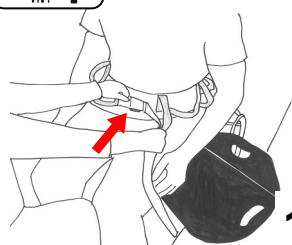

1

Bruger får Master BELT monteret rundt om taljen. Master GLIDE Glidebræt placeres under brugers sæde til den side, hvor forflytningen skal foregå.

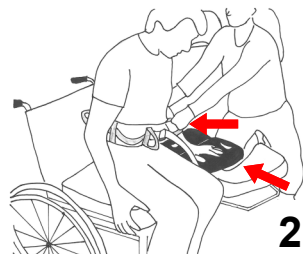

2

Hjælper sætter det ene knæ op på sædet inde fra modsatte side af bilen og trækker i håndtag på Master BELT. Bruger glider nu ovenpå Master GLIDE Glidebræt og på plads ind i sædet.

Master BELT[®]

The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System



Beskrivelse af de forskellige modeller:

Master BELT[®] Velour

Består af et polstret Gå- og træningsbælte med velour belagt skridsikker inderside, der er blød mod bar hud.


Master BELT[®] NonSlip

Består af et Gå- og træningsbælte med skridsikker PU-belagt elastisk polyester (Non-slip)

Vaskeanvisning

Master BELT kan vaskes ved 80 grader C.



 Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Produkterne kan desinficeres med diverse af markedets desinfektionsmidler

Max belastning per håndtag: 45 kg



Max. Belastning spænde: 150 kg



Produktbeskrivelse

Master BELT er et specialfremstillet Gå- og Aktiveringsbælte med vertikale og horisontale håndtag. De leveres i solid udførelse i mange varianter med inderside af enten skridsikker hudvenlig velour eller med inderside af non-slip.

De har trinløst spænde af typen Fix-LOCK. Håndtagene på Master BELT er polstret og afstivet, og er derved nemme at tage fat i samtidig med, at de skaber mulighed for god arbejdsstilling hos hjælper. Master BELT er kendetegnet ved høj kvalitet. Bælterne giver brugeren tryghed og skaber derved rammer for optimal aktivering.

ADVARSEL

Forlad aldrig brugeren med dette hjælpemiddel påmonteret. Dette for at undgå ulykker med alvorlige personskader til følge.

VIGTIGT

Sørg hele tiden for, at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger. Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



Master CARE
Sofienlystvej 3
8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
www.master-care.dk