

Multi® Master BOARD



The Original Scandinavian Human Handling System



- Art. nr. MC 005-1270
Hmi nr. 55316
Master BOARD Multi Medium
Størrelse: L 110 x B 50 cm



- Art. nr. MC 005-1310
Hmi nr. 43299
Master BOARD Multi Large
Størrelse: L 180 x B 50 cm

- Art. nr. MC 005-1071
Hmi nr. 34173
Master BOARD Multi Medium
Cover (Glide) af nylon
Størrelse: L 110 x B 54 cm

- Art. nr. MC 005-1211
Hmi nr. 38948
Master BOARD Multi Large
Cover (Glide) af nylon
Størrelse: L 180 x B 54 cm

Når mobiliteten forringes ...



... forbedrer vi livskvaliteten !


Multi® Master BOARD




The Original Scandinavian Human Handling System

BRUGERVEJLEDNING


A. Forberedelse af Master BOARD Multi® Medium

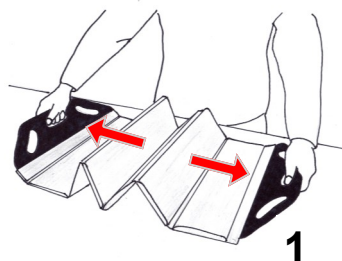

1
Master BOARD Multi Medium foldes ud.

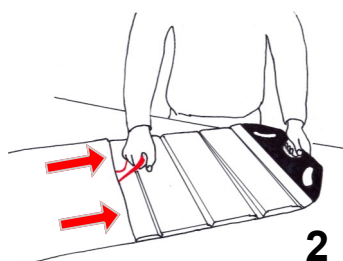

2
Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD Multi Medium.

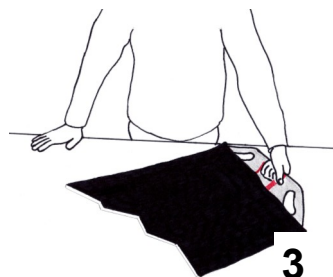

3
Master BOARD Multi Medium er nu klar til brug.




4
Er der strenge krav til hygiejne kan engangsovertræk rekvireres. Til Master BOARD Multi anvendes:

Art. nr. MC 002-1262
Engangsovertræk Medium
Art. nr. MC 002-1252
Engangsovertræk Large


B. Placering af Master BOARD Multi® Medium




1
Den ene hjælper vender bruger om til den ønskede side. Anvend gerne et stik- eller sengelagen som hjælpemiddel.

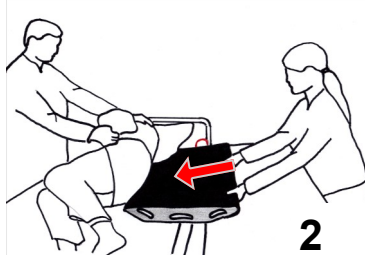


2
Den anden hjælper placerer Master BOARD Multi Medium fra hovedet og nedefter til hoftepartiet. Vær opmærksom på, at boardet dækker helt op til issen på brugeren, da hovedet ellers vil blive voldsomt roteret under overflytningen.

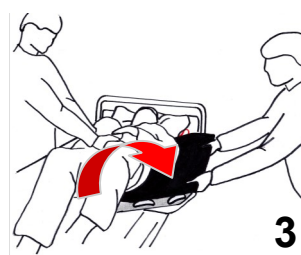


3
Bruger rulles nu tilbage og ned på Master BOARD Multi Medium, således at det dækker øverste halvdel af brugers krop.

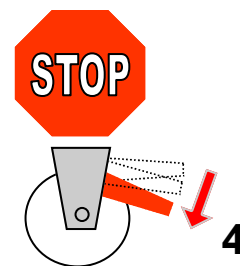


4
Inden overflytning foretages **SKAL** hjulene på begge lejer låses.

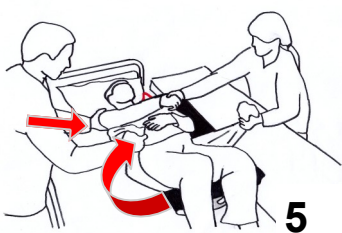


5
Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD Multi Medium.

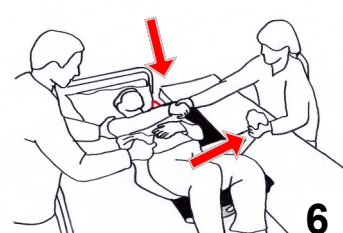

6
Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Master BOARD Multi Medium påbegyndes. Hvis bruger er aktiv, kan han tage fat i hjælperens hånd.

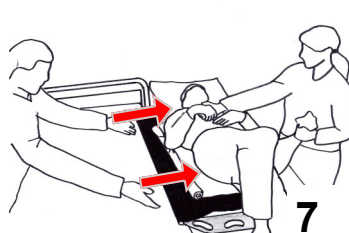

7
Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Master BOARD Multi Medium ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælperens hjælp flytter benene med.

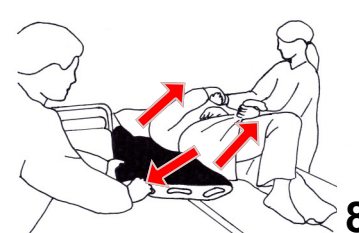

8
Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD Multi Medium. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.


Multi® Master BOARD




The Original Scandinavian Human Handling System

BRUGERVEJLEDNING


A. Forberedelse af Master BOARD Multi® Large

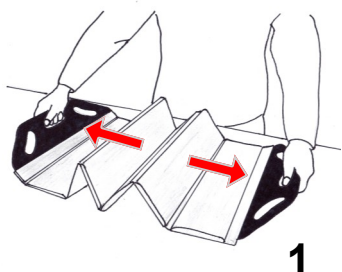


1
Master BOARD Multi Large foldes ud.

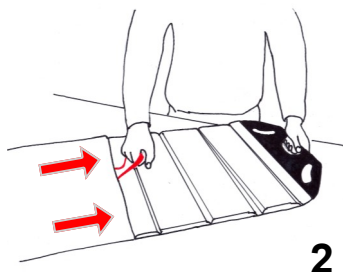

2
Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD Multi Large.

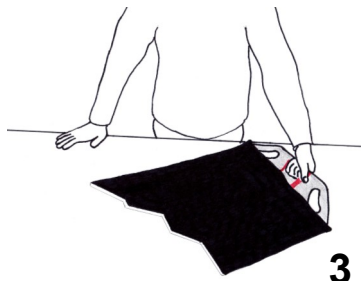

3
Master BOARD Multi Large er nu klar til brug.

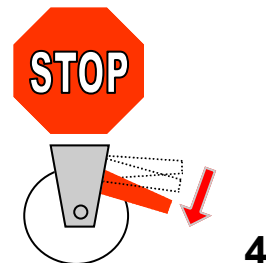

4
Inden overflytning foretages **SKAL** man låse hjul på begge lejer.


B. Placering af Master BOARD Multi® Large



1
Vend bruger om til den ønskede side.




2
Hvis muligt anvend gerne et lagen til vendingen

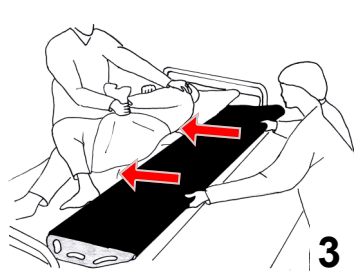


3
Mens den ene hjælper holder bruger i sideleje placerer den anden hjælper Master BOARD Multi Large, således at det dækker fra hoved og nedefter ved brugerens hofte- og benparti.




4
Bruger rulles nu tilbage og ned på Master BOARD Multi Large. Sørg for at hoved og det ene eller begge ben er oppe på Master BOARD Multi Large

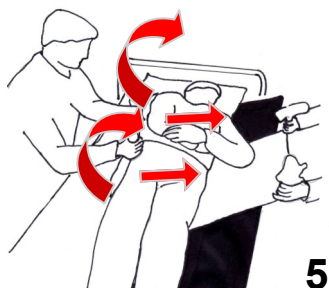


5
Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD Multi Large. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.

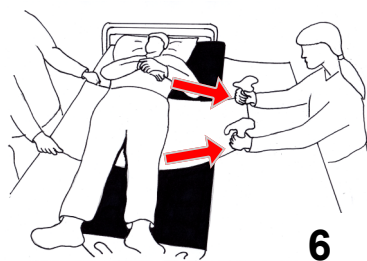

6
Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Master BOARD Multi Large påbegyndes.

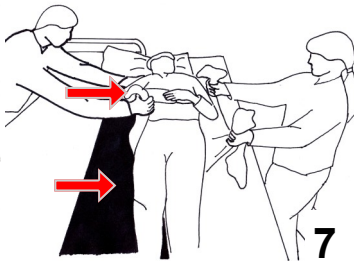

7
Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Master BOARD Multi Large ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælpers hjælp flytter benene med.

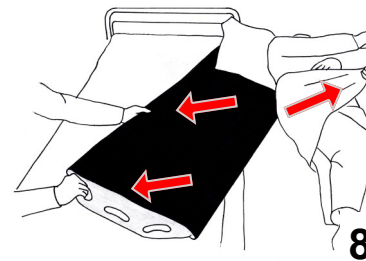

8
Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD Multi Large. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Multi® Master BOARD



The Original Scandinavian Human Handling System

Beskrivelse af de forskellige modeller

Master BOARD Multi Medium®

Består af en polstret afstivet plade. Master BOARD® Multi Medium er delt op i seks sektioner og kan foldes sammen som et harmonika.

Master BOARD Multi Medium er et 2 punkts board, som dækker hofte-, skulder og hovedparti. Her kan brugeren enten selv flytte benene, eller hjælper flytter disse.


Master BOARD Multi Large®

Består af en polstret afstivet plade. Master BOARD® Multi Large er delt op i 8 sektioner og kan foldes sammen som et harmonika. Master BOARD® Multi Large er et 3 punkts board, som dækker hele kroppens længde.

Vaskeanvisning


Master BOARD Multi® kan vaskes ved 80 grader C.



 Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Max. brugervægt

Personvægt: 160 kg ved max. 20 cm afstand mellem flyttepunkter.

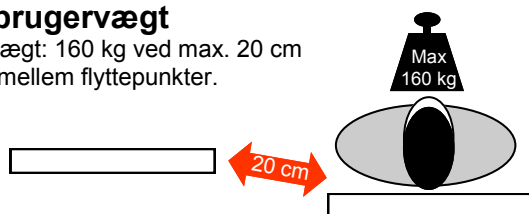

Produktbeskrivelse

Master BOARD Multi® består af et polstret afstivet overflytningsboard delt op i sektioner. Udenpå Master BOARD Multi® anvendes som tilbehør et cover af nylon, som roterer og glider mod boardet. Derved skabes en rullende bevægelse under bruger.

Master BOARD Multi® anvendes til liggende eller halvt siddende overflytninger mellem seng, leje, hvilestol, kørestol der kan lægges ned mm.

Det unikke med Master BOARD Multi® er, at det bygger bro mellem mindre afstande eller højdeforskelle. Dets udformning gør, at det tilpasser sig underlaget ved overflytning, hvor brugeren f.eks. sidder halvt op i en seng eller stol

Ved opbevaring af Master BOARD Multi® fylder det ikke meget, da det kan foldes sammen som en harmonika.

ADVARSEL

Sørg hele tiden for, at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

VIGTIGT

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.



Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk