

Mini MASTER[®]



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System



Art. nr. MC 003-2020
Hmi nr. 36416
Mini MASTER Non-Slip Small
Størrelse: L 50 x B 20 cm
Antal håndtag: 4



Art. nr. MC 003-2021
Hmi nr. 37424
Mini MASTER Non-Slip Medium
Størrelse: L 60 x B 20 cm
Antal håndtag: 4



Art. nr. MC 003-2022
Hmi nr. 37425
Mini MASTER Non-Slip Large
Størrelse: L 70 x B 20 cm
Antal håndtag: 4



Art. nr. MC 003-3020
Hmi nr. 36417
Mini MASTER Velour Small
Størrelse: L 50 x B 20 cm
Antal håndtag: 4



Art. nr. MC 003-3021
Hmi nr. 37426
Mini MASTER Velour Medium
Størrelse: L 60 x B 20 cm
Antal håndtag: 4



Art. nr. MC 003-3022
Hmi nr. 37427
Mini MASTER Velour Large
Størrelse: L 70 x B 20 cm
Antal håndtag: 4

Når mobiliteten forringes ...



... forbedrer vi livskvaliteten !

Mini MASTER[®]




The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

Brugervejledning


A. Rejse op / Sidde ned



1
Hjælper stiller sig foran bruger. Bruger læner sig fremad.

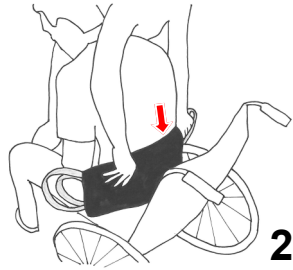

2
Hjælper fører Mini MASTER ned bag om brugerens ryg.

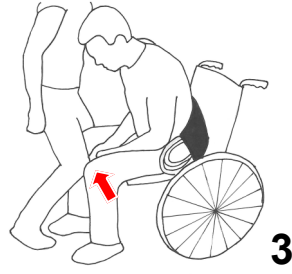


3
Hjælper bøjer sine ben og støtter disse mod brugerens ene ben.




4
Hjælper trækker i håndtag og finder balance mellem bruger og sig selv. Hjælper og bruger rejser sig op til stående.


B. Flytte højere op i seng 1

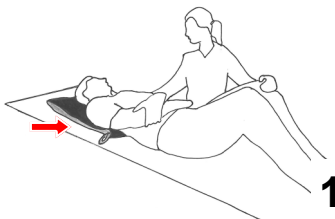


1
Placer en Slide MASTER nylon under brugerens skulderparti og bøj derefter brugerens knæ.

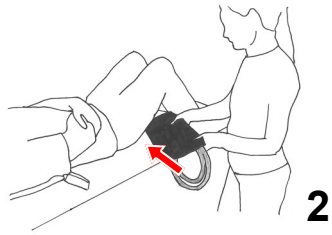

2
Før Mini MASTER ind under brugerens sæde.

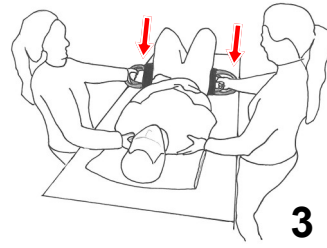


3
Hjælpere stiller sig på hver side af bruger, griber i håndtag og trækker brugeren højere op i seng.

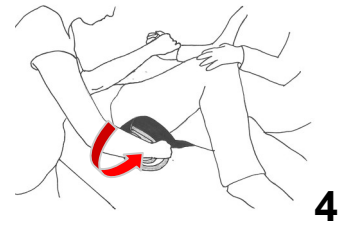


4
Bøj brugers ene ben. Fold Mini MASTER ind under brugeren fra den side, hvor brugeren har bøjet sit ben. Stræk benet ud igen. Bøj brugers andet ben. Hjælper griber i håndtag på Mini MASTER og ruller denne ud på modsatte side.


C. Flytte højere op i seng 2

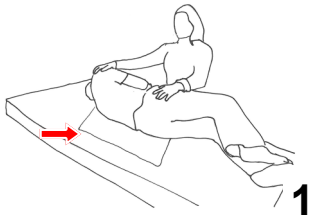


1
Brugeren ruller om til den ene side. Hvis nødvendig støtter hjælper. Læg et stykke rørformet eller åbent Nylon MASTER ind under bruger

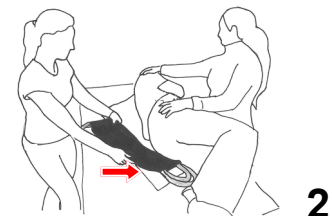

2
Mini MASTER placeres oven på Nylon MASTER og ind under brugers ene hofte.

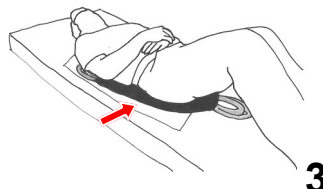

3
Brugeren ruller tilbage og ligger med hofte mod Mini MASTER

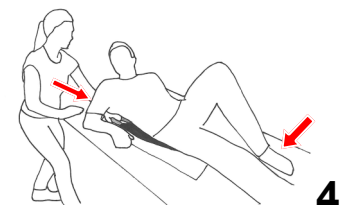

4
Brugeren rejser sin overkrop, støtter med albuer og stemmer fra med det modsatte ben. Bruger skubber med sit bøjede ben samtidig med hjælper trækker i håndtag på Mini MASTER. Herved glider Mini MASTER nemt mod Nylon MASTER.


Mini MASTER[®]



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System


Brugervejledning

D. Siddende overflytning fra stol til seng

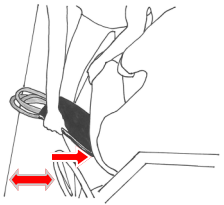


1

Placer kørestol så tæt på sengen som muligt. Sørg for at seng og stol har samme højde. Fold Mini MASTER sammen og før denne ind under brugers sæde til den side, hvortil overflytningen skal foregå.

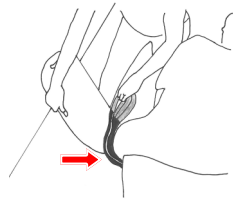


2

Før Master GLIDE Glidebrættet ind under Mini MASTER.

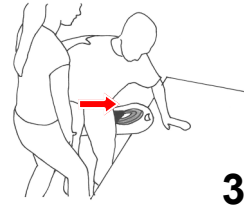

3


Bruger læner nu sin vægt mod Mini MASTER og Master GLIDE glidebrættet. Hjælper støtter bruger.

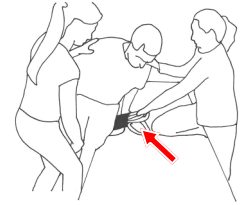

4


Hjælper trækker i håndtag på Mini MASTER, bruger glider nu over ved at udnytte Master GLIDE's glatte overflade. Grib i håndtag på glidebrættet og træk det væk under bruger. Grib i håndtag på Mini MASTER og

E. Dreje tunge ben ud/ind over sengekanten

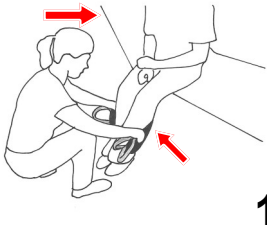

1


Elever hovedgærdet på sengen. Før Mini MASTER rundt om brugers ben.

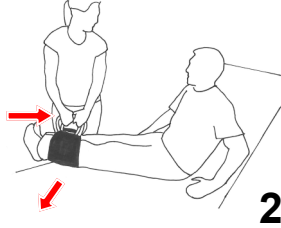

2


Løft i håndtag og drej brugers ben ind i seng. Hvis bruger sidder på Turn MASTER drejepude, vil vedkommende dreje meget let ind i seng.

F. Støtte ved gang (anbefales kun i træningsituationer)

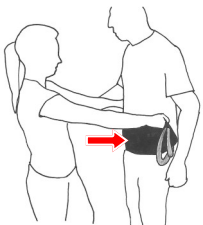

1

Når bruger står op placeres Mini MASTER mod brugers maveparti.

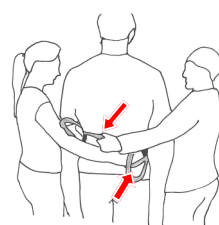

2

Hjælper krydser arme og griber i håndtag på Mini MASTER bag brugers ryg. Herved anvendes Mini MASTER som støtte ved gang.

Beskrivelse af de forskellige modeller **Produktbeskrivelse**

Mini MASTER[®] Small

Mini MASTER Small er ideel at anvende på mindre brugere.

Mini MASTER[®] Medium

Mini MASTER Medium er ideel at anvende på mellemstore og store brugere.

Mini MASTER[®] Large

Mini MASTER Large anvendes til store brugere, eller til at kompensere for afstand til den høje hjælper.

Vaskeanvisning

Mini MASTER kan vaskes ved 80 grader C.



Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Max. Brugervægt

Personvægt: 250 kg



ADVARSEL



Forlad aldrig bruger siddende på Mini MASTER. Dette for at undgå ulykker med alvorlige personskader til følge.

VIGTIGT

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Mini MASTER består af en polstret afstivet flytteplade med håndtag. Mini MASTER leveres i to varianter. Denne ene med skridsikker inder side af "Velour" og den anden med skridsikker inderside af PU-belagt polyester "Non-SLIP".

Mini MASTER er ideel til at forlænge" hjælpers arme og giver derved gode arbejdsstillinger. Mini MASTER giver ydermere sikker håndtering og fremmer aktivering i et naturligt bevægelsesmønster for både bruger og hjælper. Mini MASTER leveres i Small, Medium og Large.

Erfaringsmæssig holdbarhed: minimum 5 år

