


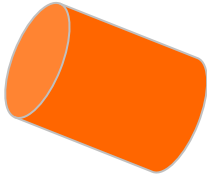

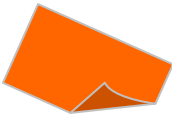
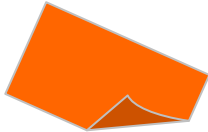
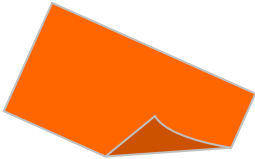


Nylon MASTER®

Brugervejledning

 Art. nr. MC 001-1101 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34304 Nylon MASTER X-small Rørformet glidestykke af nylon Størrelse: L 30 x B 60 cm	 Art. nr. MC 001-1102 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34305 Nylon MASTER Small Rørformet glidestykke af nylon Størrelse: L 60 x B 60 cm	 Art. nr. MC 001-1103 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34306 Nylon MASTER Medium Rørformet glidestykke af nylon Størrelse: L 80 x B 80 cm	 Art. nr. MC 001-1104 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34307 Nylon MASTER Large Rørformet glidestykke af nylon Størrelse: L 100 x B 80 cm
 Art. nr. MC 001-1201 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34300 Nylon MASTER X-small Åbent glidestykke af nylon Størrelse: L 30 x B 120 cm	 Art. nr. MC 001-1202 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34301 Nylon MASTER Small Åbent glidestykke af nylon Størrelse: L 60 x B 120 cm	 Art. nr. MC 001-1203 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34302 Nylon MASTER Medium Åbent glidestykke af nylon Størrelse: L 80 x B 160 cm	 Art. nr. MC 001-1204 <input type="checkbox"/> Hmi-nr. 34303 Nylon MASTER Large Åbent glidestykke af nylon Størrelse: L 100 x B 160 cm

Når mobiliteten forringes....



Lav vægt

Fleksibel

Tryghed

Komfortabel

Aktivering

Visionær




The Original Scandinavian Human Handling System

... forbedrer vi livskvaliteten

Nylon MASTER

The Original Scandinavian Human Handling System

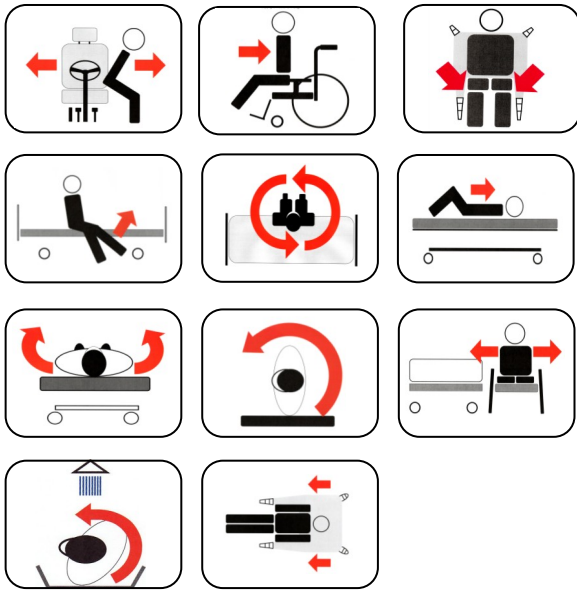

Produktbeskrivelse:

Nylon MASTER består af tynde glidestykker af specialfremstillet nylonmateriale HLF (Hyper Low Friction) varemærke, der kendetegner et Master CARE produkt med unikke glideegenskaber og lang holdbarhed.

Nylon MASTER er glat på begge sider og de indvævet nylontråde, gør det meget stærkt. Materialet knitrer ikke.

Nylon MASTER leveres som rørformede og åbne glidestykker.

Nylon MASTER har mange anvendelsesmuligheder bl.a. til ind- og udstigning af bilsæde, tilbage i stol, positionere i stol, flytte tunge ben i seng, dreje ud og ind af sengekant, flytte højere op i seng, vende i seng, vende på behandlingsbåre, fra kørestol til seng, vende i badebåre, sejlplægning siddende og liggende mm.

Nylon MASTER øger brugerens mobilitet og fremmer derved bevægelighed og aktiv deltagelse i forflytning. Nylon MASTER fremmer også gode arbejdsstillinger for hjælper.

ADVARSEL

- Forlad aldrig brugeren placeret på dette hjælpemiddel. Dette for at undgå ulykker med alvorlige personskader til følge.

Vigtigt

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger og håndtag mindst en gang hver halve år.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

Ansvar

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale: 100% Nylon



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Nylon MASTER kan vaskes ved 80 grader C.

Produkterne kan også spritrenses med alle tilgængelige desinficeringsvæsker.



Skyllemiddel

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Master CARE
Højvænget 1
8330 Beder
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
info@master-care.dk
www.master-care.dk