

One Way MASTER[®]

Rørformet[®]



The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System



Art. nr. MC 001-1285
Hmi nr. 40372
One Way Master Small
Størrelse: L 40 x B 35 cm

Art. nr. MC 001-1290
Hmi nr. 40373
One Way Master Medium
Størrelse: L 50 x B 40 cm

Art. nr. MC 001-1295
Hmi nr. 40376
One Way Master Large
Størrelse: L 60 x B 60 cm

Når mobiliteten forringes ...



... forbedrer vi livskvaliteten !

One Way MASTER[®]

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System




BRUGERVEJLEDNING

A. Placering af bruger på One Way MASTER Rørformet



1

Placér One Way MASTER Rørformet som etiketten "Denne side opad og ind mod sæderyg" foreskriver.

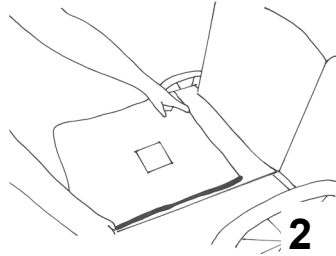

2


Rul One Way MASTER Rørformet en smule frem på siddeunderlaget, indtil der er ca. 10-15 cm fra bagkant af One Way MASTER Rørformet og sæderyggen.



3

Bruger placeres nu på One Way MASTER Rørformet.

B. Forflytning tilbage i stol

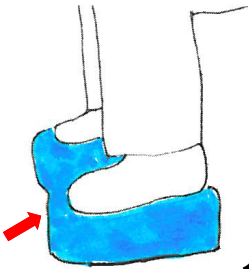

1

Undgå at brugers ben hænger mod forkant af stolesædet ved at placere disse i fodstøtter eller ved at anvende Foot MASTER. Dette for at få vægten ind på One Way MASTER Rørformet.



2

Bruger glider ved hjælp af One Way MASTER Rørformet tilbage i stolen.

Rørformet One Way MASTER[®]

The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System



BRUGERVEJLEDNING

C. Forflytning tilbage i stol med en eller to hjælpere




Hvis bruger har behov for hjælp kan hjælper skubbe mod brugerens knæ foran.

Mini MASTER Flytteplade kan med fordel anvendes ved at føre denne rundt foran brugerens maveparti. Brugeren læner sig godt fremad samtidig med at hjælper flytter vedkommende ind på stolesædet.

Er der yderligere behov for hjælp, kan den ene hjælper skyde foran mod brugerens knæ mens den anden flytter brugeren ind på stolesædet med Mini MASTER Flytteplade.

Når bruger er blevet for tung eller for passiv anbefaler vi at anvende MC 001-1365, MC 001-1370 eller MC 001-1375 One Way MASTER Åben eller en løsning med løftesejl

D. Forflytning tilbage i mekanisk drejesæde

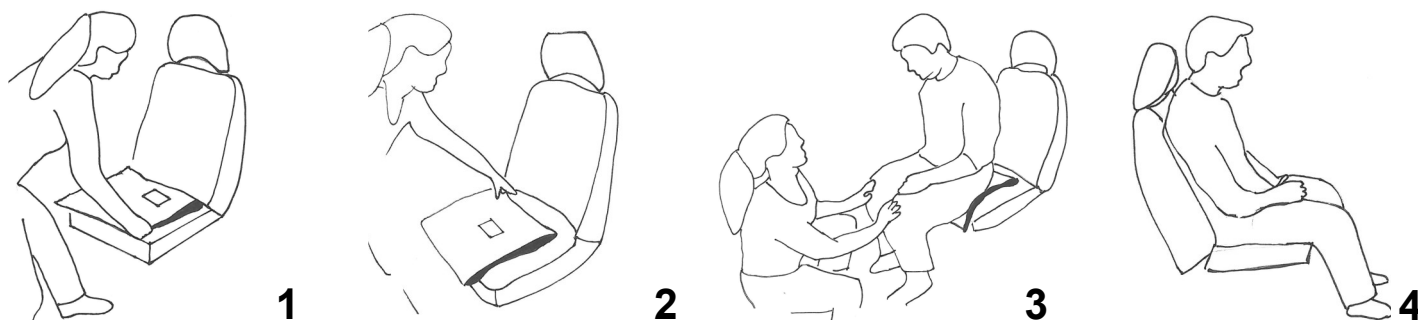

Placér One Way MASTER Rørformet med etiketten ” Denne side ind mod sæderyg”.

Rul One Way MASTER Rørformet en smule frem på stolesædet, indtil der er en afstand fra dens bagkant og ind til sæderyg på ca. 10-15 cm.

Bruger placeres ovenpå One Way MASTER Rørformet og skyder sig tilbage eller ved at en hjælper skubber mod brugers knæ.

Afslutningsvis drejes sædet og bruger forbliver siddende på One Way MASTER Rørformet under køreturen.
Husk DU ALTID SKAL ANVENDE SIKKERHEDSSELE under kørsel med One Way MASTER Rørformet.

One Way MASTER[®]

Rørformet



The ORIGINAL Scandinavian Slide and Turn System

Beskrivelse af de forskellige modeller

One Way MASTER rørformet small

One Way MASTER rørformet small anvendes til børnekørestol.

One Way MASTER rørformet Medium

One Way MASTER rørformet medium anvendes til alm. kørestol.

One Way MASTER rørformet Large

One Way MASTER Large anvendes til bred kørestol.

Vaskeanvisning

One Way MASTER rørformet kan vaskes ved 80 grader C.



Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten

ADVARSEL

Husk altid at anvende den permanente sikkerhedssele, som er fastmonteret i bilen inden kørsel med One Way MASTER rørformet



VIGTIGT

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvil om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

One Way MASTER rørformet består af rørformet tynde glidepuder. One Way MASTER rørformet anvendes som permanent glideunderlag og er ideel at anvende for brugere, der ofte glider frem i f.eks. kørestolen.

One Way MASTER rørformet gør det nemt for hjælperen på en behagelig måde at flytte bruger ind på stolesædet. De indvendige bånd er placeret således, at One Way MASTER rørformet glider særdeles godt og ligeledes har unik låsefunktion. Er behagelig for bruger at sidde på.

Kunder, der købte One Way MASTER, købte også Foot MASTER og Mini MASTER



Art. nr. MC 006-8090
Hmi nr. 52014
Foot MASTER
Størrelse: L 38 x B 32 x H 10 cm



Art. nr. MC 003-2020/21/22
Hmi nr. 36416/37424/37425
Mini MASTER Non-Slip
Antal håndtag: 4

Art. nr. MC 003-3020/21/22
Hmi nr. 36417/37426/37427
Mini MASTER Velour
Antal håndtag: 4



Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk