

- Art. nr. PMF-9075
Hmi. nr.
RollBOARD Vision Ambulance
Størrelse: L 85 x B 45 cm

- Art. nr. PMF-9096
Hmi. nr. **61940**
RollBOARD Vision Ambulance
Cover (Glide) af Nylon
Størrelse: L 86 x B 47 cm

- Art. nr. PMF-9095
Hmi. nr. **61937**
RollBOARD Vision Medium
Størrelse: L 95 x B 50 cm

- Art. nr. PMF-9096
Hmi. nr. **61940**
RollBOARD Vision Medium
Cover (Glide) af Nylon
Størrelse: L 96 x B 51 cm



- Art. nr. PMF-9180
Hmi. nr. **61939**
RollBOARD Vision Large
Størrelse: L 195 x B 50 cm

- Art. nr. PMF-9181
Hmi. nr. **61941**
RollBOARD Vision Large
Cover (Glide) af nylon
Størrelse: L 190 x B 51 cm

- Art. nr. PMF-9170
Hmi. nr. **63500**
RollBOARD Vision Large
Størrelse: L 180 x B 50 cm


- Art. nr. PMF-9171
Hmi. nr. **63500**
RollBOARD Vision Large
Cover (Glide) af nylon
Størrelse: L 175 x B 51 cm

Når mobiliteten forringes ...

... forbedrer vi livskvaliteten !


BRUGERVEJLEDNING

A. Forberedelse af RollBOARD Vision® Medium

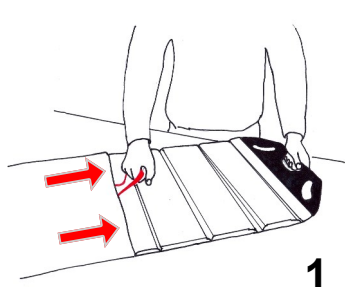


1

Det vedlagte cover af nylon føres over RollBOARD Vision Medium.

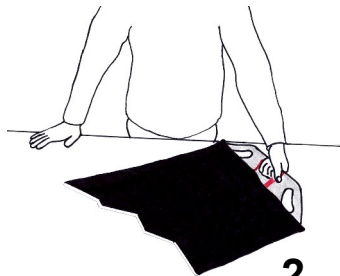

2


RollBOARD Vision Medium er nu klar til brug.

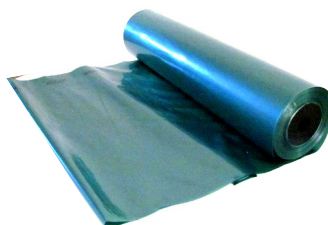

3


Er der strenge krav til hygiejne kan engangsovertræk rekvireres. Art. nr. PM-06050

B. Placering af RollBOARD Vision® Medium

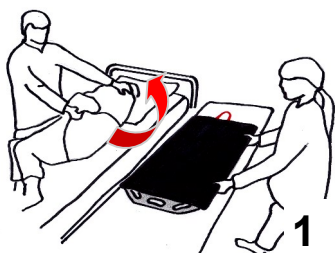

1

Den ene hjælper vender bruger om til den ønskede side. Anvend gerne et stik- eller sengelagen som hjælpemiddel.

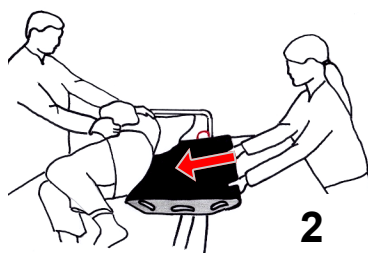


2

Den anden hjælper placerer RollBOARD Vision Medium fra hovedet og nedefter til hoftepartiet. Vær opmærksom på, at boardet dækker helt op til issen på brugeren, da hovedet ellers vil blive voldsomt roteret under overflytningen.




3

Bruger rulles nu tilbage og ned på RollBOARD Vision Medium, således at det dækker øverste halvdel af brugers krop.

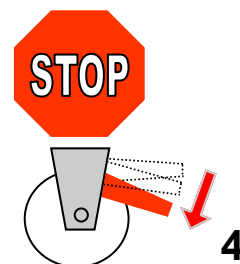


4

Inden overflytning foretages **SKAL** hjulene på begge lejer låses.

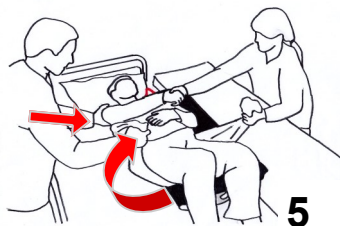


5

Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på RollBOARD Vision Medium.

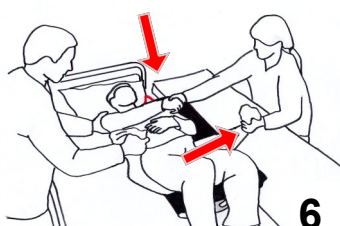


6

Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på RollBOARD Vision Medium påbegyndes. Hvis bruger er aktiv, kan han tage fat i hjælperens hånd.

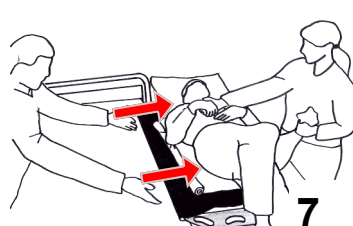

7

Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da RollBOARD Vision Medium ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælperens hjælp flytter benene med.

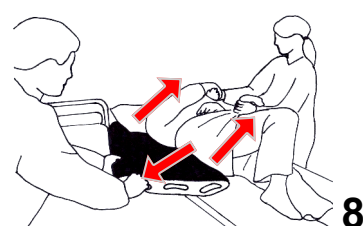


8

Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på RollBOARD Vision Medium. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.


BRUGERVEJLEDNING

A. Forberedelse af RollBOARD Vision® Large

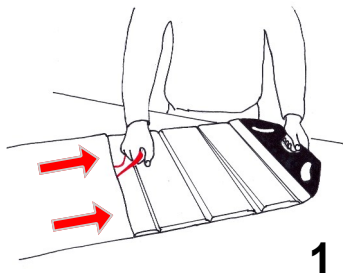


1

Det vedlagte cover af nylon føres over RollBOARD Vision Large.

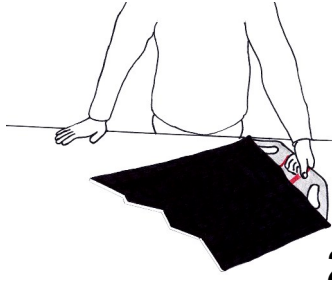


2

RollBOARD Vision Large er nu klar til brug.

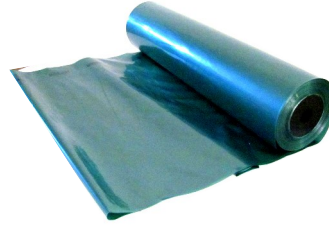

3


Er der strenge krav til hygiejne kan engangsovertræk rekvireres. Art. nr. MC 002-1500

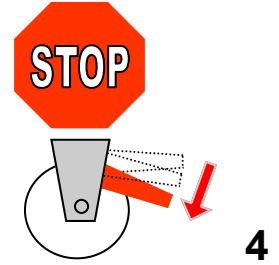

4

Inden overflytning foretages **SKAL** man låse hjul på begge lejer.

B. Placering af RollBOARD Vision® Large

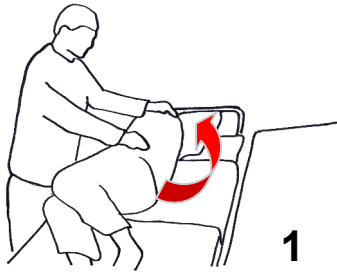


1

Vend bruger om til den ønskede side.




2

Hvis muligt anvend gerne et lagen til vendingen

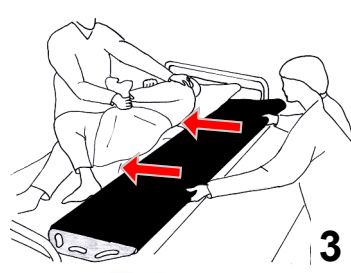


3

Mens den ene hjælper holder bruger i sideleje placerer den anden hjælper RollBOARD Vision Large, således at det dækker fra hoved og nedefter ved brugerens hofte- og benparti.

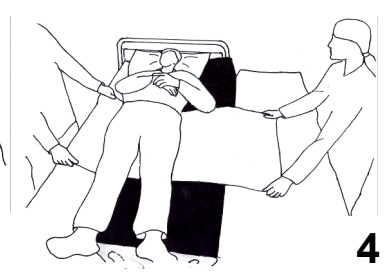


4

Bruger rulles nu tilbage og ned på RollBOARD Vision Large. Sørg for at hoved og det ene eller begge ben er oppe på RollBOARD Vision Large.

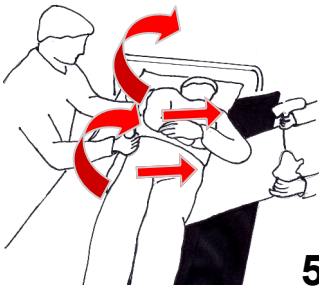


5

Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på RollBOARD Vision Large. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.

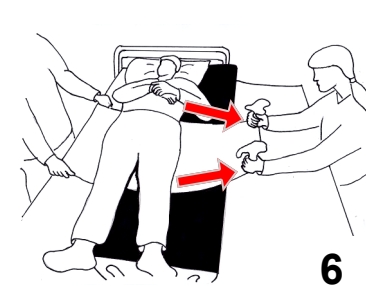


6

Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på RollBOARD Vision Large påbegyndes.

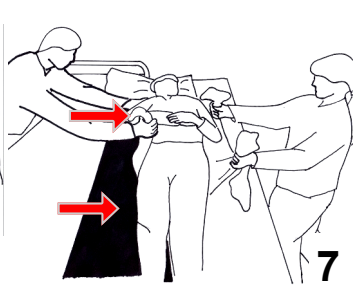

7

Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da RollBOARD Vision Large ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælper hjælper flytter benene med.

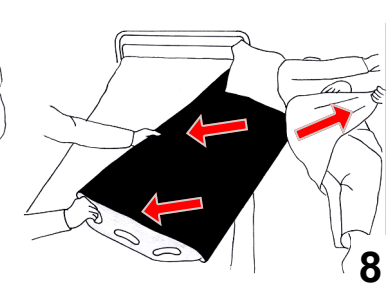

8

Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på RollBOARD Vision Large. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Beskrivelse af de forskellige modeller:

RollBOARD Vision® Medium

Består af en polstret afstivet plade.
RollBOARD Vision® Medium er et 2 punkts board og dækker hofte, skulder og hovedparti. Her kan brugeren enten selv flytte benene, eller hjælper flytter disse.

RollBOARD Vision® Large

Består af en polstret afstivet plade. RollBOARD Vision® Large er delt og kan derved foldes sammen på midten.
RollBOARD Vision® Large er et 3 punkts board, som dækker hele kroppens længde.

Vaskeanvisning


RollBOARD Vision Cover® kan vaskes ved 80 grader C.



Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Max. brugervægt

Personvægt: 200 kg ved max. 15 cm afstand mellem flyttepunkter.

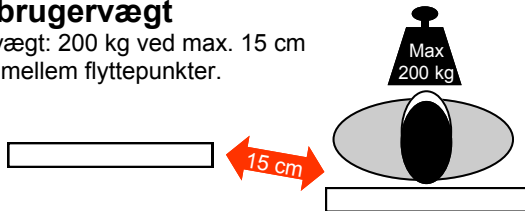

ADVARSEL

Sørg hele tiden for, at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

VIGTIGT

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

RollBOARD Vision® er et helt nyudviklet og patenteret overflytnings Board. RollBOARD Vision består af en polstret afstivet plade.

Udenpå RollBOARD Vision® anvendes som tilbehør et hylster af nylon som roterer og glider mod Boardet. Derved skaber det en rullende bevægelse under bruger. RollBOARD Vision® anvendes til liggende eller halvt siddende overflytninger mellem seng, leje, hvilestol, kørestol mm., som kan lægges ned. Det unikke ved RollBOARD Vision® er, at det bygger bro mellem mindre afstande eller højdeforskelle. Samtidig er det smidigt, så det tilpasser sig underlaget ved f.eks overflytning, hvor personen sidder halvt op. Under opbevaring kan RollBOARD Vision® hænges op.

