

Sling MASTER[®]



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System



- Art. nr. MC 003-9005
Hmi nr. [55767](#)
Sling MASTER X-small
Størrelse: L 150 x B 60 cm
Antal håndtag: 10

- Art. nr. MC 003-9000
Hmi nr. [46707](#)
Sling MASTER Small
Størrelse: L 200 x B 60 cm
Antal håndtag: 14

- Art. nr. MC 003-9010
Hmi nr. [45043](#)
Sling MASTER Medium
Størrelse: L 200 x B 80 cm
Antal håndtag: 14

- Art. nr. MC 003-9020
Hmi nr. [45044](#)
Sling MASTER Large
Størrelse: L 200 x B 100 cm
Antal håndtag: 14

Når mobiliteten forringes ...



... forbedrer vi livskvaliteten !


Sling MASTER[®]



The Original Scandinavian Human Handling System

BRUGERVEJLEDNING


A. Forflytning tilbage i stol

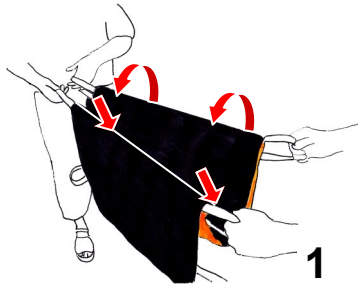


1
Hold Sling MASTER ved at gribe i de to grå bånd i dens midte.
Grib derefter i de to hvide bånd ved samtidig at lade de to grå falde ned mod dens midte.




2
Før derefter Sling MASTER om bag brugerens ryg og ned mod sædepartiet.

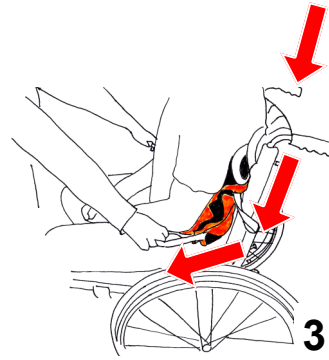


3
Stram Sling MASTER til og lad denne glide ind og under brugerens sædeparti med savende bevægelser.

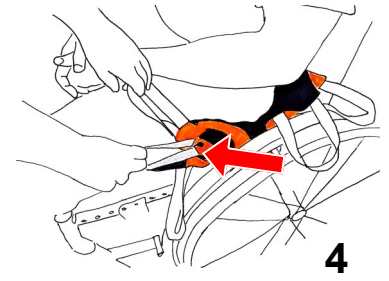

4
Fold Sling MASTER endeligt ud under brugerens sæde ved at gribe i de grå håndtag og trække disse ned i den ene side og derefter den anden side.

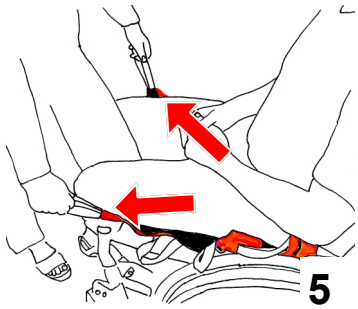


5
Stå altid foran bruger for at hindre at vedkommende glider frem i stolen.

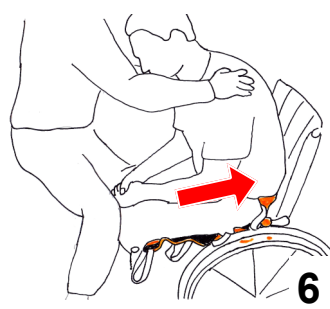

6
Bruger læner overkroppen frem samtidig med at hjælper skubber og lade bruger glide skiftevis fra side til side tilbage i stolen. Vær opmærksom på, at bruger skal støtte sine fødder på enten fodstøtter eller Foot MASTER




7
Bruger er nu gledet tilbage i stolen med Sling MASTER.

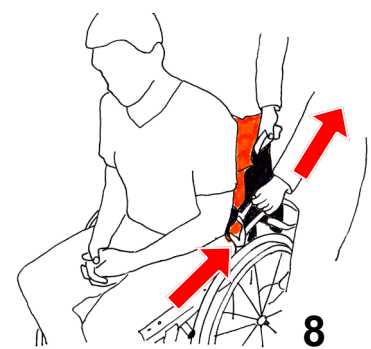


8
Sling MASTER fjernes ved at gribe fat i håndtag og trække den ud under brugerens hofte i den ene side og derefter i modsatte side. Tag nu fat i håndtag i den nederste del og træk skiftevis i disse indtil Sling MASTER er gledet ud under bruger.


B. Placering af Sling MASTER under skulderparti under sengeliggende bruger (Pålægning af sejl)

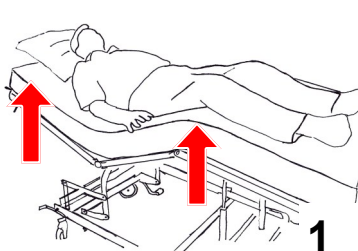


1
Hæv sengen under brugerens knæ og elever hoveddel en smule

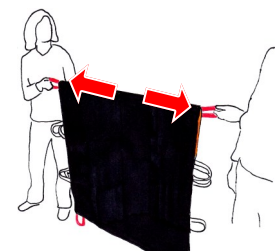

2
Hold Sling MASTER ved at gribe i de to grå bånd i dens midte.

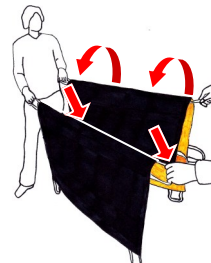

3
Grib derefter i de to hvide bånd ved samtidig at lade de to grå falde ned mod dens midte.

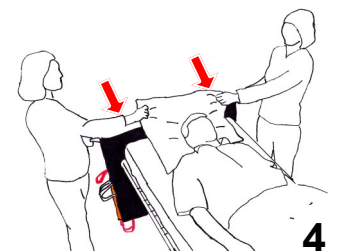

4
Hold Sling MASTER i begge hvide håndtag med en hånd. Med den anden hånd gribes fat i hovedpude og Sling MASTER skydes nu ind under denne.


Sling MASTER[®]




The Original Scandinavian Human Handling System

BRUGERVEJLEDNING


C. Placering af Sling MASTER i lænd

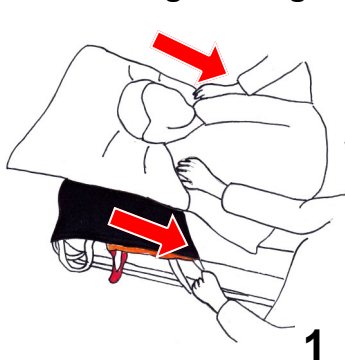

1
Hjælpere trækker skiftevis i de hvide håndtag og laver savende bevægelser indtil Sling MASTER har passeret brugerens skulderblade.

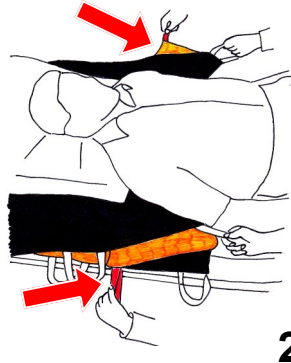

2
Hjælpere griber nu i det nederste grå håndtag på Sling MASTER og denne foldes ud og glides til sidst ned mod brugerens lænd.

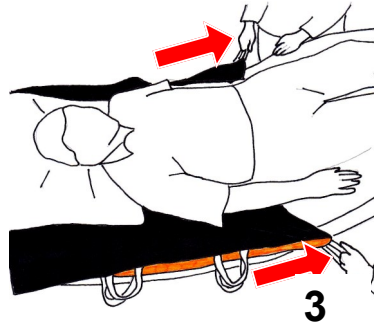


3
Sling MASTER er nu placeret ind under brugeren fra lænden og opefter.




4
Hvis brugeren i forvejen ligger på MC 001-1940 Silk MASTER Glidelagen vil Sling MASTER være utrolig nem at placere.


D. Placering af liftsejl

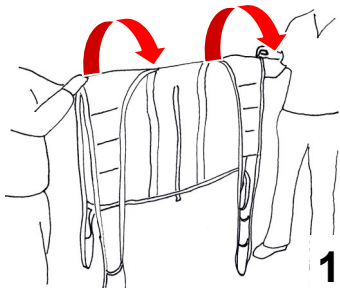

1
Fold liftsejlet sammen, således at rygdelen af sejlet hænger ned med dens yderside mod hovedgavlen og fodstropper hænger ned til den side der vender ind mod brugerens hovedgavl.

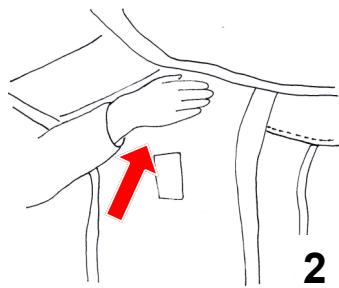


2
Hjælperne holder med håndfladerne ind i liftsejlet, hvor det er foldet sammen.

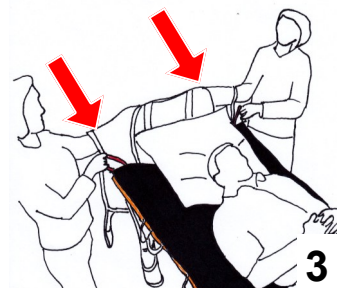


3
Hjælpere griber i de to øverste håndtag på Sling MASTER og skyder sejlet en smule ind mellem de to glideflader.




4
Derefter holder hjælperne i begge de to røde håndtag på Sling MASTER, samtidig med at liftsejlet skydes ned mod brugerens lænd, således at sejlet glider indeni Sling MASTER.

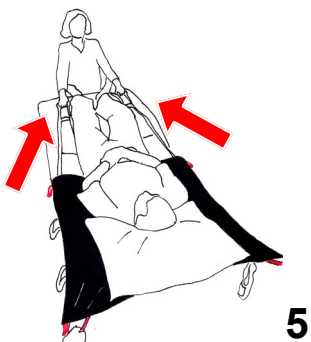

5
Den ene hjælper trækker i benstropper på løftesejlet, mens den anden holder i håndtag i modsatte ende af Sling MASTER. Løftesejlet glides nu på plads.

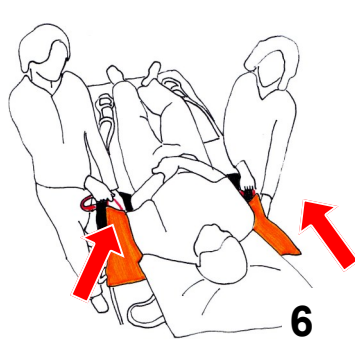

6
Grib i de grå håndtag for enden af Sling MASTER. Fold denne del op, træk og glid denne del ned mod brugerens lænd.

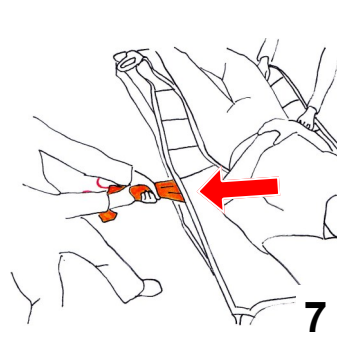

7
Sling MASTER fjernes ved blot at trække i det nederste glideskytte og rulle denne ud under brugeren.

Sling MASTER[®]



The ORIGINAL Scandinavian Human Handling System

Beskrivelse af de forskellige modeller

Sling MASTER[®] X-small

Sling MASTER X-small er ideel at anvende, når bruger skal tilbage på stolesædet.

Sling MASTER[®] Small

Sling MASTER Small er ideel at anvende til at flytte brugere tilbage i stol og til at placere løftesejl under sengeliggende brugere.

Sling MASTER[®] Medium og Large

Sling MASTER Medium og large anvendes til at placere løftesejl under liggende brugere.

Vaskeanvisning

Sling MASTER kan vaskes ved 80 grader C.



Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideeffekten.

Max. Brugervægt

Personvægt: 250 kg



ADVARSEL



Forlad aldrig bruger siddende på Sling MASTER.
Dette for at undgå ulykker med alvorlige personskader til følge.

VIGTIGT

Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.

Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.

Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.

ANSVAR

Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller uhensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Produktbeskrivelse

Sling MASTER[®] består af et tyndt glidestykke. Den leveres med håndtag for god håndtering. Sling MASTER anvendes til at glide brugere tilbage i kørestol, placere løftesejl under bruger liggende i seng. Ligger bruger f.eks. på Silk MASTER eller Arcus Vita Silkelagen, er Sling MASTER[®] utrolig nem at placere under brugeren. Den også anvendes til at placere røntgenkassette eller flytte højere op i seng mm. Leveres med HLF (Hyper Low Friction) Varemærke, der kendetegner glidemateriale med unikke glideegenskaber og lang holdbarhed.



Master CARE
Sofienlystvej 3
DK-8340 Malling
Danmark



Tel. +45 86 93 85 85
Fax. +45 86 93 85 05
E-mail: info@master-care.dk
Web: www.master-care.dk