

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

30_20230317_DK

Master Leg



MC 001-1680



MC 001-1681



MC 001-1682



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 15 03

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
○ MC 001-1680	103158	Master Heavy Leg	5744001970508
○ MC 001-1681	105469	Master Single Leg	5744001970515
○ MC 001-1682	109009	Master Leg Open	5744001970522

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.
Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges sammen med en lift til at løfte benet frit af underlaget hos brugere med kræftnedsættelse i benene. Dette kan være hensigtsmæssigt fx i forbindelse med sårpleje for at nedsætte statisk løftearbejde.

Anvendelse af produktet:

Master Leg monteres rundt om benet og tilkobles lift. Benet kan mobiliseres frit med minimal vægtbelastning.

Advarsel:

Tjek altid at stropperne er korrekt monteret i liftåget, inden benet liftes fra underlaget.

Produktet kan kun bruges med liftåg med kroge.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Har produktet defekte syninger, brudte overflader eller insufficient friktionsnedsættelse, bør produktet kasseres. Herved sikres et sikkerheds- og sundhedsmæssigt arbejdsmiljø for både hjælper og bruger.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til enhver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Leg

Indholdsfortegnelse

Løft af ben i sideleje:	side 2
Brug af Master Leg ved mobilisering / træning:	side 2
Master Heavy Leg:	side 3
Master Leg Open - forflytning i siddende:	side 3
Tekniske specifikationer	side 4



Brugervejledning - Master Leg

Løft af ben i sideleje:



1. Monteres i rygleje.
Harmonika-fold halvdelen af Master Leg så stropperne vender nedad.



2. Roter brugers ben og skub Master Leg ned i madrassen og ind under benet.



3. Træk det foldede stykke ud.



4. Luk burrebåndet rundt om brugers ben.



5. Vend brugeren til sideleje og lift benet op.
Stabil sideleje kan opnås ved brug af Mave- og Rygkile.

Brug af Master Leg ved mobilisering / træning:



6. Master Leg kan bruges til mobilisering og træning hos bruger med nedsat funktion i benet.

Brugervejledning - Master Leg

Master Heavy Leg:



7. Master Heavy Leg monteres på henholdsvis lår og underben.



8. Monter stropperne, så det passer med hvilken knæbøjning, som ønskes.



9. Benet kan nu mobiliseres og fx give plads ved nedre hygiejne.

Master Leg Open - forflytning i siddende:



10. Monter Master Leg Open rundet om brugers underben.



11. Der skal være lidt rum mellem brugers ben. Placer en Roto Master under brugers fødder.



12. Mini Master og Glidebræt kan med fordel benyttes under forflytningen til/fra seng.

Brugervejledning - Produktnavn

Tekniske specifikationer

Materialer:

Polyester, bomuld, Nylon.

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

Varenummer - Navn	Størrelse:	Håndtag:	Max. Brugervægt
MC 001-1680 Master Master Heavy Leg	L 60 x B 35 cm	12	200 kg
MC 001-1681 Master Single Leg	L 60 x B 35 cm	6	150 kg
MC 001-1682 Master Leg Open	L 100 x B 22 cm	2	150 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Efterlad aldrig en bruger liggende på produktet, mens dette er koblet på en lift.



Må ikke bruges som liftsejl – kan med fordel kombineres med lift til fx. vendinger i seng.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 150 - 200 kg



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 60 °C. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

