

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

20_20250114_DK

Sling Vest




MC 003-9040



MC 003-9041



MC 001-9042

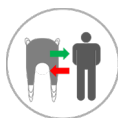

Varenr.

MC 003-9040
MC 003-9041
MC 003-9042

HMI nr.

48844
55719
82004

Navn - Størrelse

Sling Vest Basic - M
Sling Vest Basic - L
Sling Vest Basic - XL

UDI-DI/GTIN

5744001972601
5744001972618
5744001972625

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 36 21 37

The Original Nordic
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges når liftsejl pålægges og tages væk. Nedsætter risiko for shear skader, tryk og træk i huden på ryg. Gør det lettere ergonomisk for hjælperen at pålægge og fjerne sejlet fra brugeren.

Anvendelse af produktet:

Produktet monteres rundt om sejlets ryg inden bruger liftes. Sejlet kan tilpasses i forhold til placering uden shear skader grundet produktets glatte overflade.

Kontraindikationer:

Brug ikke Sling Vest direkte på åbne sår. Forbind såret inden brug af Sling Vest.

Advarsel:

Det anbefales at fjerne produktet, når sejlet ikke bruges for at minimere risikoen for trykskader og varmeophobning.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet har defekte syninger eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Sling Vest

Indholdsfortegnelse

Placere sejl under bruger med Sling Vest liggende i seng – 1-2 hjælpere:	side 2
Fjerne sejl med Sling Vest om hos bruger i siddende position – én hjælper:	side 2
Placering af sejl med Sling Vest bag siddende bruger – 1 hjælper:	side 3
Tekniske specifikationer	side 4



Brugervejledning - Sling Vest

Placere sejl under bruger med Sling Vest liggende i seng – 1-2 hjælpere:



1. Sørg for at brugeren ligger korrekt placeret i sengen med bækkenet. Elever knæ-knækket og derefter sengens hovedende.



2. Hjælpere stiller sig på hver side af sengen og holder i hver sit håndtag på Sling Vesten. Før Sling Vesten ind under brugerens hovedpude oppefra. Kan også gøres af én hjælper.



3. Hjælperne placerer håndfladerne inde i Sling Vesten nede i folden ved brugeren og trykker ned i madrassen i små nyk, mens Sling Vesten føres ind under brugerens ryg, ned til lænden.



4. Sejlet føres ind fra den ene side under nakken.



5. Hver hjælper griber en benstrop, stiller sig i bevægeretningen og glider let sejlet ned på plads under brugeren. De glatte indersider og polstringen i Sling Vesten nedsætter friktionen markant, så brugeren ikke mærker shear eller træk i huden.



6. For at placere benstropperne, kan man med fordel anvende Sling Sock (MC 003-9031). Disse forebygger friktion under lårene og i skridtet under liftning samt holder bruger i den ønskede siddestilling, når benstropperne fjernes.

Fjerne sejl med Sling Vest om hos bruger i siddende position – én hjælper:



7. Lift brugeren til stolen og fjern sejlets benstropper – har Sling Socks været anvendt kan stropperne let trækkes ud uden friktion mod huden.



8. Hjælperen placerer sig bag kørestolen, tager fat i sejlet og glider det op mod den frie del af Sling Vesten bag brugerens hovede.



9. Træk sejlet ud. Sling Vesten fjernes ved at trække op i den bageste del, væk fra brugeren, så den glider på sig selv. Således mærker brugeren ingen shear eller træk.

Brugervejledning - Sling Vest

Placering af sejl med Sling Vest bag siddende bruger – 1 hjælper:



10. Hos brugere, der sidder tung ind mod stolens ryglænet, ikke har kræfter til at læne sig frem eller presser sig hårdt mod stolens ryglæn, kan Sling Vest med fordel benyttes.



11. Placer Sling Vesten løst mellem brugerens hoved/øvre ryg og stolens ryglæn. Håndtagene i siderne skal vende ned mod gulvet.



12. Før hænderne ind i Sling Vesten i folden ved håndtaget og skub Sling Vesten ned med små nyk - kan gøres skiftevis i den ene og den anden side.



13. Før Sling Vest helt ned til sædet.



14. Før sejlets ene benstop ind i Sling Vestens øverste, frie fold. Lad hele sejlet glide på plads inde i Sling Vesten og gør klar til at trække det endeligt på plads bag brugeren.



15. Træk let sejlet ned bag brugerens ryg ved at udnytte Sling Vestens glatte indersider. Brugeren vil ikke mærke skaven eller shear mod kroppen eller huden grundet den vatterede Sling Vest.



16. For at nemmere at placere/fjerne benstopperne kan Sling Socks med fordel anvendes.



17. Når brugeren er placeret i sengen, kan sejlet let trækkes ud af Sling Vesten.



18. Sling Vesten fjernes ved at trække i det nederste lag af Sling Vesten og træk bagom/op.

Brugervejledning - Sling Vest

Tekniske specifikationer

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs
antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

Materialer:

55% Polyester, 41% polyamid, 5% Silikone.

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Håndtag:	Max. brugervægt (SWL):	Produktvægt:
MC 003-9040 Sling Vest Basic - M	L 64 x B 50 cm	2	250 kg	0,26 kg
MC 003-9041 Sling Vest Basic - L	L 72 x B 60 cm	2	250 kg	0,36 kg
MC 003-9042 Sling Vest Basic - XL	L 97 x B 60 cm	2	250 kg	0,45 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på
produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet
liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke
hænger fast i stropperne.



Sørg for, at alle relevante bremsere
er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold
til gældende forordning for CE-
mærkning og lever op til Forordning
MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk
Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 250 kg.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine
ved max. 85 °C. Lavere vaskegrader vil
forlænge levetiden væsentligt.
Produktet kan bruges af andre, når det er
rengjort og er intakt - se evt "Eftersyn"



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektions-
middel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette
forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt
og ved max. 40 °C.
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med
klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med
alkoholholdige desinficeringsblandinger
mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne
inden hver brug. Kontroller, at der ikke er
skader på stof, stropper, sømme mm.
Har produktet høj friktion eller på anden vis
er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden
ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende
regler.

Find os på:



master-care.dk