

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

30_20250114_DK

Master Grip



REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 003-1210	33257	Master Grip - S	05744001972359
MC 003-1212	39262	Master Grip - L	05744001972366

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 15 02

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet benyttes som guidingsstrop ved fx siddende forflytninger, forflytning fra siddende til stående eller til forflytning af ben ind i seng mm. Produktet giver mulighed for en bedre arbejdsstilling for hjælperen.

Anvendelse af produktet:

Master Grip kan fx anvendes hos brugere med funktionsnedsættelse til at understøtte en siddende forflytning eller til at reducere rækkelængden ved placering af et ben under en omlejring.

Indikation:

Benyttes til brugere, som grundet fysisk funktionsnedsættelse eller kognitive udfordringer har brug for støtte til at komme til stående fra fx siddende eller som "forlænget arm", hvis bruger skal trækkes længere op i sengen.

Kontraindikation:

Bør ikke bruges som et løftehjælpemiddel men til understøttelse af brugerens egne ressourcer.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet har defekte syninger eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Grip

Master Grip som "forlænget arm":



1. Hos brugere, som har svært ved at komme op fra fx lænestol kan Master Grip bruges for at undgå uhensigtsmæssig arbejdsstilling for hjælperen samt undgå træk i brugerens tøj.



2. Placer midten af Master Grip med velour siden ind mod brugeren, så den ligger halvt under brugerens bagdel. Lad siderne ligge op langs brugerens side.



3. Bed brugeren om at rejse sig. Hjælper understøtter forflytningen ved at holde i Master Grip og langsomt vægtforskyde /gå baglæns. Det er vigtigt, at hjælper placerer sig i en stilling, så brugerens bevægelse kan følges fx i skridtstående, som vist på billedet, hvor vægten/balancen kan forskubbes fremad og bagud.

Flyt af fx tunge ben eller lang rækkeafstand:



4. Master Grip kan fx bruges, hvis der under omlejring er for lang rækkeafstand til brugerens ben.



5. Placer Master Grip på låret på det ben, som skal forflyttes. Velour siden skal placeres ind mod brugeren. Læg gerne glidestof mellem benene for at undgå shearskade.



6. Efter vending til sideleje trækkes benet fx op på en lejringspude ved at trække i MasterGrip og lave vægtforskydning i benene eller gå baglæns.

Forflytning opad i seng:



7. Master Grip kan bruges, hvis en bruger skal længere op i sengen. Placer glidestof under brugerens trykpunkter. Master Grip placeres under brugerens bagdel. Træk brugeren opad i sengen i et roligt tempo.



8. Master Grip kan bruges til fx løft af underben, hvis den kombineres med en lift.

Brugervejledning - Master Grip

Tekniske specifikationer

Materialer:

Polyester, Bomuld, Nylon.

ISO klassificering:

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Antal håndtag:	Max. Brugervægt:
MC 003-1210 Master Grip - S	L 160 x B 12 cm	8	160 kg
MC 003-1212 Master Grip - L	L 210 x B 12 cm	8	160 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Må ikke bruges som liftsejl – kan med fordel kombineres med lift til fx. løft af ben.



Sørg for, at alle relevante bremses er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 160 kg.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 40 °C.
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling: Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overføring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke stryging



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm.
Har produktet skader, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden brugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Find os på:

