

MADE IN EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.

(FI) Käyttöohje Master Bed Grip

34_20240930_FI



MC 003-3510



MC 003-3520



MC 003-3530



MC 001-1313



Lääkintälaitedirektiivi 2017/745 luokka 1




ISO 12 31 12 02

The Original Nordic
Human Handling Concept



SCAN ME

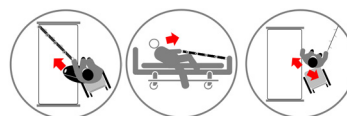

Tuotenro

MC 003-3510
MC 003-3520
MC 003-3530
MC 001-1313

HMI

36414
36415
63305
89661

Nimi - Koko

Master Bed Grip - Soft
Master Bed Grip - Hard
Master Bed Grip - Single
BASIC Grip

UDI-DI/GTIN

5744001972472
5744001972489
5744001972496
5744001970416

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Kiitos kun valitsit Master Care A/S tuotteen.

Suosittellemme lukemaan käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöönottoa. Käyttöohjeen sisältö koskee alkuperäisessä kunnossa olevia tuotteita joita ei ole muokattu tai muutettu ja että tuotetta on käytetty käyttöohjeessa suositellulla tavalla. Mikäli tuotetta muokataan tai korjataan tai käytetään yhdistelmänä jonkun muun tuotteen kanssa jota valmistaja Master Care A/S ei suosittele, niin silloin CE-merkintä ei ole voimassa eikä takuu kata virheellisen käytön seurauksia.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Master Care A/S tuotteen maahantuojaan.

MDR (EU) 2017/745:

Tuote jota käyttöohje koskee on CE merkinnällä hyväksytty ja noudattaa harmonisoituja standardardeja. Tämä tarkoittaa että tuote täyttää sille asetetut terveys- ja turvallisuusdirektiivit. Tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen standardit MDR (EU) 2017/745 luokka 1.

Tuotteen käyttötarkoitus:

Tuote asennetaan sängyn runkoon. Voidaan käyttää käyttäjille, joiden on fyysisen vamman vuoksi vaikea päästä istumaan sängylle.

Tuotteen oikea käyttö:

Voidaan käyttää tukemaan käyttäjää siirtymään itsenäisesti makuuasennosta sängylle istumaan tai säilyttämään tasapainon siirron aikana. Tuote sopii käyttäjälle jolla on voimaa tarttua käsillä kahvoista ja vetää itsensä ylös.

Vasta-aiheet/Varoitus:

Tuote voidaan kiinnittää useimpien sänkymallien runkoihin ja jalkapäätyosiin. Jos on epäilystä sängyn kestävyvyydestä siihen kohdistuvan käyttäjän vetovoiman/painon suhteen, niin varmista asia sängyn valmistajalta.

Riskin arviointi:

Arvioi avustettavan voimavarat ja suunnittele potilassiirto huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Näin minimoit riskit ja toimit potilas- ja työturvallisesti.

Tuotteen/siirron tuntemus:

On tärkeää, että tuotetta käyttävä henkilö tuntee tuotteen ja tietää miten sitä käytetään ja on lukenut käyttöohjeen.

Master Care A/S tarjoaa tuotekoulutusta ja nettisivuiltamme löytyy kaikki tuotteiden käyttöohjeet.

Käyttöikä:

Tuotteen odotettu käyttöikä normaalissa päivittäisessä käytössä on 2-5 vuotta. Käyttöikä riippuu kuinka tuotetta käytetään, käyttäjän painosta, pesu- ja kuivauslämpötiloista ja kuinka usein tuotetta on pesty ja kuivattu. Tarkista tuote säännöllisesti ja mieluiten aina ennen käyttöä. Tuote jossa on vikaa saumoissa, materiaali rikkoutunut tai muita puutteita tulee poistaa käytöstä. Tällä tavoin varmistat terveellisen työympäristön avustajalle sekä käyttäjälle.

Takuu:

Master Care A/S antaa tuotteilleen 2 vuoden takuun joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvat viat edellyttäen, että tuotetta on käytetty oikein.

Tuotteen väärin käytöstä johtuvat seuraukset ja vammat:

Tuotteen väärin käytöstä johtuneet seuraukset tulisi ilmoittaa aina toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle Suomessa FIMEA ja valmistajalle Master Care A/S sekä maahantuojuille.

Valmistaja Master Care A/S ja maahantuoja ei ole vastuussa henkilövahingoista tai tuotteen vaurioitumisesta mikäli tuotetta on käytetty väärin tai sitä ei ole käytetty valmistajan suositusten mukaisesti.



Käyttöohje - Master Bed Grip

Master Bed Gripin kiinnitys:



1. Kiinnitä Master Bed Grip sängyn laitaan tai sängyn pätyyn saadaksesi oikea vetokulma.



2. Master Bed Grip - Pehmeä ja Kova: Käyttäjä voi vetää itsensä ylös sängystä istuma-asentoon, vetämällä kahvoista askeleittain yksi kerrallaan.



3. Master Bed Single: Kiinnitä sängyn laitaan tai sängyn pätyyn. Master Gripin pituutta voidaan säätää mustalla soljella.

Selinmakuulta istuma-asentoon:



4. Sijoita Master Bed Grip lähelle käyttäjää jotta hän helposti yltää siihen.



5. Ota kiinni yhdestä kahvasta kerrallaan ja vedä itsesi ylös istuma-asentoon. Nosta sängyn pääpuolta jos mahdollista mutta se ei ole välttämätöntä.



6. Siirrä jalat sängyltä alas kohti lattiaa päästäksesi istuma-asentoon sängyn reunalle.

Istuma-asennossa avustettu siirto tuolista sänkyyn:



7. Sijoita tuoli sängyn viereen hieman vinosti. Voit käyttää siirtymiseen siirtymä-/liukulautaa.



8. Käyttäjä nojaa eteenpäin samalla vetäen Master Bed Gripistä tukeutuen sänkyyn siirron aikana.

Käyttöohje - Master Bed Grip

Tekniset tiedot

Tuotenro - Tuotteen nimi:	Koko:	Otekahvat:	Maks. Käyttäjäpaino (SWL):	Sisältö:	Paketin paino:
MC 003-3510 Master Bed Grip - Soft	P 180 x L 9 cm	8	160 kg	79% polyesteri, 21% polyeteeni	0,48 kg
MC 003-3520 Master Bed Grip - Hard	P 180 x L 15 cm	8	160 kg	78% polyesteri, 22% polykarbonaatti	0,32 kg
MC 003-3530 Master Bed Grip - Single	P 150 x L 5 cm	1	160 kg	95% puuvilla, 5% nylon	0.12 kg
MC 001-1313 BASIC Grip	P 140 x L 8 cm	5	180 kg	100% polyesteri	0,22 kg

Varoitukset



Älä koskaan jätä tuotetta lattialle.



Varmista aina ettei käyttöä jää kiinni/ takerru hihnoin.



Varmista että jarrut ovat lukittuna ennen kuin siirrät avustettavaa.



CE-sertifikaatti:

Tämä tuote on CE hyväksytty ja noudattaa harmonisoituja standardeja. Tämä tarkoittaa että tuotteet ovat olemassa olevien terveys- ja turvallisuudirektiivien mukaisia.



Pesu:

Master Bed Grip Single, Soft ja Hard voidaan pestä 60°C. BASIC Grip voidaan pestä pesukoneessa 85°C. Hellävarainen pesu ja varovainen rumpukuivaus pidentää huomattavasti tuotteen kestävyttä.



Pesuaineen PH arvo:

Tuote kestää PH arvoltaan 5-9 sisältävät pesu- ja desinfiointiaineet.



Huuhdeluaine:

Älä käytä huuhteluainetta, sillä se heikentää huomattavasti tuotteen liukuomaisuutta.



Rumpukuivaus:

Tämä tuote voi daan rumpukuivata hellävaraisesti maks. 40°C. Ilmakuivaus pidentää tuotteen kestävyttä huomattavasti.



Pintapuhdistus:

Tuotteen pinta voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä ja saippualla.



Desinfiointi:

Tuote kestää alkoholipitoiset desinfiointiaineet PH 5-9.



Silitys:

Älä silitä.



Kuivapesu:

Ei kuivapesua



Valkaisu:

Ei kestä valkaisua.



Huolto:

Tarkista tuote silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä. Erityisesti ompeleet, hihnat ja kankaan kunto esim. Repeämät. Mikäli havaitset tuotteessa vikaa tai tuotteen liukuomaisuus on kulunut, niin tuote pitää poistaa käytöstä.



Käyttöohje:

Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.



Hävittäminen:

Varmista että hävität tuotteen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Löydät meidät:

Lisää ohjeita, videoita, pika-ohjeita jne.
Katso www.master-care.dk