

MADE IN  
EUROPE



Vores produkter og  
råvarer er produceret i  
Europa

Vælg kvalitet, spar  
penge og skån miljøet.

# (DK) Brugervejledning

34\_20221209\_DK

## Master Bed Grip



MC 003-3510



MC 003-3520



MC 003-3530



MC 001-1313



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 12 02


The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



master-care.dk

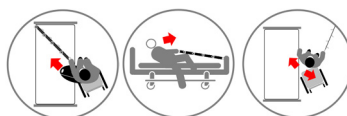

| Varenr.     | HMI nr. | Navn - Størrelse         | UDI-DI/GTIN   |
|-------------|---------|--------------------------|---------------|
| MC 003-3510 | 36414   | Master Bed Grip - Soft   | 5744001972472 |
| MC 003-3520 | 36415   | Master Bed Grip - Hard   | 5744001972489 |
| MC 003-3530 | 63305   | Master Bed Grip - Single | 5744001972496 |
| MC 001-1313 | 89661   | BASIC Grip               | 5744001970416 |



# Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet/produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

## **MDR (EU) 2017/745:**

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

## **Erklærede formål for produktet:**

Produktet monteres på sengerammen og bruges hos brugere med nedsat fysisk funktion til fx at trække sig op til siddende i seng.

## **Anvendelse af produktet:**

Benyttes til at understøtte brugeren i selv at komme fra liggende til siddende i sengen eller til holde balancen under siddende forflytninger. Brugerens evne til at gribe om håndtagene samt behovet for antal greb er afgørende for valg af produkt.

## **Advarsel:**

Produktet kan monteres på langt de fleste sengerammer og -gærder. Er der tvivl om, hvorvidt sengen kan holde til brugers vægt/kraftpåvirkning, bør sengeproducenten kontaktes.

## **Risikovurdering:**

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for

den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

## **Kendskab til produktet/forflytning:**

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

## **Levetid:**

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet har defekte syninger eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

## **Garanti:**

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

## **Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:**

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



# Brugervejledning - Master Bed Grip

## Montering af Master Bed Grip:



1. Master Bed Grip monteres i fx sengerammen eller sengegavl, så ønsket trækretning opnås.



2. Master Bed Grip - Soft og Hard: Brugeren kan trække sig til siddende ved at benytte grebene et efter et.



3. Master Bed Grip - Single: Monteres i fx sengerammen eller sengegavl, så ønsket trækretning opnås. Længden af Master Bed Grip - Single kan reguleres via det sorte spænde.

## Kom fra liggende til siddende:



4. Master Bed Grip kan med fordel placeres langs brugers side, så den er let tilgængelig.



5. Benyt grebene til at komme til siddende. Elever evt. hovedgæret.



6. Sving benene ud over sengekanten og kom til siddende.

## Siddende forflytning fra stol til seng – delvis aktiv bruger:



7. Brugeren placerer kørestolen relevant ift. sengen. Benyt evt. glidebræt.



8. Brugeren læner sig frem ved hjælp af Master Bed Grip og kan støtte sig til sengen under forflytningen.

# Brugervejledning - Master Bed Grip

## Tekniske specifikationer

### Materialer:

Polyester,

Håndtag: Hard - polycarbonat, Soft - Ethylen Vinyl Acetat Copolymer.

| Varenummer - Navn                    | Størrelse:      | Antal håndtag: | Max. Brugervægt: |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| MC 003-3510 Master Bed Grip - Soft   | L 180 x B 9 cm  | 8              | 160 kg           |
| MC 003-3520 Master Bed Grip - Hard   | L 180 x B 15 cm | 8              | 160 kg           |
| MC 003-3530 Master Bed Grip - Single | L 150 x B 5 cm  | 1              | 160 kg           |
| MC 001-1313 BASIC Grip               | L 140 x B 8 cm  | 5              | 180 kg           |

## ADVARSLER



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



### CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



### Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: Master Bed Grip 160 kg og BASIC Grip 180 kg.



### Strygning:

Tåler ikke strygning.



### Vask:

Master Bed Grip Single, Soft og Hard kan vaskes ved 60 °C.  
Basic Grip kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C.  
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



### Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



### Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



### Blegning:

Tåler ikke blegning.



### Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



### Eftersyn:

Fortag jævnlig visuel inspektion og tjek at alle syninger, greb og materialer stadig er hele og funktionelle i forhold til brug.



### Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.  
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.



### Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.

Find os på:

