

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

38_20230309_DK

Master Comfort Armpuder

Lejringspuder i topklasse



MC 001-8017



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 09 07 06 07


The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

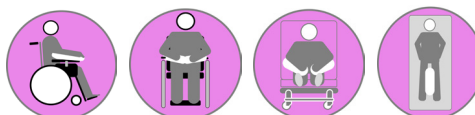

Varenr.

MC 001-8017

MC 001-8018

HMI nr.

71683

134201

Navn - Størrelse

Master Comfort Armpude

Master Comfort Armpude - M

UDI-DI/GTIN

5744001971451

5744001974254



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges til understøttelse og aflastning af væv ved lejrning. Formålet er at give en stabil afgrænset positionering/- lejrning i forbindelse med forflytning eller langtidspositionering. Kiler med nonslip kan benyttes direkte på glatte flader.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Anvendelse af produktet:

Produktet bruges til understøttelse af fx paretisk arm for at minimere risikoen for tryksår eller understøtte en korrekt ledstilling.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger til brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på minimum 2-5 år ved normal slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig støtte og vægtaflastning, bør kasseres. Produktet bør efterses jævnligt, og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:


Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Comfort Armpuder

Understøtte arm i siddende (Passiv bruger, 1 hjælper)

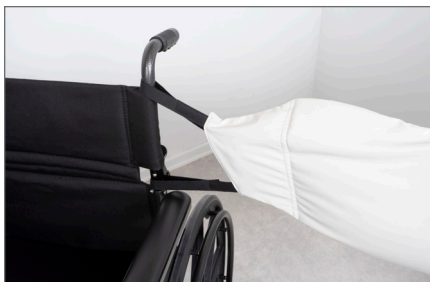

1. Åben burrebåndet og monter det omkring kørestolens rygdæl, rygrør eller armlænet. Armpuden kan nu let flyttes til siden, når den ikke bruges eller efterlades hængende på bagsiden af stolen uden at falde på gulvet.



2. Løft armen. Placer Armpuden og sænk armen, så den støttes af Krøyerkuglerne. Kuglerne kan tilpasses armens placering fuldstændigt.

Understøttelse med armpude i liggende (Passiv bruger, 1 hjælper)




3. Monter burrebåndet på sengehesten. Placer Armpuden under brugerens arm og tilpas Krøyerkuglerne. Armpuden kan med fordel vælges hos personer, der let taber eller bevidst fjerner deres lejringspuder. Fæstningen med burrebånd gør, at puden ikke falder på gulvet.

Placering af Armpuden i seng:



4. Monter burrebåndet på sengeenden. Placer Armpuden mellem brugerens ben og tilpas kuglerne.

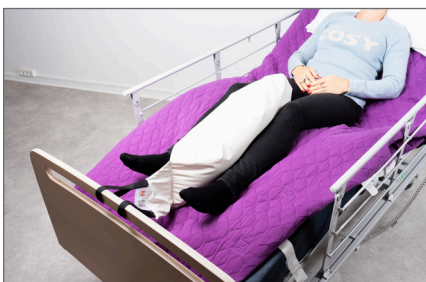

5. Armpuden kan hænges ud over sengeenden uden at falde på gulvet og efterfølgende placeres igen. Armpuden er således altid indenfor rækkevidde.

Brugervejledning - Master Comfort Armpuder

Tekniske specifikationer

Materialer:

Betræk: Flammehæmmende, elastisk og vandtæt polyester.

Indhold: Flammehæmmende Krøyer kugler.

ISO klassificering:

DS/EN ISO 12952-1:2010

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: Antændelseskilde: Glødende cigaret.

DS/EN ISO 12952-2:2010

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 2: Antændelseskilde: Tændstikflamme.

Varenummer - Navn


Størrelse:

MC 001-8017 Master Comfort Armpude	L 89 x B 36 x H 10 cm
MC 001-8018 Master Comfort Armpude - M	L 70 x B 19-27 x H 8 cm

ADVARSLER



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.

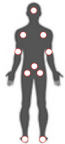

Brug af lejringsmateriale kan ikke erstatte behovet for omlejring og tilsyn med hud og væv.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C, men aftørring med sprit/alkohol anbefales for at forlænge holdbarheden.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt kan tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C, men lufttørring vil øge holdbarheden betydeligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Fortag jævnlig visuel inspektion og tjek at inkontinensfladen stadig er intakt ift. brug, og at alle syninger er intakte.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Find os på:

