

MADE IN
EUROPE




Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

40_20250402_DK

Super Glide **ECO** Tube

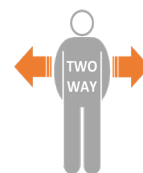

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



REF (Vare nr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
☐ MC 002-1268	117516	Super Glide ECO - Tube 210x55	05744001971918
☐ MC 002-1270	122057	Super Glide ECO - Tube 110x55	05744001971932
☐ MC 002-1273	125038	Super Glide ECO - Tube 110x55	05744001971963
☐ MC 002-1276	-	Super Glide ECO - Tube 210x55	05744001971567
☐ MC 002-1278	131081	Super Glide ECO - Tube 210x62	05744001971550

ISO 12 31 03 25

The Original Nordic
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Brugervejledning - Super Glide **ECO** Tube

Indholdsfortegnelse

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:	side 2
Klargøring af Master Board inden brug:	side 3
Overflytning med Master Board/Vision Board og Super Glide ECO Tube:	side 3
Fjerne Master Board under bruger (2 hjælpere):	side 3
Tekniske specifikationer	side 4
Materiale:	side 4



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet kan benyttes direkte mod boardet i stedet for eller udover Nylon Coveret. Produktet sikrer høj hygiejne ved overflytninger. Produktet trækkes udover overflytningsboardet, så bruger ikke har direkte kontakt med boardet/coveret under forflytning.

Anvendelse af produktet:

Super Glide ECO Tube monteres udenom overflytningsboardet. Den glatte inderside optimerer gliddet under forflytningen og højner hygiejne forholdene eftersom bruger ikke kommer i direkte kontakt med overflytningsboardet.

Indikation:

Benyttes hvis der er behov for støtte til at lave horisontal overflytning mellem 2 overflader, hvor friktion skal nedsættes og/eller der er behov for høj hygiejne standard.

Kontraindikation:

Der kendes ikke til kontraindikationer ved brug af produktet.

Advarsel:

Materialet er lavet af plast og er derfor ikke er åndbart. Produktet bør ikke efterlades under brugeren i længere tid, da dette kan medføre skader på vævet. Brug altid produktet dobbeltlags for at opnå optimal friktionsnedsættelse.

Efterlad ikke produktet på gulvet grundet øget risiko for fald.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Produktionsdato og levetid:

Produktets produktionsdato kan ses på produktets label under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.

Produktet er et engangsprodukt (SPU), som kan bruges flere gange til samme patient, hvis de hygiejniske forhold tillader dette. Produktet tåler aftørring med sprit. Ved længere tids opbevaring anbefales opbevaring i original emballage og ved middel temperatur.

Kontrol/Eftersyn:

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.




Brugervejledning - Super Glide **ECO** Tube

Klargøring af Master Board inden brug:



1. Påfør Super Glide ECO Tube udover nylon coveret på boardet, hvor der er høje hygiejnekrav ifm. forflytningen.

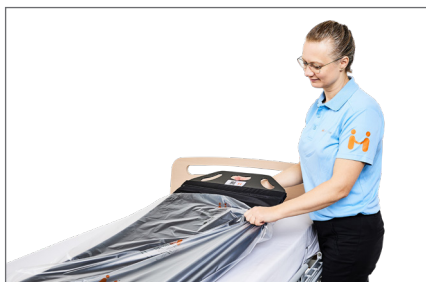

2. Super Glide ECO Tube kan benyttes direkte udover Master Board eller Vision Board. Super Glide ECO har en specialcoating på indersiden, som gør det særlig glat så nylon coveret kan undværes.

Overflytning med Master Board/Vision Board og Super Glide ECO Tube:



3. Før engangsovertrækket ud over det valgte Master Board eller Vision Board. Vend bruger over på siden og placer Board incl. Super Glide ECO Tube under brugeren.



4. Vend brugeren retur til rygleje på boardet. Bed evt. brugeren løfte hovedet og bøje benene, så der kan hjælpes til under forflytningen.



5. Udfør den sideværts liggende forflytning. Engangsovertrækket glider let udenpå boardet, sammen med Nylon Cover. Boardet flyttes let væk efterfølgende. Klip evt engangsovertrækket op, hvis dette er lettere.

Fjerne Master Board under bruger (2 hjælpere):



6. Ved brug af engangsovertræk kan man vælge at klippe dette op i den ene side.



7. Slide efterfølgende boardet ud mellem de 2 glatte overflader.



8. Træk Super Glide ECO Tube ud ved at trække i det nederste lag. Hvis der opleves modstand, træk fra en anden vinkel. Dette er for at undgå unødvendig friktion og skader mod brugerens hud.

Brugervejledning - Super Glide ECO Tube

Tekniske specifikationer

Materiale:

MDPE - recirkuleres som LDPE.

Varenummer - Navn:	Størrelse:	SWL:	Produktvægt:
MC 002-1268 Super Glide ECO - Tube 210x55	L 210 x B 55 cm	Ikke aktuel	10 kg
MC 002-1270 Super Glide ECO - Tube 110x55	L 110 x B 55 cm	Ikke aktuel	5,6 kg
MC 002-1273 Super Glide ECO - Tube 110x55	L 110 x B 55 cm	Ikke aktuel	2,2 kg
MC 002-1276 Super Glide ECO - Tube 210x55	L 210 x B 55 cm	Ikke aktuel	4,38 kg
MC 002-1278 Super Glide ECO - Tube 210x62	L 210 x B 62 cm	Ikke aktuel	11,9 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler. Produktet kan sorteres som LDPE.



Eftersyn:

Produktet er til Single Patient Use og kan bruges flere gange til samme patient, hvis det vurderes hygiejnemæssigt forsvarligt. Produkter, med høj friktion eller som er i stykker, skal kasseres.

Opbevaring:

Opbevaring i original indpakning ved middel temperatur anbefales.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk