

MADE IN  
EUROPE



Vores produkter og  
råvarer er produceret i  
Europa

Vælg kvalitet, spar  
penge og skån miljøet.

# (DK) Brugervejledning

79\_20221230\_DK

## Inco Sheet



MC 001-1307



MC 001-1308



MC 001-1801



MC 001-1811



MC 001-1820



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 09 30 45 01

The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



master-care.dk

Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
<input type="radio"/> MC 001-1307	89657	BASIC inco - S	5744001973158
<input type="radio"/> MC 001-1308	89658	BASIC inco - M	5744001970386
<input type="radio"/> MC 001-1801	50803	Inco Sheet - S	5744001970690
<input type="radio"/> MC 001-1811	50804	Inco Sheet - M	5744001970713
<input type="radio"/> MC 001-1820	128704	Inco Sheet Frotté - XS	5744001970720



# Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.  
Ved tvivl kontakt master care A/S.

## **MDR (EU) 2017/745:**

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

## **Erklærede formål for produktet:**

Produktet har en væsketæt membran, som forhindrer væskegennem-sivning til fx underlæggende madras hos fx inkontinensbrugere. Den åndbare og svedabsorberende vattering minimerer risikoen for varmeophobning og vævsskader.

## **Anvendelse af produktet:**

Placer produktet ovenpå madrassen i det område, hvor der er behov for inkontinensfunktion. Bruger placeres ovenpå. Bruger kan ligge direkte på produktet.

## **Risikovurdering:**

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

## **Kendskab til produktet/forflytning:**

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

## **Levetid:**

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig inkontinens funktion, bør kasseres. Hvis produktet har defekte syninger, flækket membran eller på anden vis har brudte overflader, bør produktet kasseres.

## **Garanti:**

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

## **Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:**

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.

# Brugervejledning - Inco Sheet

## Varianter:



### 1. Inco Sheet - S

Jerseyoverflade og lækker, fugt- og væskeabsorberende polstring oven på en højkvalitets inkontinensmembran.



### 2. Inco Sheet - M

Jerseyoverflade og lækker, fugt- og væskeabsorberende polstring oven på en højkvalitets inkontinensmembran.



### 3. Inco Sheet Frotté - XS

Frottéoverflade og lækker, fugt- og væskeabsorberende polstring oven på en højkvalitets inkontinensmembran.



### 4. BASIC Inco - S


Lækker polyester/bomuld overflade og polstring oven på en højkvalitets inkontinensmembran.




### 5. Basic Inco - M

Lækker polyester/bomuld overflade og polstring oven på en højkvalitets inkontinensmembran.

## Placering af Inco Sheet:

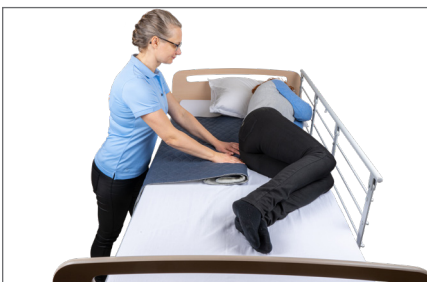

6. Bruger vendes sig til siden. Rul/ fold Inco Sheet, så ca. halvdelen er rullet sammen og placer det let under brugerens side i det område, hvor der er behov for inkontinensfunktion.

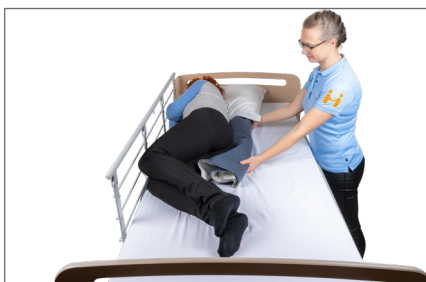

7. Bruger vendes sig til modsatte side og hjælper ruller Inco Sheet ud.



8. Bruger vendes til ryggleje og Inco Sheet er nu placeret under brugeren.

# Brugervejledning - Inco Sheet

## Tekniske specifikationer

### Materialer:

Polyester, bomuld, polyurethan

### ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

Varenummer - Navn	Størrelse:	Max. Brugervægt
MC 001-1307 Basic Inco - S	L 90 x B 140 cm	200 kg
MC 001-1308 Basic Inco - M	L 120 x B 140 cm	200 kg
MC 001-1801 Inco Sheet - S	L 90 x B 140 cm	200 kg
MC 001-1811 Inco Sheet - M	L 120 x B 140 cm	200 kg
MC 001-1820 Inco Sheet Frotté - XS	L 90 x B 69 cm	200 kg

## ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



### CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, Klasse 1.



### Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 200 kg



### Strygning:

Tåler ikke strygning



### Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C.  
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



### Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



### Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



### Blegning:

Tåler ikke blegning.



### Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



### Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, inkontinensmembran, sømme mm.  
Hvis produktet er i stykker, skal det kasseres.



### Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.  
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.



### Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.

Find os på:



For mere information, videoer  
Quick Guide mm.,  
se [www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)