

MADE IN EUROPE



Unsere Produkte und Rohstoffe werden in Europa hergestellt.

Entscheiden Sie sich für Qualität, sparen Sie Geld und schonen Sie die Umwelt.

(DE) Gebrauchsanleitung

05_20240602_DE

Quick On



MC 002-1952




MC 002-1958



MC 002-1957



MC 003-1952

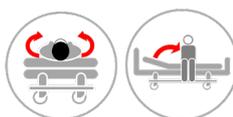

Artikel-Nr.	HMI nr.	Name – Größe	UDI-DI/GTIN
<input type="radio"/> MC 002-1952	80337	Quick ON Stretch - 80	5744001972168
<input type="radio"/> MC 002-1953	80351	Quick ON Box Stretch - 80	5744001972172
<input type="radio"/> MC 002-1954	81111	Quick ON Stretch - 120	5744001972182
<input type="radio"/> MC 002-1955	81108	Quick ON Box Stretch - 120	5744001972199
<input type="radio"/> MC 002-1956	81109	Quick ON Stretch - 150	5744001972205
<input type="radio"/> MC 002-1957	81110	Quick ON Box Stretch - 150	5744001972212
<input type="radio"/> MC 002-1958	100634	Quick ON Stretch Left - 160	5744001972229
<input type="radio"/> MC 002-1959	104990	Quick ON Stretch - 180	5744001972236
<input type="radio"/> MC 002-1960	104991	Quick ON Stretch - 200	5744001972243
<input type="radio"/> MC 002-1961	104989	Quick ON Stretch - 105	5744001972250
<input type="radio"/> MC 003-1952	104973	Quick On Stretch Inco - 80	5744001972434
<input type="radio"/> MC 003-1954	109195	Quick On Stretch Inco - 120	5744001972441

Verordnung MDR 2017/745 für Medizinprodukte der Klasse 1 **MD CE**

ISO 12 31 03 21

The Original Nordic
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed & Manufactured by:



master-care.dk

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von master care A/S entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, die nachstehende Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Produkt/die Produkte in Gebrauch nehmen.

Die Informationen in dieser Anleitung gelten für die gezeigten Produkte, sofern keine speziellen Anpassungen oder Änderungen vorgenommen wurden und die Produkte wie in der Gebrauchsanleitung empfohlen verwendet werden.

Wenn der Kunde Änderungen oder Reparaturen vornimmt oder das Produkt in anderen Kombinationen verwendet als von master care A/S empfohlen, verlieren die CE-Kennzeichnung und entsprechend auch die Garantie für das Produkt von master care A/S ihre Gültigkeit. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Die dieser Gebrauchsanleitung erwähnten Produkte entsprechen den Standards der Verordnung für Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745 der Klasse 1 und sind entsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Erklärter Verwendungszweck des Produkts:

Das Produkt verringert beim Drehen im Bett die Reibung auf der Unterlage. Geeignet für Personen mit Schmerzen und/oder eingeschränkter Mobilität in der Hüfte, im Becken und/oder im Rücken.

Anwendung des Produkts:

Das Produkt ist für die Verwendung auf Schaumstoff- und Boxspringmatratzen konzipiert. Reduziert die Reibung unter dem Oberkörper und dem Becken bei seitlichen Bewegungen und Drehungen während des Umlagens im Bett.

Kontraindikationen:

Wenn das Produkt die Reibung beim Transfer nicht ausreichend reduziert, sollte ein Wechsel des Medizinprodukts in Betracht gezogen werden. Es gibt keine weiteren Kontraindikationen für die Verwendung des Produkts.

Risikobewertung:

Vor der Benutzung sollte für die Person, die das Produkt aktuell nutzt, eine Risiko- und Mobilitätsbewertung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Transfer in einer ergonomisch und rechtlich korrekten Weise durchgeführt wird.

Produktkenntnis/Transfers:

Es ist wichtig, dass die pflegebedürftige Person/die Pflegekräfte eine Einweisung in den Gebrauch der Produkte erhalten und die Gebrauchsanleitung gründlich gelesen haben. master care A/S bietet Schulungen für den Gebrauch der Produkte an, und auf unserer Website finden Sie für die meisten Produkte eine Anleitung.

Lebensdauer:

Das Produkt hat bei normaler Abnutzung und Reinigung eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren. Die Lebensdauer des Produkts hängt von der Verwendung, der Belastung und der Art und Häufigkeit des Waschens ab.

Produkte, die keine ausreichende Reibungsverringerung mehr bieten, um sowohl für die Pflegekräfte als auch für die pflegebedürftige Person einen sicheren Transfer zu ermöglichen, sind zu entsorgen. Die Produkte sollten regelmäßig überprüft werden, und wenn fehlerhafte Nähte oder beschädigte Oberflächen festgestellt werden, sollte das Produkt entsorgt werden.

Garantie:

master care A/S gewährt bei sachgemäßer Anwendung des Produkts eine 2-jährige Garantie betreffend Material- und Herstellungsfehler.

Unfälle und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch:

Etwaige Unfälle und Schäden sollten stets der zuständigen nationalen Behörde sowie master care A/S oder dessen Vertriebshändler gemeldet werden.

master care A/S übernimmt keine Haftung für Personen- oder Produktschäden, wenn das Produkt nicht entsprechend dem vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck verwendet wird.



Gebrauchsanleitung - Quick On

Anbringung des Quick-ON-Covers:



1. Platzieren Sie das Laken mit der Beschriftung "Diese Seite nach oben ..." zum Kopfende hin.



2. Platzieren Sie Quick-ON auf der Matratze und ziehen Sie das Spannlaken um die Ecken der Matratze.



3. Platzieren Sie Quick-ON auf der Matratze und ziehen Sie das Spannlaken um die Ecken der Matratze.

Das Wenden im Bett:



4. Die nutzende Person winkelt das rechte oder beide Beine an und ergreift mit der rechten Hand die gegenüberliegende Bettseite oder umgekehrt, um sich auf die andere Seite zu drehen.



5. Die nutzende Person schiebt das Becken nach hinten und rutscht zur Seite, indem sie mit dem rechten Arm zieht und das rechte Bein nach unten fallen lässt.

Am Bettrand aufsitzen:



6. Die nutzende Person dreht sich auf die Seite und leicht nach vorne in Richtung Bettkante. Die nutzende Person hebt das Kopfteil des Bettes an.



7. Die nutzende Person stößt sich mit den Armen am Kopfteil ab und führt gleichzeitig die Beine über die Bettkante, sodass sie sich in einer Sitzposition befindet.

Gebrauchsanleitung - Quick On

Technische Daten

Artikelnummer – Name:	Größe:	Gleitunterlage:	Min/Max. Benutzerhöhe:	Max. Benutzergewicht:	Inhalt:	Gewicht des Produkts:
MC 002-1952 Quick ON Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 30 cm	L 110 x B 60 cm	N. A.	180 kg	97% Polyester, 3% Elasthan.	0,68 kg
MC 002-1953 Quick ON Box Stretch - 80	L 200 x B 80 x H 50 cm	L 110 x B 60 cm	N. A.	180 kg	96% Polyester, 4% Elasthan.	0,86 kg
MC 002-1954 Quick ON Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 30 cm	L 110 x B 100 cm	N. A.	180 kg	97% Polyester, 3% Elasthan.	0,82 kg
MC 002-1955 Quick ON Box Stretch - 120	L 200 x B 120 x H 50 cm	L 110 x B 100 cm	N. A.	180 kg	97% Polyester, 3% Elasthan.	1,02 kg
MC 002-1956 Quick ON Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 30 cm	L 110 x B 130 cm	N. A.	180 kg	97% Polyester, 3% Elasthan.	0,94 kg
MC 002-1957 Quick ON Box Stretch - 150	L 200 x B 150 x H 50 cm	L 110 x B 130 cm	N. A.	180 kg	97% Polyester, 3% Elasthan.	1,20 kg
MC 002-1958 Quick ON Stretch Left - 160	L 200 x B 160 x H 50 cm	L 110 x B 60 cm	N. A.	180 kg	96% Polyester, 4% Elasthan.	1,14 kg
MC 002-1959 Quick ON Stretch - 180	L 200 x B 180 x H 30 cm	L 110 x B 160 cm	N. A.	180 kg	98% Polyester, 2% Elasthan.	1,20 kg
MC 002-1960 Quick ON Stretch - 200	L 200 x B 200 x H 30 cm	L 110 x B 180 cm	N. A.	180 kg	98% Polyester, 2% Elasthan.	1,20 kg
MC 002-1961 Quick ON Stretch - 105	L 200 x B 105 x H 30 cm	L 110 x B 95 cm	N. A.	180 kg	97% Polyester, 3% Elasthan.	0,80 kg
MC 003-1952 Quick On Stretch Inco - 80	L 200 x B 80 x H 30 cm	L 110 x B 60 cm	N. A.	180 kg	5%Baumwolle, 85% Polyester, 8% Polyurethan, 2% Elasthan.	1,20 kg
MC 003-1954 Quick On Stretch Inco - 120	L 200 x B 120 x H 30 cm	L 110 x B 100 cm	N. A.	180 kg	5%Baumwolle, 84% Polyester, 9% Polyurethan, 2% Elasthan.	1,30 kg

WARNUNG



Die pflegebedürftigen Personen niemals auf dem Produkt auf der Bettkante allein zurücklassen.



Das Produkt niemals auf dem Boden liegen lassen.



Vergewissern Sie sich vor dem Transfer, dass alle erforderlichen Bremsen blockiert sind.



CE-Kennzeichnung:

Die Produkte sind gemäß der geltenden Verordnung zur CE-Kennzeichnung zugelassen und entsprechen der Verordnung MDR (EU) 2017/745 für Medizinprodukte, Klasse 1.



Wiederverwendung des Produkts nach der Reinigung:

Wenn das Produkt gemäß den Anweisungen gereinigt wurde, kann es für andere Zwecke verwendet werden.



Waschhinweise:

Dieses Produkt kann in der Waschmaschine bei maximal 85 °C gewaschen werden. Niedrigere Waschttemperaturen verlängern die Lebensdauer erheblich.



pH-Wert des Waschmittels:

Wählen Sie Waschmittel/Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9.



Weichspüler:

Verwenden Sie keinen Weichspüler, da dieser die Gleiteigenschaften deutlich verringert.



Trocknen im Wäschetrockner:

Dieses Produkt nur schonend bei maximal 40 °C im Wäschetrockner trocknen.



Oberflächliche Reinigung:

Dieses Produkt kann oberflächlich mit einem Tuch und Seife gereinigt werden.



Desinfektion:

Dieses Produkt darf mit alkoholischen Desinfektionsmittelmischungen mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 abgewischt werden.



Bügeln:

Darf nicht gebügelt werden.



Chemische Reinigung:

Darf nicht chemisch gereinigt werden.



Bleichen:

Darf nicht gebleicht werden.



Prüfung:

Das Produkt sollte regelmäßig und vorzugsweise vor jedem Gebrauch überprüft werden. Überprüfen Sie Stoff, Riemen, Nähte usw. auf Schäden.

Wenn das Produkt stark abgerieben oder anderweitig beschädigt ist, muss es entsorgt werden.



Gebrauchsanleitung:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



Entsorgung:

Das Produkt stets gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

Besuchen Sie für weitere Informationen, Videos, Kurzanleitung usw. www.master-care.dk

