

MADE IN
EUROPE



Unsere Produkte und
Rohstoffe werden in
Europa hergestellt.

Entscheiden Sie sich
für Qualität, sparen Sie
Geld und schonen Sie
die Umwelt.

(DE) Gebrauchsanleitung

10_20240108_DE

Master Turner Duo

The **Original** Master Turner System



Master Turner Duo



Master Turner Duo Inco



Artikel-Nr.	HMI Nr.	Name – Größe	UDI-DI/GTIN
MC 001-1700	49207	Master Turner Duo Bottom - L	5744001970539
MC 001-1701	49206	Master Turner Duo Top - L	5744001970546
MC 001-1705	61346	Master Turner Duo Top - XL	5744001970553
MC 001-1706	61347	Master Turner Duo Bottom - XL	5744001970560
MC 001-1710	106548	Master Turner Duo Air Bottom - L	5744001970577
MC 001-1711	106549	Master Turner Duo Air Top - L	5744001970584
MC 001-2000	42279	Master Turner Terry Cloth Duo Inco Bottom - L	5744001973325
MC 001-2001	42278	Master Turner Terry Cloth Duo Inco Top - L	5744001970980
MC 001-2500	49873	Master Turner Duo Inco Bottom - L	5744001971031
MC 001-2501	49872	Master Turner Duo Inco Top - L	5744001971048
MC 001-2502	53648	Master Turner Duo Inco Top - XL	5744001971055
MC 001-2503	53649	Master Turner Duo Inco Bottom - XL	5744001971062
MC 001-1949	Extra	Washing Straps - Duo Top (10 Stck)	5744001970911

Verordnung MDR 2017/745 für Medizinprodukte der Klasse 1



ISO 12 31 03 21

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von master care A/S entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, die nachstehende Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Produkt/die Produkte in Gebrauch nehmen.

Die Informationen in dieser Anleitung gelten für die gezeigten Produkte, sofern keine speziellen Anpassungen oder Änderungen vorgenommen wurden und die Produkte wie in der Gebrauchsanleitung empfohlen verwendet werden.

Wenn der Kunde Änderungen oder Reparaturen vornimmt oder das Produkt in anderen Kombinationen verwendet als von master care A/S empfohlen, verlieren die CE-Kennzeichnung und entsprechend auch die Garantie für das Produkt von master care A/S ihre Gültigkeit. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Die dieser Gebrauchsanleitung erwähnten Produkte entsprechen den Standards der Verordnung für Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745 der Klasse 1 und sind entsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Erklärter Verwendungszweck des Produkts:

Der Zweck besteht darin, die Reibung zwischen der pflegebedürftigen Person und der Matratze zu verringern, um es der Pflegekraft zu erleichtern, die pflegebedürftige Person schonend im Bett nach oben und unten oder an den Rand des Bettes zu bewegen.

Das Produkt immer zusammen mit einem Matratzen Cover von master care A/S verwenden.

Garantie:

master care A/S gewährt bei sachgemäßer Anwendung des Produkts eine 2-jährige Garantie betreffend Material- und Herstellungsfehler.

Anwendung des Produkts:

Der Master Turner von master care bildet in Kombination mit dem Matratzen Cover von master care ein Drehlakensystem, das bei pflegebedürftigen Person, bei denen die Umlagerung im Bett, die Lagerung im Bett und der Transfer zwischen verschiedenen Betten erschwert ist,

mit Einschränkungen verwendet werden kann.

Risikobewertung:

Vor der Benutzung sollte für die Person, die das Produkt aktuell nutzt, eine Risiko- und Mobilitätsbewertung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Transfer in einer ergonomisch und rechtlich korrekten Weise durchgeführt wird.

Produktkenntnis/Transfers:

Es ist wichtig, dass die pflegebedürftige Person/die Pflegekräfte eine Einweisung in den Gebrauch der Produkte erhalten und die Gebrauchsanleitung gründlich gelesen haben. master care A/S bietet Schulungen für den Gebrauch der Produkte an, und auf unserer Website finden Sie für die meisten Produkte eine Anleitung.

Lebensdauer:

Das Produkt hat bei normaler Abnutzung und Reinigung eine Lebensdauer von 1 bis 3 Jahren. Die Lebensdauer des Produkts hängt von der Verwendung, der Belastung und der Art und Häufigkeit des Waschens ab.

Produkte, die keine ausreichende Reibungsverringering mehr bieten, um sowohl für die Pflegekräfte als auch für die pflegebedürftige Person einen sicheren Transfer zu ermöglichen, sind zu entsorgen. Die Produkte sollten regelmäßig überprüft werden, und wenn fehlerhafte Nähte oder beschädigte Oberflächen festgestellt werden, sollte das Produkt entsorgt werden.

Unfälle und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch:

Etwaige Unfälle und Schäden sollten stets der zuständigen nationalen Behörde sowie master care A/S oder dessen Vertriebshändler gemeldet werden.

master care A/S übernimmt keine Haftung für Personen- oder Produktschäden, wenn das Produkt nicht entsprechend dem vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck verwendet wird.




Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung der verschiedenen Master Turner Duo-Modelle:	Seite 2
Das Anbringen des Master Turner Duo:	Seite 2
Platzierung der pflegebedürftigen Person auf dem Master Turner Duo:	Seite 2
Wenden im Bett mit dem Lifter (teilmobile pflegebedürftige Person, 1 Pflegekraft):	Seite 3
Trennung des Master Turner Duo - Top und Bottom beim Drehen mithilfe des Lifters:	Seite 4
Verschieben der pflegebedürftigen Person von der Seitenlage zurück in die Rückenlage mit dem Deckenlifter: ...	Seite 4
Verschieben einer pflegebedürftigen Person, die auf dem Master Turner Duo nach unten gerutscht ist, nach oben (1–2 Pflegekräfte):	Seite 4
Platzieren des Hebetuchs unter dem Master Turner Duo und Heben (passive pflegebedürftige Person, 2 Pflegekräfte): . .	Seite 5
Verhindern des Herunterrutschens im Bett mittels Kissen und Keilen (1 Pflegekraft):	Seite 6
Bewegen der pflegebedürftigen Person im Bett nach oben mit dem Master Turner Duo (1–2 Pflegekräfte):	Seite 6
Bewegen der pflegebedürftigen Person im Bett nach oben mit dem Lifter und dem Master Turner Duo:	Seite 7
WICHTIG: Waschhinweise: Stellen Sie sicher, dass das Klettband das Nylon nicht beschädigt:	Seite 7
Technische Daten.	Seite 8

Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo

Beschreibung der verschiedenen Master Turner Duo-Modelle:

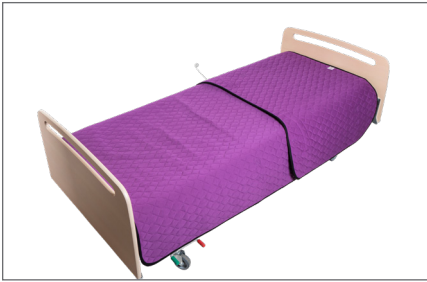

1. Master Turner Duo:

Teilbar – wird mit einem Klettband fixiert. Weiche, violette Jersey-Oberfläche. Verfügt über den klassischen schweißabsorbierenden Kern, der den Wärmestau reduziert.



2. Master Turner Duo Inco:


Mit integrierter Inkontinenzmembran. Teilbar – wird mit einem Klettband fixiert. Weiche, graue Jersey-Oberfläche. Verfügt über den klassischen schweißabsorbierenden Kern, der u. a. Wärmestau reduziert.



3. Das Besondere an den Duo-Modellen:

Die pflegebedürftige Person kann mit dem Lifter in der Seitenlage gehalten werden, während z. B. die Intimhygiene durchgeführt wird.

Das Anbringen des Master Turner Duo:

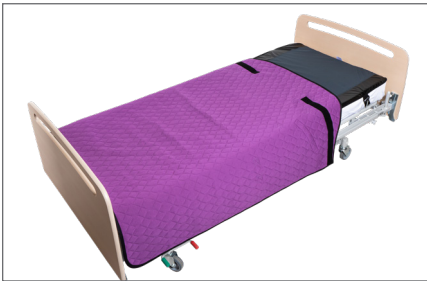

4. Bringen Sie den Matratzencover an. Platzieren Sie den Master Turner Duo - Bottom auf dem unteren Teil des Covers. Achten Sie darauf, dass das Klettband nach oben und zum Kopfende des Bettes zeigt.



5. Platzieren Sie den Master Turner Duo mit der Oberseite am Kopfende mit der glatten Seite nach unten und mit der weichen Seite nach oben. Entfernen Sie das schützende Klettband, das für die Wäsche angebracht wurde.



6. Bringen Sie das angenähte Klettband des oberen Teils am Klettband des Bottom-Teils an. Ihr Master Turner Duo ist jetzt einsatzbereit.

Platzierung der pflegebedürftigen Person auf dem Master Turner Duo:



7. Die Oberfläche des Master Turner Duo besteht aus einem besonders weichen Material, sodass die pflegebedürftige Person direkt auf ihm liegen kann. Bei Bedarf kann ein Laken, ein Inkontinenzlaken oder ein Stecklaken über dem Master Turner Duo platziert werden.



8. Die pflegebedürftige Person wird auf diese Weise auf den Master Turner Duo gehoben, sodass der untere Teil ihres Rückens dort liegt, wo der Master Turner Duo – Top endet. Dies bedeutet, dass das Becken der pflegebedürftigen Person auf dem Master Turner Duo – Bottom platziert wird.

Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo

Wenden im Bett mit dem Lifter (teilmobile pflegebedürftige Person, 1 Pflegekraft):



9. Platzieren Sie die pflegebedürftige Person korrekt auf dem Master Turner Duo – siehe Abbildung 8. Bringen Sie die Hüft- und die Schulterriemen auf der Oberseite des Master Turner Duo am Deckenlifter an und heben Sie den Deckenlifter an, wobei das Gewicht leicht auf die Riemen verlagert wird.



10. Befestigen Sie den Hüftriemen mit dem Klettband auf dem Master Turner - Bottom Duo am Lifterbügel. Heben Sie das Bettgitter an und begeben Sie sich auf die andere Seite des Bettes.



11. Legen Sie das Kopfkissen weg. Für zusätzlichen Halt und um das Gefühl, in der Seitenlage nach vorne zu fallen, zu minimieren, kann vor Beginn der Drehung ein Lagerungskeil – S MC 001-8035 neben den Bauch der pflegebedürftigen Person gelegt werden.



12. Vor Beginn der Drehung wird ein Lagerungskissen – S MC 001-8020 neben dem Bein der pflegebedürftigen Person platziert, um diese in der Seitenlage zu unterstützen. Platzieren Sie bei Bedarf ein gefaltetes Gleittuch darüber.



13. Beginnen Sie mit dem Anheben des Lifters. Bleiben Sie mit der pflegebedürftigen Person in Kontakt – bei Anzeichen von Unbehagen oder Aufregung sollten Sie eine kurze Pause beim Anheben einlegen, damit sich die pflegebedürftige Person beruhigen kann.



14. Wenn eine Schulter und der obere Teil der Hüfte nicht mehr auf der Unterlage aufliegen, kann die pflegebedürftige Person auf dem Bett nach hinten bewegt werden. Auf diese Weise übernimmt der Deckenlifter einen Teil des Gewichts der pflegebedürftigen Person und erleichtert der Pflegekraft die Arbeit.



15. Sobald die pflegebedürftige Person vollständig in die Seitenlage gedreht ist, kann der Oberschenkel bei Bedarf mithilfe eines Gleittuchs gleitend über das Lagerungskissen geschoben werden. Sobald das Bein an seinem Platz ist, sollte das Gleitmaterial durch Ziehen am unteren Teil entfernt werden.

Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo

Trennung des Master Turner Duo - Top und Bottom beim Drehen mithilfe des Lifters:



16. Wenn die pflegebedürftige Person in der Seitenlage liegt, wird der Hüftriemen des Master Turner Duo - Bottom vom Lifter entfernt (Klettband). Der Deckenlifter braucht hierfür nicht abgesenkt zu werden. Der Bottom-Teil kann bei der Klettbandverbindung vom Top-Teil getrennt werden.



17. Der obere Teil bleibt am Deckenlifter. Auf diese Weise übernimmt der Lifter die schwere, statische Arbeit, die pflegebedürftige Person während der Intimhygiene in der Seitenlage zu halten.



18. Wenn diese Hygienearbeit beendet ist, wird das Klettband auf dem Master Turner Duo - Bottom auf dem Master Turner Duo - Top angebracht und der Hüftriemen wird wieder mithilfe des Klettbands am Lifterbügel montiert.

Verschieben der pflegebedürftigen Person von der Seitenlage zurück in die Rückenlage mit dem Deckenlifter:



19. Bringen Sie den Master Turner Duo am Lifter an und klappen Sie das Bettgitter hinter der pflegebedürftigen Person hoch. Lassen Sie das obere Bein nach hinten gleiten – bei Bedarf mit einer doppelt gelegten Gleitunterlage zwischen den Beinen. Bewegen Sie den oberen Arm nach hinten und stützen Sie die pflegebedürftige Person mit der Hand auf dem oberen Hüftkamm.



20. Beim Absenken des Lifters wird die pflegebedürftige Person sanft nach hinten in Richtung des Master Turner geschoben. Dadurch werden dem Rücken der pflegebedürftigen Person klare und sichere Signale gegeben. Lassen Sie die pflegebedürftige Person während des Transfers auf der Matratze leicht nach vorne gleiten, damit der Bettrahmen nicht berührt wird.

Verschieben einer pflegebedürftigen Person, die auf dem Master Turner Duo nach unten gerutscht ist, nach oben (1–2 Pflegekräfte):



21. Platzieren Sie ein doppellagiges Gleittuch unter der pflegebedürftigen Person und auf dem Master Turner Duo. Entfernen Sie nach Möglichkeit die Gleitklappe unter der pflegebedürftigen Person. Ziehen Sie die pflegebedürftige Person auf dem Master Turner Duo nach oben – verwenden Sie bei Bedarf ein Zugschlauch oder einen Mini Master.



22. Alternativ: Wenn die pflegebedürftige Person nach unten verrutscht ist, müssen Sie sie möglicherweise aus dem Bett heben, um den Master Turner Duo wieder in die richtige Position im Bett zu bringen.



23. Wenn die pflegebedürftige Person auf dem Master Turner Duo nach unten gerutscht ist, kann dieses Problem der Sitzposition im Bett geschuldet sein. Um das Risiko einer Scherung zu minimieren, wird die Verwendung von Kissen und Keilen anstelle der Verwendung von Befestigungsriemen oder das Entfernen der Gleitklappen empfohlen.

Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo


Verschieben der pflegebedürftigen Person, der auf Master Turner Duo nach unten gerutscht ist, nach oben (1–2 Pflegekräfte): – Fortsetzung



24. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die pflegebedürftige Person in die Seitenlage zu drehen und den Master Turner Duo hinter der pflegebedürftigen Person schräg nach unten zum Fußende zu ziehen.



25. Drehen Sie die pflegebedürftige Person auf die andere Seite und wiederholen Sie das Ziehen des Master Turner Duo zum Fußende des Bettes hin.

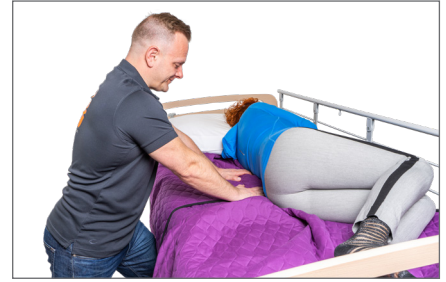

26. Wenn die pflegebedürftige Person zu weit auf einer Seite liegt, kann die Drehung auf beide Seiten erfolgen, indem der Master Turner ein wenig weiter unter die pflegebedürftige Person geschoben und auf der gegenüberliegenden Seite wieder ausgebreitet wird.

Platzieren des Hebetuchs *unter* dem Master Turner Duo und Heben (passive pflegebedürftige Person, 2 Pflegekräfte):



27. Bringen Sie den Master Turner Duo am Deckenlifter an und drehen Sie die pflegebedürftige Person in eine leichte Seitenlage. Falten Sie das Lifterhebetuch der Länge nach und legen Sie es zwischen den Master Turner und den Matratzencover.



28. Befestigen Sie den Deckenlifter am Master Turner auf der gegenüberliegenden Seite und ziehen Sie das Hebetuch unter der pflegebedürftigen Person in Position. – Nutzen Sie hierbei die Gleitwirkung zwischen dem Matratzencover und dem Master Turner.



29. Bei pflegebedürftigen Personen mit Übelkeits- oder Berührungsproblemen: Legen Sie ein Lagerungskissen zwischen die Füßen und dem Bettende. Pflegekraft schiebt das Hebetuch zwischen dem Master Turner und dem Matratzencover nach unten, bis es optimal liegt. Stützen Sie bei Bedarf die Unterschenkel der pflegebedürftigen Person.



30. Öffnen Sie das Klettband zwischen dem Master Turner Duo - Bottom und - Top. Falten Sie bei Bedarf die oberen Ecken des Master Turner Duo - Bottom nach unten. Schieben Sie die Beinriemen des Hebetuchs nach oben auf die Oberseite des Master Turner Duo – Bottom.



31. Die Beinriemen des Hebetuchs werden unter den Beinen der pflegebedürftigen Person platziert. Wir empfehlen hierfür die Verwendung von 2 Sling Socks Basic – M MC 003-9031, um die Positionierung zu erleichtern und das Risiko von Scherverletzungen beim Heben zu verringern.



32. Stellen Sie das Bett in eine Sitzposition und heben Sie die pflegebedürftige Person mit dem Master Turner Duo – Top hinter dem Rücken auf das Bett.

Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo

Platzieren des Hebetuchs *unter* dem Master Turner Duo und Heben mit dem Lifter: – Fortsetzung



33. Heben Sie die pflegebedürftige Person mit dem Master Turner Duo – Top hinter dem Rücken z. B. in einen Rollstuhl. Bei Verwendung von Sling Socks besteht keine Schergefahr durch das Hebetuch unter den Beinen, da die Beinriemen in die gepolsterten Sling Socks gleiten.



34. Lassen Sie die Beinriemen unter der pflegebedürftigen Person weggleiten. Falten Sie die Sling Socks unter den Beinen auseinander. Rollen Sie das Hebetuch/lassen Sie es zu sich gleiten, sodass es leicht nach oben gleitet und entfernt werden kann. Auf diese Weise muss sich die pflegebedürftige Person beim Entfernen des Hebetuchs nicht nach vorne lehnen oder die Beine anheben.



35. Ergreifen Sie die unteren Ecken des Master Turner Duo – Top, falten Sie diese nach hinten in Richtung der Rückenlehne des Rollstuhls und zu sich selbst hin, sodass das glatte Gleitmaterial auf der Rückseite gegeneinander gleitet. Rollen Sie also den Master Turner Duo – Top/lassen Sie ihn von der pflegebedürftigen Person weg gleiten.

Verhindern des Herunterrutschens im Bett mittels Kissen und Keilen (1 Pflegekraft):



36. Positionieren Sie das Becken der pflegebedürftigen Person mithilfe der Gleitwirkung des Master Turner entsprechend der Sitzposition im Bett. Prüfen Sie gegebenenfalls die Position, indem Sie das Bett unter dem Knie der pflegebedürftigen Person vollständig in die Knie-Knickposition bringen.



37. Legen Sie zwei Lagerungskeile – S MC 001-8040 unter die Oberschenkel der pflegebedürftigen Person und *unter* den Master Turner, und zwar mit der rutschfesten Seite nach unten. Platzieren Sie ein Lagerungskissen zwischen den Füßen und dem Bettende. Zwischen dem Kissen und dem Fußende sollte ein wenig Abstand sein.



38. Heben Sie das Kopfteil an. Wenn der Oberkörper der pflegebedürftigen Person zur Seite rutscht, kann zudem ein Lagerungskeil – M MC 001-8050 auf beiden Seiten des Oberkörpers platziert werden, um für Stabilität, Sicherheitsgefühl und Körperbegrenzung zu sorgen.

Bewegen der pflegebedürftigen Person im Bett nach oben mit dem Master Turner Duo (1–2 Pflegekräfte):




39. Heben Sie das Fußende an und senken Sie das Kopfteil ab. Wenn die pflegebedürftige Person die Beine benutzen kann, entfernen Sie den Master Turner unter den Beinen und platzieren Sie die Füße auf der Antirutschfläche (entfernen Sie ggf. die Gleitklappe). Pflegekraft/Pflegekräfte ergreift/ergreifen den Griff des Master Turner. Ziehen Sie die pflegebedürftige Person langsam und ruhig nach oben. Nutzen Sie den Vorteil der Gewichtsverlagerung.



40. Alternativ: Heben Sie das Fußende an und senken Sie das Kopfteil ab. Bei Bedarf kann die Trendelenburg-Funktion verwendet werden. Pflegekraft positioniert sich am Fußende des Bettes und fasst die Knöchel der pflegebedürftigen Person.

Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo

Bewegen der pflegebedürftigen Person im Bett nach oben mit dem Lifter und dem Master Turner Duo:

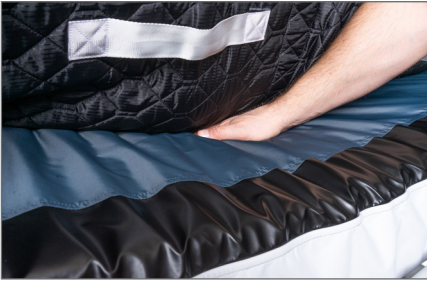

41. Der Deckenlifter kann verwendet werden, um der pflegebedürftigen Person zu helfen, sich im Bett nach oben zu bewegen. Befestigen Sie den Deckenlifter um das Becken der pflegebedürftigen Person. Heben Sie ihn an, sodass das Becken **beinahe** den Kontakt mit der Matratze verliert. Platzieren Sie bei Bedarf eine Hand auf/unter dem Becken, um sicherzustellen, dass nicht zu weit angehoben wird.



42. Die Pflegekraft zieht den Master Turner entweder von beiden Seiten oder von oben, indem sie das Kopfgitter in Richtung Kopfteil entfernt.



43. Alternativ dazu kann die Pflegekraft die pflegebedürftige Person von unter den Knöcheln schieben, um ihr zu helfen, sich höher im Bett zu positionieren.

WICHTIG: Waschinweise: Stellen Sie sicher, dass das Klettband das Nylon nicht beschädigt:



44. Befestigen Sie vor dem Waschen einen Waschriemen (den weichen Teil des Klettbands) am harten Teil des Klettbands des Master Turner Duo – Top. Dadurch wird sichergestellt, dass der harte Teil das Gleitmaterial des Produkts beim Waschen nicht beschädigt.

Gebrauchsanleitung – Master Turner Duo

Technische Daten

Materialien:

Master Turner Duo: Baumwolle, Polyester, Polyamid, Nylon.

Master Turner Duo Inco: Baumwolle, Polyester, Polyamid, Polyurethan, Nylon.

**Max. Gewicht der
pflegebedürftigen
Person:**

ISO-Klassifizierung:

ISO 12952-1:2015

Textilien – Prüfung der

Entflammbarkeit der Betausstattung – Teil 1:

Glühende Zigarette.

WARNUNG



Die pflegebedürftigen Personen niemals auf dem Produkt auf der Bettkante allein zurücklassen.



Das Produkt niemals auf dem Boden liegen lassen.



Achten Sie immer darauf, dass sich die pflegebedürftigen Personen nicht in den Riemen verfangen.



Lassen Sie die pflegebedürftige Person niemals allein auf dem Produkt liegen, während dieses mit einem Lifter verbunden ist.



Darf nicht als Hebetuch am Lifter verwendet werden – kann aber gut für z. B. das Drehen im Bett mit einem Lifter kombiniert werden.



Vergewissern Sie sich vor dem Transfer, dass alle erforderlichen Bremsen blockiert sind.



CE-Kennzeichnung:

Die Produkte sind gemäß der geltenden Verordnung zur CE-Kennzeichnung zugelassen und entsprechen der Verordnung MDR (EU) 2017/745 für Medizinprodukte, Klasse 1.

Besuchen Sie für weitere Informationen, Videos, Kurzanleitung usw.
www.master-care.dk

Artikelnummer – Name:

Größe:

Anzahl Griffe:

Person:

MC 001-1700 Master Turner Duo Bottom - L	L 160 x B 150 cm	6	200 kg
MC 001-1701 Master Turner Duo Top - L	L 100 x B 150 cm	6	200 kg
MC 001-1705 Master Turner Duo Top - XL	L 100 x B 200 cm	8	400 kg
MC 001-1706 Master Turner Duo Bottom - L	L 145 x B 150 cm	6	400 kg
MC 001-1710 Master Turner Duo Air Bottom - L	L 160 x B 150 cm	6	200 kg
MC 001-1711 Master Turner Duo Air Top - L	L 100 x B 150 cm	6	200 kg
MC 001-2000 Master Turner Terry Cloth Duo Inco Bottom - L	L 160 x B 145 cm	6	200 kg
MC 001-2001 Master Turner Terry Cloth Duo Inco Top - L	L 100 x B 145 cm	6	200 kg
MC 001-2500 Master Turner Duo Inco Bottom - L	L 160 x B 145 cm	6	200 kg
MC 001-2501 Master Turner Duo Inco Top - L	L 100 x B 145 cm	6	200 kg
MC 001-2502 Master Turner Duo Inco Top - XL	L 100 x B 200 cm	8	400 kg
MC 001-2503 Master Turner Duo Inco Bottom - XL	L 145 x B 200 cm	6	400 kg
MC 001-1949 Washing Straps - Duo Top (10 Stck)	L 35 x B 4 cm	-	-



Gewicht der pflegebedürftigen Person:

Empfohlenes maximales Gewicht der pflegebedürftigen Person: L 200 und XL 400 kg



Bügeln:

Darf nicht gebügelt werden.



Waschhinweise:

Dieses Produkt kann in der Waschmaschine bei max. 60 °C gewaschen werden. Niedrigere Waschttemperaturen verlängern die Lebensdauer erheblich. DUO Top und DUO Top Inco müssen vor dem Waschen immer mit den Waschriemen versehen werden.



Chemische Reinigung:

Darf nicht chemisch gereinigt werden.



pH-Wert des Waschmittels:

Wählen Sie Waschmittel/Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9.



Bleichen:

Darf nicht gebleicht werden.



Weichspüler:

Verwenden Sie keinen Weichspüler, da dieser die Gleiteigenschaften deutlich verringert.



Prüfung:

Das Produkt sollte regelmäßig und vorzugsweise vor jedem Gebrauch geprüft werden. Überprüfen Sie Stoff, Riemen, Nähte usw. auf Schäden. Wenn das Produkt stark abgerieben oder anderweitig beschädigt ist, muss es entsorgt werden.



Trocknen im Wäschetrockner:

Dieses Produkt nur schonend bei maximal 40 °C im Wäschetrockner trocknen.



Gebrauchsanleitung:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



Oberflächliche Reinigung:

Dieses Produkt kann oberflächlich mit einem Tuch und Seife gereinigt werden.



Entsorgung:

Das Produkt stets gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.



Desinfektion:

Dieses Produkt darf mit alkoholischen Desinfektionsmittelmischungen mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 abgewischt werden.



Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Druckfehler oder Fehler.