

MADE IN EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret i
Europa

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

16_20230317_DK

Silk Master



MC 001-1840



MC 001-1945



MC 003-1946



MC 002-1939



MC 002-1940



MC 002-1946



- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Varenr.

MC 001-1840
MC 001-1940
MC 001-1945
MC 001-1946
MC 002-1939
MC 002-1940
MC 002-1945
MC 002-1946
MC 003-1945
MC 003-1946

HMI nr.

42493
33244
33245
38934
81089
80335
81090
81091
114961
114962

Navn - Størrelse

Silk Master Inco - M
Silk Master - M
Silk Master - L
Silk Master - XL
Silk Master Pro - S
Silk Master Pro - M
Silk Master Pro - L
Silk Master Pro - XL
Silk Master Satin - L
Silk Master Satin - XL

UDI-DI/GTIN

5744001970737
5744001970867
5744001970874
5744001970881
5744001972120
5744001972137
5744001972144
5744001972151
5744001972410
5744001972427

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 21

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care a/s anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care a/s.
Ved tvivl kontakt master care a/s.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet nedsætter friktionen mod underlaget ved vendinger i seng. Velegnet til brugere med smerter og bevægelsesnedsættelse i hofte, bække og /eller ryg.

Anvendelse af produktet:

Sikkelagen kan benyttes hos brugere med funktionsnedsættelse, hvor vendinger og lejring i seng og forflytning mellem lejer er vanskeligt. Silkeoverfladen nedsætter friktionen mod underlaget ved vendinger.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care a/s yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes.

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Produkter bør jævnligt efterses og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes bør produktet kasseres.

Garanti:

master care a/s yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:


Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care a/s eller dennes distributør.

master care a/s påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Silk Master

Montering af Silk Master:

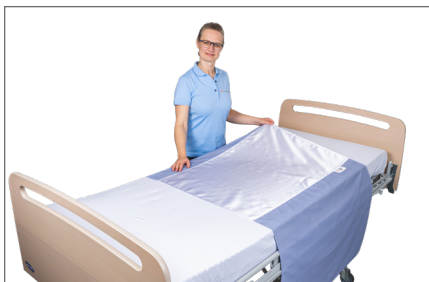

1. Placér Silk Master så silkedelen ligger midt på madrassen og begge sider hænger ud over sengens kant.



2. Fold efterfølgende begge sider ned under madrassen, således der ingen folder er på silkedelen.

Vending i seng:



3. Bruger bøjer sit ben og tager fat i modsatte sengehest.



4. Bruger skubber bagdelen bagud og glider om på siden ved at trække med armen og lade benet falde mod underlaget.

Op at sidde på sengekant:



5. Bruger aktiverer sengens knæ-knæk.



6. Bruger eleverer sengens hovedgærde.



7. Bruger kan nu rotere på siddefladen samt glide ben ud over sengekant ved hjælp af den glatte silkedel.

Brugervejledning - Silk Master

Tekniske specifikationer

Materialer:

Bomuld, Polyester

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

Varenummer - Navn	Størrelse:	Glidedel:	Max. Brugervægt
MC 001-1840 Silk Master Inco - M	L 100 x B 200 cm	L 100 x B 60 cm	160 kg
MC 001-1940 Silk Master - M	L 100 x B 80 cm	L 100 x B 60 cm	160 kg
MC 001-1945 Silk Master - L	L 150 x B 80 cm	L 150 x B 60 cm	160 kg
MC 001-1946 Silk Master - XL	L 200 x B 200 cm	L 200 x B 60 cm	160 kg
MC 002-1939 Silk Master Pro - S	L 70 x B 200 cm	L 70 x B 60 cm	160 kg
MC 002-1940 Silk Master Pro - M	L 100 x B 200 cm	L 100 x B 60 cm	160 kg
MC 002-1945 Silk Master Pro - L	L 150 x B 200 cm	L 150 x B 60 cm	160 kg
MC 002-1946 Silk Master Pro - XL	L 200 x B 200 cm	L 200 x B 60 cm	160 kg
MC 003-1945 Silk Master Satin - L	L 200 x B 88 cm	L 145 x B 68 cm	150 kg
MC 003-1946 Silk Master Satin - XL	L 200 x B 88 cm	L 200 x B 68 cm	150 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 150 kg og 160 kg. Se tabel for nærmere info.



Vask:

Silk Master kan vaskes i vaskemaskine ved max. 60 °C.



Silk Master Pro og Satin ved max. 85 °C. Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C. Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

