

HERGESTELLT  
IN EUROPA



Unsere Produkte und Rohstoffe werden in Europa hergestellt.

Entscheiden Sie sich für Qualität, sparen Sie Geld und schonen Sie die Umwelt.

(DE) Gebrauchsanleitung

27\_20231101\_DE

# Master Shield



Artikel-Nr.	HMI Nr.	Name – Größe	UDI-DI/GTIN
MC 001-5005	30752	Master Shield - S	5744001971260
MC 001-5010	30753	Master Shield - M	5744001971277
MC 001-5015	30754	Master Shield - L	5744001971284

Verordnung MDR 2017/745 für Medizinprodukte der Klasse 1



ISO 12 31 03 24

The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



# Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von master care A/S entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, die nachstehende Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Produkt/die Produkte in Gebrauch nehmen.

Die Informationen in dieser Anleitung gelten für die gezeigten Produkte, sofern keine speziellen Anpassungen oder Änderungen vorgenommen wurden und die Produkte wie in der Gebrauchsanleitung empfohlen verwendet werden.

Wenn der Kunde Änderungen oder Reparaturen vornimmt oder das Produkt in anderen Kombinationen verwendet als von master care A/S empfohlen, verlieren die CE-Kennzeichnung und entsprechend auch die Garantie für das Produkt von master care A/S ihre Gültigkeit. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an master care A/S.

## **MDR (EU) 2017/745:**

Die dieser Gebrauchsanleitung erwähnten Produkte entsprechen den Standards der Verordnung für Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745 der Klasse 1 und sind entsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen.

## **Erklärter Verwendungszweck des Produkts:**

Das Produkt verhindert die Reibung der Rollstuhlreifen während des Umsetzens und dient zur Schutzabdeckung des Reifens, damit die nutzende Person während des Umsetzens nicht am Gummi hängen bleibt oder die Hose verschmutzt.

Muss bei jedem Umsetzen angebracht und wieder entfernt werden.

## **Anwendung des Produkts:**

Das Produkt wird vor dem Umsetzen auf dem Reifen platziert und danach wieder entfernt.

## **Warnung:**

Vergewissern Sie sich vor der Anwendung stets, dass die Breite des Produkts mit der Breite des Reifens übereinstimmt.

## **Risikobewertung:**

Vor der Benutzung sollte für die Person, die das Produkt aktuell nutzt, eine Risiko- und Mobilitätsbewertung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Transfer in einer ergonomisch und rechtlich korrekten Weise durchgeführt wird.

## **Produktkenntnis/Transfers:**

Es ist wichtig, dass die pflegebedürftige Person/die Pflegekräfte eine Einweisung in den Gebrauch der Produkte erhalten und die Gebrauchsanleitung gründlich gelesen haben. master care A/S bietet Schulungen für den Gebrauch der Produkte an, und auf unserer Website finden Sie für die meisten Produkte eine Anleitung.

## **Lebensdauer:**

Das Produkt hat bei normalem Verschleiß eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren. Die Lebensdauer des Produkts hängt von der Verwendung und der Belastung ab.

Die Produkte sind regelmäßig zu überprüfen, und wenn die Oberfläche defekt oder beschädigt ist, ist das Produkt zu entsorgen.

## **Garantie:**

master care A/S gewährt bei sachgemäßer Anwendung des Produkts eine 2-jährige Garantie betreffend Material- und Herstellungsfehler.

## **Unfälle und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch:**

Etwaige Unfälle und Schäden sollten stets der zuständigen nationalen Behörde sowie master care A/S oder dessen Vertriebshändler gemeldet werden.

master care A/S übernimmt keine Haftung für Personen- oder Produktschäden, wenn das Produkt nicht entsprechend dem vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck verwendet wird.



# Gebrauchsanleitung - Master Shield

## Auswahl der Größe:



1. Die Größe des Master Shields wird entsprechend der Breite des Reifens ausgewählt.



2. Master Shield lässt sich einfach auf dem Reifen anbringen. Der Schutz darf auf dem Reifen nicht verrutschen und darf nicht auf den Reifen heruntergedrückt werden. Wählen Sie in diesem Fall eine kleinere/größere Ausführung.

## Anbringung und Verwendung:



3. Platzieren Sie den Rollstuhl neben der Bettkante.



4. Bringen Sie den Master Shield an der Stelle des Rollstuhlreifens an, an der das Gesäß den Reifen berühren wird.



5. Die nutzende Person kann nun ungehindert über die Gummioberfläche des Reifens gleiten.



6. Entfernen Sie den Master Shield nach dem Gebrauch, da er sonst in der Bremse stecken bleiben oder kaputtgehen kann.

# Gebrauchsanleitung - Master Shield

## Technische Daten

### Materialien:

ABS

Artikelnummer – Name:	Größe Reifenbreite:	Max. Gewicht der pflegebedürftigen Person:
MC 001-5005 Master Shield- S	max. 25 mm	135 kg
MC 001-5010 Master Shield - M	max. 31 mm	135 kg
MC 001-5015 Master Shield - L	max. 33 mm	135 kg

## WARNUNG



Vergewissern Sie sich vor dem Transfer, dass alle erforderlichen Bremsen blockiert sind.



### CE-certification:

This product is CE-approved and follows the harmonized standards. This means that the products are in compliance with the essential health and safety directives. The product(-s) comply with the standards in the Medical Device Regulation (EU) 2017/745 – class 1.



### Gewicht der pflegebedürftigen Person:

Empfohlenes maximales Gewicht der pflegebedürftigen Person 180 kg.



### Oberflächliche Reinigung:

Dieses Produkt kann oberflächlich mit einem Tuch und Seife gereinigt werden.



### pH-Wert des Waschmittels:

Wählen Sie Waschmittel/Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9.



### Desinfektion:

Dieses Produkt darf mit alkoholischen Desinfektionsmittelmischungen mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9 abgewischt werden.



### Prüfung:

Die Produkte müssen regelmäßig überprüft werden. Ist die Oberfläche defekt oder beschädigt, ist das Produkt zu entsorgen.



### Gebrauchsanleitung:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



### Entsorgung:

Das Produkt stets gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

Besuchen Sie für weitere Informationen, Videos, Kurzanleitung usw.  
[www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)

