

MADE IN
EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.

(FI) Käyttöohje
Master Glide Sif



01_20241001_FI



MC 001-7060



Tuotenro	HMI	Nimi - Koko	UDI-DI/GTIN
MC 001-7060	128744	Master Glide Sif (2 pcs)	5744001974148

Lääkintälaitedirektiivi 2017/745 luokka 1



ISO 12 31 03 17

The Original Nordic
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Kiitos kun valitsit Master Care A/S tuotteen.

Suosittellemme lukemaan käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöönottoa. Käyttöohjeen sisältö koskee alkuperäisessä kunnossa olevia tuotteita joita ei ole muokattu tai muutettu ja että tuotetta on käytetty käyttöohjeessa suositellulla tavalla. Mikäli tuotetta muokataan tai korjataan tai käytetään yhdistelmänä jonkun muun tuotteen kanssa jota valmistaja master care A/S ei suosittele, niin silloin CE-merkintä ei ole voimassa eikä takuu kata virheellisen käytön seurauksia.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä master care A/S tuotteen maahantuojaan.

MDR (EU) 2017/745:

Tuote jota käyttöohje koskee on CE merkinnällä hyväksytty ja noudattaa harmonisoituja standardardeja. Tämä tarkoittaa että tuote täyttää sille asetetut terveys- ja turvallisuusdirektiivit. Tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen standardit MDR (EU) 2017/745-luokka 1.

Tuotteen käyttötarkoitus:

- 1) Tuote asetetaan pareittain käyttäjän reisien alle vähentämään kitkaa, kun käyttäjä liikkuu/liu'uttaa itseään istuimella taaksepäin.
- 2) Aseta pari käyttäjän reisien alle. Liu'uta nostoliinan reisihihna levyjen välistä, näin ennetta ehkäiset ihon hankausvammat.

Tuotteen oikea käyttö:

Tuote on tarkoitettu käyttäjille joilla on vaikeuksia korjata asentoaan tuolissa taaksepäin tai nostoliinan pukeminen aiheuttaa riskin saada ihoon hankausvammoja. Mikäli käyttäjä ei pysty liikkumaan taaksepäin tuolissa, aseta 1-2 levyä reiden alle. Jos mahdollista, käyttäjä nojautuu poispäin puolelta jonne ovaalit ovaali on asetettu. Käyttäjät joilla on vain toinen puoli vartalosta aktiivinen, Sif ovaali asetettuna vastakkaiselle puolelle voi olla riittävä. Muussa tapauksessa aseta ovaali molempien reisien alle.

Kontraindikaatio/Varoitus:

Jos käyttäjällä ei ole istumatasapainoa (keskivartalon hallinta), on käytettävä toista siirtomenetelmää. Älä koskaan siirrä pitkiä matkoja, jotka ovat pidempiä kuin tuotteessa ilmoitetut sallitut enimmäis-

etäisyydet.

Varmista, että käyttäjällä on riittävä tuki takamuksen ja jalkojen alla, jotta käyttäjä ei liukuisi pois tuotteelta.

Riskin arviointi:

Arvioi avustettavan voimavarat ja suunnittele potilassiirto huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Näin minimoit riskit ja toimit potilas- ja työturvallisesti.

Tuotteen/siirron tuntemus:

On tärkeää, että tuotetta käyttävä henkilö tuntee tuotteen ja tietää miten sitä käytetään ja on lukenut käyttöohjeen. master care A/S tarjoaa tuotekoulutusta ja nettisivuiltamme löytyy kaikki tuotteiden käyttöohjeet.

Käyttöikä:

Tuotteen odotettu käyttöikä päivittäisessä käytössä on noin 2-5 vuotta. Käyttöikä riippuu kuinka tuotetta käytetään ja millaisella painolla. Tarkista tuote silmämääräisesti säännöllisin väliajoin ja mieluiten ennen käyttöä. Tuote jossa liukuominaisuus on riittämätön, tuote on rikkoutunut tai muutoin vaurioitunut on poistettava käytöstä. Tällä tavoin huolehdi terveydestä työympäristöstä niin avustajalle kuin avustettavallekin.

Takuu:

master care A/S antaa tuotteilleen 2 vuoden takuun joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvat viat edellyttäen, että tuotetta on käytetty oikein.

Tuotteen väärin käytöstä johtuvat seuraukset ja vammat:

Tuotteen väärin käytöstä johtuneet seuraukset tulisi ilmoittaa aina toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle Suomessa FIMEA ja valmistajalle master care A/S sekä maahantuojalle.

Valmistaja master care A/S ja maahantuoja ei ole vastuussa henkilö- vahingoista tai tuotteen vaurioitumisesta mikäli tuotetta on käytetty väärin tai sitä ei ole käytetty valmistajan suositusten mukaisesti.



Käyttöohje - Master Glide Sif

Siirtyminen taaksepäin pyörätuolissa(1-2 avustajaa):



1. Master Glide Sif on oikea apuväline jonka avulla käyttäjä avustetaan taaksepäin pyörätuolissa. Kevennä painetta reisien alta asettamalla jalat jalkalautoille tai esim. Master Step On PMA-8091 korokkeelle.



2. Jos mahdollista, pyydä avustettavaa kallistumaan vastakkaiselle sivulle. Avustaja asettaa yhden Master Glide Sif ovaalin kummankin reiden alle painamalla ovaalia alustaa vasten ja kääntäen sen reiden alle.



3. Avustaja asettuu avustettavan eteen ja avustaa häntä nojautumaan eteenpäin, jotta selkä irtoaa pyörätuolin selkänojasta.



4. Avustaja asettaa kätensä avustettavan polvelle tukien samalla omalla polvella avustettavan polvea ja työntää avustettavaa taaksepäin oikeaan asentoon. Aktiivisempi avustettava voi työntää itseään taaksepäin.



5. Ota pois Master Glide Sif molempien reisien alta kiertämällä ja vetäen kahvasta.

Aseta nostoliina käyttäen Master Glide Sif ovaalia:



6. Aseta nostoliina avustettavan taakse - Master Glide Thor ovaalia voi käyttää apuna. Aseta kaksi Master Glide Sif ovaalia päällekkäin avustettavan reiden alle painamalla niitä alustaa vasten ja samalla työntäen.



7. Työnnä reisi hihna Master Glide Sif ovaalien väliin ja vedä reisihihna avustettavan reiden alle.



8. Ota pois Master Glide Sif yksi kerrallaan. Toista sama toisella puolella.

Käyttöohje - Master Glide

Tekniset tiedot

Sertifikaatit:

REACH
DODD
BSE/TSE

Materiaalit: Polyeteeni

Tuoteno - Tuotteen nimi:	Koko:	Maks. Käyttäjäpaino:	Maks tukien välillä:	Paketin paino:
MC 001-7060 Master Glide Sif	P 45 x L 20 x K 0,3 cm	200 kg	0 cm	0,42 kg

Varoitukset



Älä koskaan jätä avustettavan alle tuotetta, mikäli hän makaa lähellä patjan reunaa ja vaarana on liukua pois sängystä.



Älä koskaan jätä tuotetta lattialle.



Varmista että jarrut ovat lukittuna ennen kuin siirrät avustettavaa.



CE-sertifikaatti:
Tämä tuote on CE hyväksytty ja noudattaa harmonisoituja standardeja. Tämä tarkoittaa että tuotteet ovat olemassa olevien terveys- ja turvallisuusdirektiivien mukaisia.



Pintapuhdistus:

Tuotteen pinta voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä ja saippualla.



Pintapuhdistus:

Tuotteen pinta voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä ja saippualla.



Pesuaineen PH arvo:

Tuote kestää PH arvoltaan 5-9 sisältävät pesu- ja desinfiointiaineet.



Huolto:

Tee silmämääräisiä tarkastuksia usein ja mieluiten ennen jokaista käyttöä. Kiinnitä huomiota pinnan naarmuihin ja repeytymiin. Tuotteet, joissa on suuri kitka tai muita puutteita, on hävitettävä.



Käyttöohje:

Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.



Hävittäminen:

Varmista että hävität tuotteen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Lisää ohjeita, videoita, pika-ohjeita jne.
Katso www.master-care.dk

Löydät meidät: