

MADE IN  
EUROPE



Vores produkter og  
råvarer er produceret i  
Europa

Vælg kvalitet, spar  
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

01\_20230102\_DK

# Master Glide Sif



MC 001-7060



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1

CE

ISO 12 31 03 17

The Original Nordic  
Human Handling Concept



Developed &  
Manufactured by:



Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 001-7060	128744	Master Glide Sif	5744001974148

# Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet/produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

## **MDR (EU) 2017/745:**

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

## **Erklærede formål for produktet:**

- 1) Produktet placeres i par under brugers lår for at nedsætte friktion, når bruges flyttes/flytter sig bagud på sædet.
- 2) Kan placeres under bruger lår hvorefter sejlstroppen kan føres imellem de 2 plader, hvorved risiko for shearskader minimeres.

## **Anvendelse af produktet:**

Produktet bruges til brugere som ikke selvstændigt kan flytte sig bagud i på sædet, eller hvor friktion fra sejlstroppen kan medføre shearskader.

Hvis bruger ikke selvstændigt kan forflytte sig bagud i sædet, placeres 1-2 plade under låret/lårene. Hvis muligt læner bruger sig til væk fra låret/ballen, hvor pladen skal føre ind. Har bruger funktion i den ene side kan én plade i modsatte side placeres – ellers placeres en plade under hvert lår.

## **Advarsel:**

Ved brug hos brugere med øget risiko for shearskader kan et glide-stykke med fordel anvendes ved anlæggelse af pladen.

## **Risikovurdering:**

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

## **Kendskab til produktet/forflytning:**

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

## **Levetid:**

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal brug og slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Ved store ridser, knækkede kanter eller hvis materialet er blevet blødt, bør produktet kasseres.

## **Garanti:**

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

## **Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:**

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



# Brugervejledning - Master Glide Sif

## Længere tilbage i kørestol (1-2 hjælpere):



1. Master Glide Sif er det perfekte hjælpemiddel til at hjælpe en bruger tilbage i stolen igen. For at lette trykket under lårene placeres brugerens fødder på fodstøtterne eller fx Master Step On PMA-8091.



2. Hjælper placerer et stk. Master Glide Sif under hvert af brugerens lår. Hvis muligt læner brugeren sig til siden. Spidsen af Sif skubbes ned i pudsen og ind under brugerens lår.



3. Hjælper placerer sig foran brugeren og hjælper brugeren til at læne sig frem, så ryggen er fri af ryglænet.



4. Hjælperen placerer hænderne eller sit knæ ved brugerens knæ, og brugeren kan let skubbes korrekt tilbage i sædet. Den mere aktive bruger kan selv skubbe sig tilbage i sædet.



5. Master Glide Sif fjernes på begge sider ved at rotere det ud ad og trække det væk. Brugeren kan igen læne sig tilbage.

## Placering af sejls benstropper ved hjælp af Master Glide Sif:



6. Placer sejlet bag brugerens ryg – evt. med Master Glide Thor. Placer samlet 2 stk. Master Glide Sif under brugerens ene lår ved at skubbe spidsen ned i underlaget.



7. Benstroppen fra sejlet placeres mellem de 2 Master Glide Sif og trækkes ind under brugerens lår til den korrekte placering.



8. Efter benstroppen er korrekt placeret, fjernes Master Glide Sif ét af gangen. Gentag på det modsatte ben.

# Brugervejledning - Master Glide Sif

## Tekniske specifikationer

### Materialer:

Polyethylen

Varenummer - Navn	Størrelse:	Antal håndtag:	Max. Brugervægt
MC 001-7060 Master Glide Sif	L 45 x B 20 x H 0,3 cm	1	200 kg

## ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



### CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



### Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 200 kg



### Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



### Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



### Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller at produktet ikke er knækket, har store ridser eller lign. Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer  
Quick Guide mm.,  
se [www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)

Find os på:

