

BRUGERVEJLEDNING

VERSION MC 05.01.2022

01A



master-care.dk



Master Glide Sif

ISO 12 31 03 17



Forordning (EU) 745/2017 for medicinsk udstyr kl. 1



MC 001-7060, HMI-nr.128744 Master Glide Sif

Sæt á 2 stk.

Funktionalitet og



Master Glide Sif - Brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Længere tilbage i kørestol - 1 hjælper	Side 2
Placering af sejlets benstroppe ved hjælp af Master Glide Sif	Side 2
Div. prosa	Side 3
Tekniske specifikationer	Side 4
Sikkerhed		



Master Glide Sif - Brugervejledning

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
Længere tilbage i kørestol (1-2 hjælper):



1. Master Glide Sif er det perfekte hjælpemiddel til at hjælpe en bruger tilbage i stolen igen. For at lette trykket under lårene placeres brugerens fødder på fodstøtterne eller fx en Master Step On - PMA-8091.




2. Hjælper placerer et stk. Master Glide Sif under hvert af brugerens lår. Hvis muligt læner brugeren sig til siden. Spidsen af Sif skubbes ned i puden og ind under brugerens lår.



3. Hjælper placerer sig foran brugeren og hjælper brugeren til at læne sig frem, så ryggen er fri af ryglænet.




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4. Hjælperen placere hænderne eller sit knæ ved brugerens knæ og brugeren kan let skubbes korrekt tilbage i sædet igen. Den mere aktive bruger skubber sig selv tilbage i sædet.




5. Master Glide Sif fjernes på begge sider ved at rotere det ud ad og trække det væk. Brugeren kan igen læne sig tilbage.

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
Placering af sejls benstropper ved hjælp af Master Glide Sif:



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6. Placer sejlet bag brugerens ryg – evt. med Master Glide Thor. Placer 2 stk. Master Glide Sif samlet under brugerens ene lår ved at skubbe spidsen ned i underlaget.



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7. Benstroppen fra sejlet placeres mellem de 2 Master Glide Sif og trækkes ind under brugerens lår til den korrekte placering.



8. Efter benstroppen er korrekt placeret, fjernes Master Glide Sif ét af gangen. Gentag på det modsatte ben.

Master Glide Sif - Brugervejledning

Sørg for, at alle relevante bremser er låst, inden forflytning foretages.

Tekniske specifikationer



Materiale emne:
Miljøvenligt Polyethylen - **kan genanvendes**

	Størrelse:	Vægt:	Antal håndtag:
MC 001-7060 Sif	L 45 x B 20 cm x 0,3 cm	0,44 kg	1



Brugervægt:
Anbefalet max. brugervægt: 200 kg.



Overfladisk rengøring.
Dette produkt kan rengøres overfladisk med våd klud og sæbe.



Desinficering:
Dette produkt må gerne tørres over med alkoholholdige desinficeringsblandinger.



Visuel inspektion:
Fortag jævnlig visuel inspektion. Tjek fx at glideegenskaberne stadig er optimale i forhold til brug, at syninger er hele og produktet er uden huller.

CE-mærkning:
Produkterne er godkendt i henhold til gældende Forordning (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervejledning:
Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:
Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.



master-care.dk

Sofienlystvej 3, 8340 Malling

Tel. 86 93 85 85 E-Mail: info@master-care.dk