


# BRUGERVEJLEDNING

VERSION MC 30.09.2021

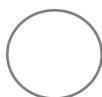

master-care.dk



## Master Glide Thor

ISO 12 31 03 17



Forordning (EU) 745/2017 for medicinsk udstyr kl. 1

○ **MC 001-7061**, HMI-nr.128748 Master Glide Thor.

Sæt á 2 stk.

*Funktionalitet og*



# Master Glide Thor - Brugervejledning

## Placering af sejl under bruger liggende i seng med Master Glide Thor:



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
1. Placer 1 stk Master Glide Thor under brugerens lænd og skub det ned i madrassen og ind under brugeren.




2. Skiftevis tryk ned og skub pladerne et stykke ind under brugeren, så modstanden føles minimal.



3. Roter efterfølgende boardet ind under skulder og hoved.



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4. Placer board nr 2 under det første board på samme måde.




5. Placer sejlet mellem de 2 Master Glide Thor og før det ned mellem pladerne til det er på plads, nede ved brugerens lænd. Sejlet kan trækkes ned skiftevis i højre og venstre side.




6. Alternativt kan 2 hjælpere trække sejlet ned i begge sider samtidigt mellem de to Thor plader.


## Placer sejl bag brugeren i siddende stilling med Master Glide Thor:

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7. Hold en Master Glide Thor plade i vandret position. Før den ind bag brugerens lænd fra siden og før spidsen lidt ned mod brugerens bagdel. Kan man ikke placere pladen fra siden, kan begge plader placeres oppefra, som plade to (læs fig.8)



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8. Drej pladen så den kommer til lodret og samtidig føres helt ind bag brugerens ryg. Placer den anden Master Glide Thor oppefra, mellem den første plade og kørestolens ryg, så de to plader er placeret parallelt.



9. Før sejlet ned mellem de 2 Master Glide Thor og træk let sejlet helt ned på plads til lænden.



# Master Glide Thor - Brugervejledning

## Placere sejl bag bruger i siddende stilling med Master Glide Thor - forsat:



10. De to plader kan nu let fjernes en af gangen.



11. Til placering af sejlets benstroppe kan Sling Socks (MC 003-9031) med fordel benyttes, hvorved man skåner brugerens hud og ikke behøver at løfte brugerens ben.

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


12. Sejlet er nu placeret så brugeren er klar til liftning.


## Placering af Master Glide Thor som brobygger ved sideværts, liggende forflytning:




13. Brugeren ligger på et stiklagen. Placer et Master Glide Thor under brugerens ene skulder, ved at strække ud i lagenet brugeren ligger på, og samtidig skub Master Glide Thor ned i underlaget og skubbe det ind under brugeren i korte nyk.



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
14. Placer det næste Master Glide Thor på samme måde under brugerens bækken.



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
15. Sengene stilles sammen og det tjekkes, at alle hjul er låst og højderne er ens, inden forflytningen udføres.



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16. Hjælper A skubber let på brugeren, mens hjælper B trækker i trækagenet. Brugeren glider over Master Glide Thor.



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18. Hvis der mærkes u hensigtsmæssig friktion under forflytningen, kan man med fordel benytte et dobbeltlagt glidestykke ovenpå Master Glide Thor.



17. Efter forflytningen holder hjælper B fast i lagenet, mens hjælper A trækker først det ene og efterfølgende det andet Master Glide Thor ud under brugeren.



# Master Glide Thor - Brugervejledning




## Advarsel


Max. afstand ved anbefalet brugervægt 135 kg, bør ikke overstige max. 10 cm.

Sørg for, at alle relevante bremseser er låst, inden forflytning foretages.

Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten eller i kørestolen.

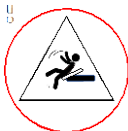

Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.

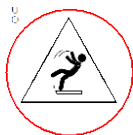

## Tekniske specifikationer



**Materiale emne:**  
Miljøvenligt Polyethylen

	Størrelse:	Vægt:	Antal håndtag:
MC 001-7061 Thor	L 85 x B 39 cm x 3 mm	0,80 kg	2

### Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 135 kg ved max. 10 cm afstand mellem understøttelsesfladerne.



### Overfladisk rengøring.

Dette produkt kan rengøres overfladisk med våd klud og sæbe.



### Desinficering:

Dette produkt må gerne tørres over med alkoholholdige desinficeringsblandinger



### Visuel inspektion:

Fortag jævnlig visuel inspektion. Tjek fx at glideegenskaberne stadig er optimale i forhold til brug og at produktet er helt.

### CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende Forordning (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.



master-care.dk

Sofienlystvej 3, 8340 Malling

Tel. 86 93 85 85 E-Mail: info@master-care.dk