

MADE IN EUROPE




Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

36_20250103_DK

ECO Rack

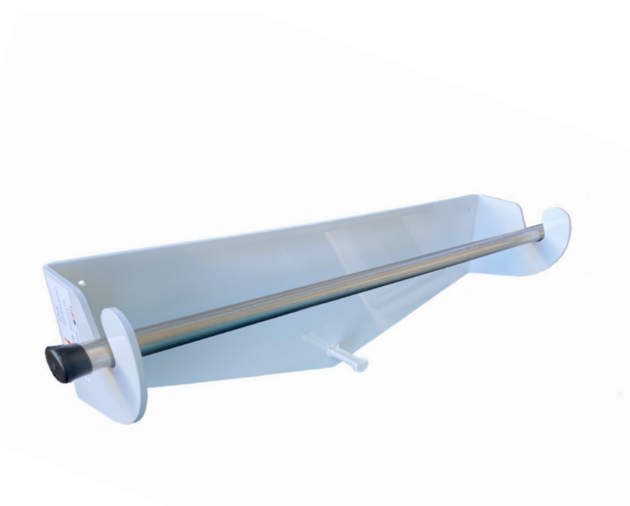

Varenr.
MC 002-1286

Navn - Størrelse
ECO Rack

The Original Nordic
Human Handling Concept




Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

ECO Rack er et vægstativ til opbevaring af overflytningsboard og engangsovertræk.

Størrelse: L 68/78,5 x H 15 x D 17 cm

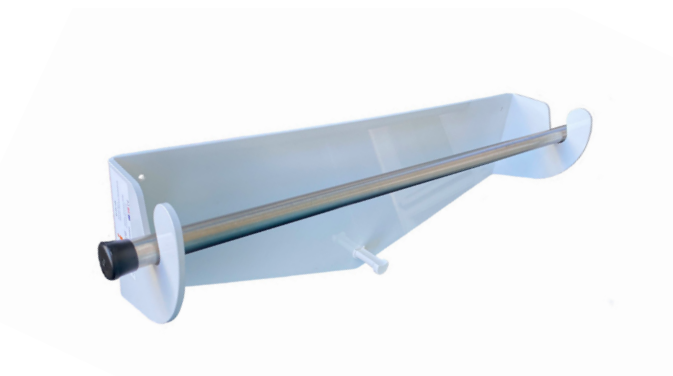

Brugervejledning:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet tages i brug.



Montering af ECO Rack:

ECO Rack skal monteres med skruer (Ø 6,5) i de forborede huller på ECO Rackens bagside.

HUSK altid at montere ECO Rack med skruer og rawplugs, der passer til væggen (gips, beton mfl.).

Det anbefales, at montere ECO Rack, så boardets bund, når boardet hænger på racken, er min. 30 centimeter over gulvhøjde.

ECO Rack leveres uden skruer og rawplugs.



Monteringsvægt:

Det anbefales, at overtræksplasten + overflytningsboard tilsammen vejer **max 30 kg**. Er væggens maxbelastning mindre, vil denne altid være gældende.



Visuel inspektion:

Foretag jævnlig visuel og taktil inspektion af ECO Rack. Tjek at der ikke er knækkede kanter, flænger eller lign. Tjek, at alle skruer er strammet og at ECO Rack er stabilt monteret.

Ved tegn på slidtage eller skader bør produktet kasseres.



Vedligeholdelse/ Rengøring:

ECO Rack kan rengøres med varm vand og sæbeopløsning eller om nødvendigt en opløsning af 70% ethanol, 45% isopropanol eller lignede. Aftørres med en klud.



Opbevaring:

ECO Rack kan monteres i rum med temperatur mellem 5-60°C.



Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 10 år ved normal brug og slitage.



Bortskaffelse:

Produktet kan bortskaffes som PVC (plast).



Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

For mere information og nyeste brugervejledning:

