

MADE IN EUROPE




Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

Multi Rack

36_20250103_DK

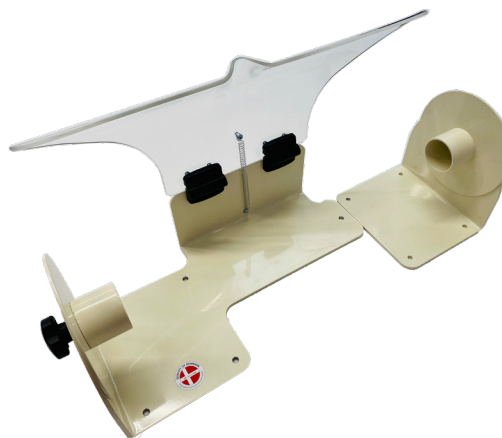

MC 002-1287

Varenr.:

Navn - Størrelse:



MC 002-1287

Multi Rack


The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Brugervejledning - Multi Rack

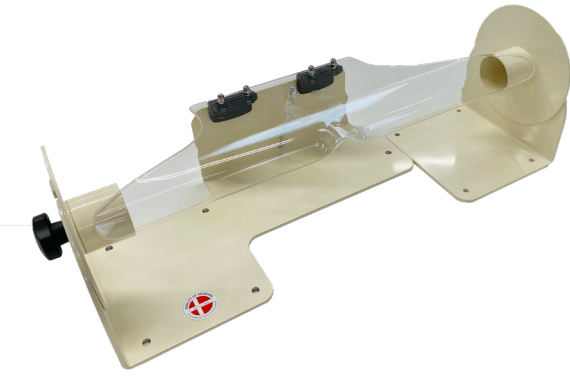

Multi Rack er et fleksibelt vægstativ til opbevaring af engangsovertræk.



Brugervejledning:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet tages i brug.



Montering af Multi Rack:

Multi Rack skal monteres med skruer i de forborede huller på Multi Rackens to beslag.

HUSK altid at montere Multi Rack med skruer og rawplugs, der passer til væggen (gips, beton mfl.).

Det anbefales, at montere Multi Rack min. 30 centimeter over gulvhøjde af hensyn til hygiejne.
Multi Rack leveres *uden* skruer og rawplugs.



Monteringsvægt:

Det anbefales, at overtræksplasten vejer **max 30 kg**. Er væggens maxbelastning mindre, vil dennes vægtgrænse altid være gældende.



Visuel inspektion:

Foretag jævnlig visuel og taktil inspektion af Multi Rack. Tjek at der ikke er knækkede kanter, flænger eller lign. Tjek, at alle skruer er strammet og at Multi Rack er stabilt monteret.
Ved tegn på slidtage eller skader bør produktet kasseres.



Vedligeholdelse/ Rengøring:

Multi Rack kan rengøres med varm vand og sæbeopløsning eller om nødvendigt en opløsning af 70% ethanol, 45% isopropanol eller lignede. Aftørres med en klud.



Opbevaring:

Multi Rack kan monteres i rum med temperatur mellem 5-60°C.



Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 10 år ved normal brug og slitage.



Bortskaffelse:

Produktet kan bortskaffes som PMMA (plast) og metal.



Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

For mere information og nyeste brugervejledning:




Brugervejledning - Multi Rack


Montering horisontalt/ vandret:



1. Hold Beslag 1 op mod væggen med et vaterpas. Vælg en passende højde og marker hullerne på væggen.

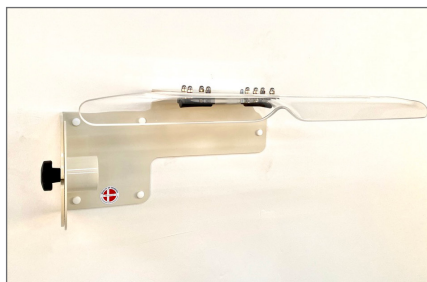

2. Monter beslaget.
Anvend altid solide skruer og evt. rawlplugs, hvis dette er relevant ift. væggens opbygning.

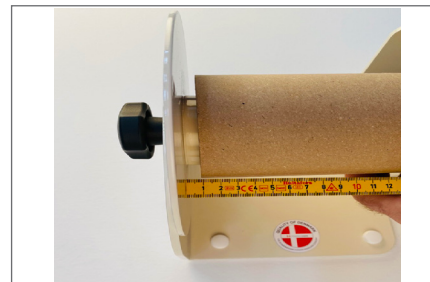

3. Mål den totale længde af paprøret som éngangsovertræk/ nylon er rullet op på. Læg 2 cm til målet for at have lidt friafstand mellem paprørets ender og Rulleholderne.



4. Mål fra indersiden af Beslag 1 mod højre for at finde den korrekte afstand til Beslag 2. Brug afstanden udregnet i tekst 3.



5. Placer Beslag 2, så det er i vater med Beslag 1. Afmærk hullerne på væggen og monter Beslag 2 med dertil passende skruer og evt. rawlplugs.



6. Sørg for, at Rulleholder B er placeret i spor på Beslag 2 og er forsvarligt strammet til.



7. Før den frie ende af paprøret ud over Rulleholder B på Beslag 2.



8. Afmonter Rulleholder A fra Beslag 1 og placer den på den frie ende af paprøret.




9. Før Rulleholder A ind i sporet på Beslag 1 og stram forsvarligt til.

Brugervejledning - Multi Rack

Montering horisontalt/ vandret (fortsættelse):



10. Før afslutningsvis Dugholderen ned over rullen, så materialet fasteholdes.

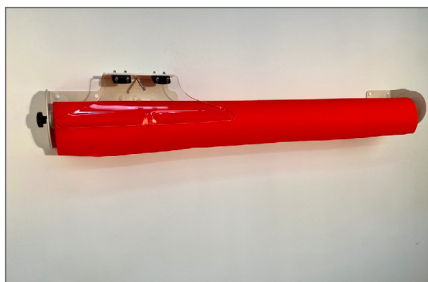

11. Multi Rack er monteret og klar til brug.

Montering Vertikalt/ lodret:



12. Placer Beslag 2 mod væggen og ret til med vaterpas. Marker hullerne på væggen. Monter beslaget.




13. OBS I henhold til gældende hygiejnekrav anbefales det, at Beslag 2 er placeret mindst 30 cm over gulvet.



14. Sørg for, at Rulleholder B er placeret i sporet på Beslag 2 og er forsvarligt strammet til.



15. Mål den totale længde af paprøret, som éngangsovertræk/ nylon er rullet op på. Læg 2 cm til målet for at have lidt friafstand mellem paprørets ender og Rulleholdere A og B.

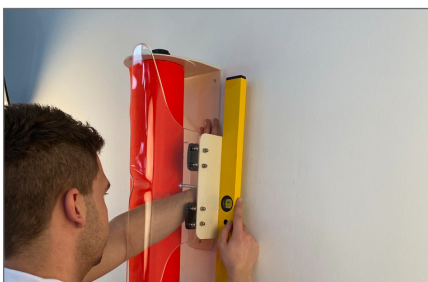


16. Placer Beslag 1, så det er i vater med Beslag 2. Afmærk hullerne på væggen og monter Beslag 1 med dertil passende skruer og evt. rawlplugs.



17. Før den ene ende af paprøret ud over Rulleholder B på Beslag 2.

Brugervejledning - Multi Rack


Montering Vertikalt/ lodret (fortsættelse):

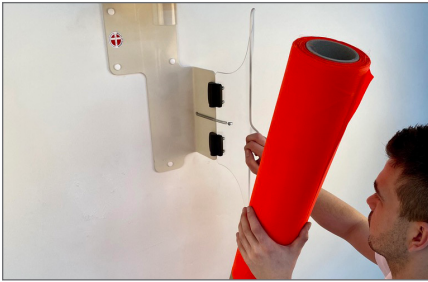

18. Åbn Dugholderen i Beslag 1.



19. Tag Rulleholder A ud af sporet og placer det på paprøret på Beslag 1.

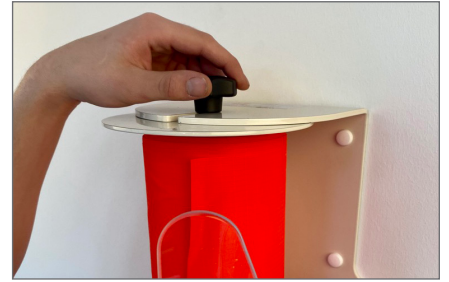

20. Før paprøret med Rulleholder A, ind i sporet på Beslag 2 og stram forsvarligt til.



21. Før afslutningsvis Dugholderen ned over rullen, så materialet fasteholdes.


Udskiftning af rulle:



22. Vip Dugholderen op, så den står i åben position.



23. Løsn bolt i Rulleholder A.

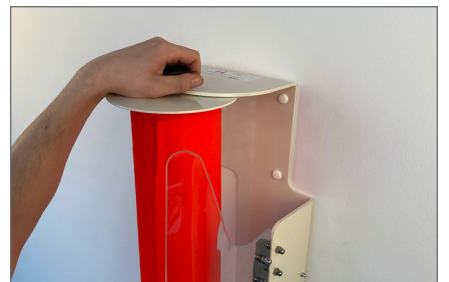

24. Flyt rulle inkl. Rulleholder A ud af Beslag 1 og løft paprøret af. Udskifte med ny rulle. Genplacer Rulleholder A og før den ind i sporet på Beslag 1 og stram forsvarligt til.

Brugervejledning - Multi Rack

Tekniske specifikationer

Varenummer - Navn:

MC 002-1287 Multi Rack inkl. rulleholder
Rulleholder 5,8
Rulleholder 7,2

Størrelse:

L 70-170 x H 25 x D 32
Minimum indermål på paprør 5,8 cm
Minimum indermål på paprør 7,2 cm

Materialer: Stål (S235) og PMMA.



For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk