

MADE IN
EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.


(NL) Handleiding

22_20250106_NL

Dress Master - Leg

Pat. BA 2022 00046

Gebrauchsmusters Nr. 20 2023 105 598

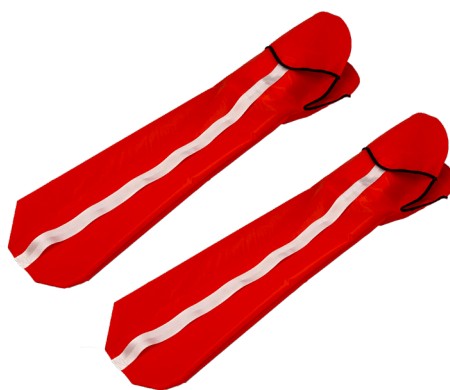

Artikel nr.

MC 001-0995

HMI nr.

133644

Naam - Maat

Dress Master - Leg

UDI-DI/GTIN

5744001974100

Verordening MDR 2017/745 voor medische hulpmiddelen
klasse 1

ISO 12 03 03 20



The Original Nordic
Human Handling Concept



Distributeur:

Solution²Care

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Bedankt voor het kiezen van een product van master care A/S.

Wij raden aan om de gebruikershandleiding grondig te lezen voordat u het product(en) in gebruik neemt.

De informatie in deze handleiding is van toepassing op de getoonde producten, op voorwaarde dat de producten niet zijn gewijzigd of aangepast en dat de producten zijn gebruikt zoals aanbevolen in deze gebruikershandleiding.

Als de klant het product verandert, repareert of gebruikt in andere combinaties dan aanbevolen door master care A/S, is de CE goedkeuring niet langer van toepassing en vervalt de garantie.

Neem bij twijfel contact op met de distributeur Solutions2care BV die Master Care vertegenwoordigt in NL.

MDR (EU) 2017/745:

Producten in deze handleiding zijn CE-goedgekeurd en voldoen aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Regulation MDR(EU) 2017/745-Klasse 1.

Het beoogde gebruik van het product/de producten:

Het product is een glijdende aantrekhelp voor het kleden van o.a. broeken. Het dubbele glijdende aspect vermindert het risico op schuifwonden en vermindert de ergonomische/fysieke belasting van de hulpverlener tijdens het kleden.

Correct gebruik van het product:

Schuif de Dress Master over het been/de benen en/of arm(en) van de gebruiker voordat u de kleding over de Dress Master - Legschiift. Als de kleding aan is, verwijder dan de Dress Master - Leg door lichtjes, afwisselend, aan de banden te trekken.

Contra-indicatie:

Gebruik het product niet als de patiënt open wonden heeft. Verbind wonden altijd voordat u de Dress Master - Leg gebruikt.

Waarschuwing:

Laat de Dress Master - Leg nooit op de grond liggen i.v.m. valgevaar.

Risico beoordeling:

Maak Altijd een risico- en functionele beoordeling van de gebruiker voordat u het product gebruikt.

Op deze manier is het gebruik van het product voor het aankleden van de gebruiker ergonomisch en juridisch verantwoord.

Kennis van het product/overdracht:

Het is belangrijk dat de gebruiker van het product goed is geïnstrueerd in het gebruik van het product. En de gebruikershandleiding goed heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.

master care A/S en onze NL Distributeur 'Solutions2care BV' geeft Voorlichting over het gebruik van master care producten en op onze websites zijn alle gebruikshandleidingen te vinden.

Levensduur:

De verwachte levensduur van producten van nylon glijmateriaal bij dagelijkse gebruik en gemiddeld wassen is 1-3 jaar. De levensduur van het product is afhankelijk van gebruik, gewicht client en hoe en hoe vaak het product wordt gewassen en gedroogd.

Producten met onvoldoende wrijvingsvermindering, defecte naden, beschadigd materiaal of andere gebreken moeten worden weggegooid en z.n. vervangen. Zo wordt een gezonde – en veilige werkomgeving voor zowel de hulpverlener als gebruiker behouden.

Voor regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik.

Garantie:

master care A/S en Distributeur biedt een Garantie van 2 jaar op materiaal- en fabricagefouten als het product correct gebruikt wordt.

Onbedoelde gebeurtenissen en verwondingen bij verkeerd gebruik: Onbedoelde gebeurtenissen /verwondingen moeten altijd worden gemeld aan de bevoegde nationale autoriteit en aan master care A/S via de distributeur in het huidige land.

master care A/S en onze Distributeurs, zoals Solutions2Care BV, nemen geen verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of productschade als het product en/of producten zijn gebruikt in strijd met het door de fabrikant aanbevolen beoogde doel of correct gebruik van het product(en).



Handleiding - Dress Master - Leg

Hoe de Dress Master - Leg te gebruiken:



1. Plaats een groot glijzeilstof onder de benen en heupen van de gebruiker om de wrijving met het laken te minimaliseren.



2. Plaats de Dress Master - Leg links en rechts van de gebruiker, met de korte zijde bij het kruis, de lange zijde naar buiten. En de trekbanden aan de buitenkant.



3. Schuif de Dress Master - Leg over de voet, langs het been omhoog. Zorg ervoor dat het glijmateriaal helemaal onder het bekken door wordt geplaatst.



4. Als de gebruiker geen van beide benen kan gebruiken, past u de Dress Master - Leg toe op beide benen.



5. Plaats de voeten inclusief Dress Master - Leg om beurten in de rechter/linker broekspijp en trek de broek omhoog tot onder het bekken van de gebruiker. De Dress Master - Leg bevindt zich tussen de benen en de broek.



6. Buig het been en draai gebruiker een beetje in zodat er ruimte ontstaat om de broek helemaal omhoog, over de heup en bil te kunnen trekken. Herhaal de handeling aan de andere kant. Licht broek recht onder de gebruiker sluit dan, indien nodig, de sluiting.



7. Verwijder de Dress Master - Leg één voor één door tegelijkertijd aan de twee banden te trekken.



8. Verwijder de glijzeilstof onder de gebruiker na het verwijderen Dress Master - Leg.



9. De Dress Master - Leg kan ook worden gebruikt voor overhemden, jassen en vesten.

Handleiding - Dress Master - Leg

Technische specificaties

Materiaal:

Nylon en polyester

ISO certificeringen:

ISO 12952-1:2015

Textiel - Beoordeling van de ontvlambaarheid van beddengoed - smeulende sigaret voor ontstekingsbron.

Artikel nr. - Product Naam:	Maat:	Max. gebruikersgewicht:
001-0995 Dress Master - Leg	L 150 x W 37/29 cm	150 kg

Waarschuwing



Laat de gebruiker nooit alleen achter op het product wanneer het op de rand van het bed ligt.



Verlaat het product nooit op de vloer.



Zorg er Altijd voor dat gebruiker niet verstrikt raakt in lussen/banden.



Zorg ervoor dat alle relevante remmen geactiveerd zijn voordat u de gebruiker overplaast



CE-certificatie:

Dit product is CE-goedgekeurd en voldoet aan de geharmoniseerde normen. Dit betekent dat de producten voldoen aan de essentiële gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen. Het product/de producten voldoen aan de normen in de Medical Device Regulation (EU) 2017/745 - kl. 1.

Voor meer informatie, video's, quick gids zie onze websites



Hergebruik het product na het reinigen:

Als het product volgens de instructies is gereinigd, kan het voor andere gebruikers worden gebruikt.



Wassen:

Dit product kan in de wasmachine op max. 85 °C worden gewassen. Voorzichtig wassen en drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Reinigingsmiddel pH level:

Dit product verdraagt was- en desinfectiemiddelen met pH-waarde tussen 5-9.



Wasverzachter:

Gebruik *nooit* wasverzachter, dit vermindert de glij-eigenschappen aanzienlijk.



Max. 40°C

Droogtrommel:

Dit product mag alleen voorzichtig op max. 40°C worden gedroogd. Aan de lucht drogen verlengt de duurzaamheid aanzienlijk.



Oppervlakte reiniging:

Het oppervlak van dit product kan worden gereinigd met een natte doek en zeep.



Ontsmettingsmiddelen:

Dit product verdraagt alcoholische ontsmettingsmiddelen met een pH waarde tussen 5-9.



Strijken:

Niet strijken.



Stomerij:

Niet stomen.



Bleken:

Niet bleken.



Onderhoud:

Over regelmatig visuele inspecties uit en bij voorkeur voor elk gebruik. Let op gescheurde stof, naden of banden. Producten met hoge wrijving of andere tekortkomingen moeten worden weggegooid en z.n. vervangen.



Handleiding:

Lees de gebruikershandleiding altijd grondig door voordat u het product gebruikt.



Beschikbaarheid:

Zorg er Altijd voor dat u de lokale richtlijnen volgt bij het weggooien van het product.

Vind ons op:



Solution²Care