

MADE IN  
EUROPE



This product has been developed and manufactured using both raw materials and with production in Europe.

Choose quality, save money, and protect the environment.

# (FI) Käyttöohje

19\_20251214\_FI

## Master Turner Royal - L+XL

The **Original** Master Turner System




Master Turner Royal Combi



Master Turner Royal Inco



Master Turner Royal Pro - XL

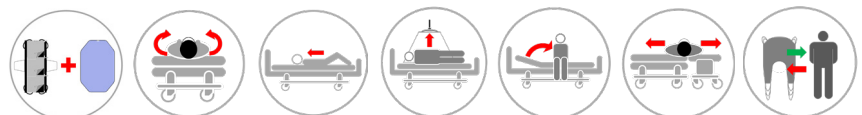

- 
- 
- 

**REF (Tuotenro)**  
MC 001-1734  
MC 001-1747  
MC 001-2535

**HMI**  
137037  
139893  
131086

**Nimi - Koko**  
Master Turner Royal Combi - L  
Master Turner Royal Pro - XL  
Master Turner Royal Inco - L

**UDI-DI/GTIN**  
05744001974834  
05744001974988  
05744001973974

Lääkintälaittedirektiivi 2017/745 luokka 1



ISO 12 31 03 21

The Original Nordic  
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed &  
Manufactured by:



# Käyttöohje - Master Turner Royal - L / XL

## Sisällysluettelo

Tärkeää tietoa ennen tuotteen käyttöönottoa: .....	sivu 2
Patjanpäällisen Mattress Cover ja Master Turner L asettaminen paikoilleen: .....	sivu 3
Kääntäminen vuoteessa manuaalisesti- itsenäisesti siirtyvä potilas ( 1 avustaja): .....	sivu 3
Kääntäminen vuoteessa- avustusta tarvitseva potilas (1 avustaja): .....	sivu 3
Kääntäminen vuoteessa- avustuksesta riippuvainen potilas (1 avustaja): .....	sivu 4
Siiräminen vuoteesta toiseen (1-2 avustajaa): .....	sivu 4
Vältä vuoteessa alasliukumista käyttämällä tukityynyjä ja -kiiloja (1 avustaja): .....	sivu 4
Lukitse Master Turner-L paikoilleen tarranauhakiinnityksellä MC001-1950: .....	sivu 5
Avusta potilas ylöspäin vuoteessa Master Turnerilla (1-2 avustajaa): .....	sivu 5
Avusta potilas ylöspäin Master Turner- L:llä (1-2 avustajaa): .....	sivu 5
Siirtyminen istumaan vuoteen reunalle nostinta käyttäen (1-2 avustajaa): .....	sivu 6
Aseta nostimen nostoliina Master Turnerin alle ja nosta potilas (2 avustajaa): .....	sivu 6
Master Turner Inco: .....	sivu 7
Tarkista kahvat säännöllisesti: .....	sivu 7
Puhdistaminen ja uudelleenkäyttö: .....	sivu 7
Tekniset tiedot. ....	sivu 9



# Kiitos kun valitsit Master Care A/S tuotteen.

## Tärkeää tietoa ennen tuotteen käyttöönottoa:

Suosittellemme käyttöohjeen lukemista ennen kuin otatte tuotteen/ tuotteet käyttöön.

Käyttöohjeen sisältö koskee alkuperäisessä kunnossa olevia tuotteita joita ei ole muokattu tai muutettu ja että tuotetta on käytetty käyttöohjeessa suositellulla tavalla. Mikäli tuotetta muokataan tai korjataan tai käytetään yhdistelmänä jonkun muun tuotteen kanssa jota valmistaja Master Care A/S ei suosittele, niin silloin CE-merkintä ei ole voimassa eikä takuu kata virheellisen käytön seurauksia.

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä master care A/S tuotteen maahantuojaan.

### MDR (EU) 2017/745:

Tuote jota käyttöohje koskee on CE -merkinnällä hyväksytty ja noudattaa harmonisoituja standardardeja. Tämä tarkoittaa että tuote täyttää sille asetetut terveys- ja turvallisuusdirektiivit. Tuote täyttää lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen standardit MDR (EU) 2017/745 luokka 1.

### Tuotteen käyttötarkoitus:

Master Turner and Cover- tuote muodostavat kääntämisen yhdistelmän, jota voidaan käyttää henkilöille joilla liikkuminen vuoteessa on vaikeaa fyysisten tai kognitiivisten rajoitteiden vuoksi. Kun kitkaa vähennetään käyttäjän ja patjan välissä, painehaavoille altistumisen riski vähenee sekä avustajan ergonomiset työskentelyolosuhteet paranevat avustettaessa käyttäjää kääntymään, siirtymään ylös/ alas vuoteesta tai istumaan vuoteen laidalle. Master Turneria tulee aina käyttää yhdessä Master Care A/S:n Mattress Cover -tuotteen kanssa, jotta saavutetaan paras mahdollinen liukuominaisuus.

### Tuotteen oikea käyttötapa:

Master Turner ja Mattress Cover- yhdistelmä muodostaa kääntämisen yhdistelmätuotteen joka on tarkoitettu käyttäjille jolla on alennettu kyky itse siirtyä sängyssä tai sängystä toiseen.

### Indikaatiot:

Tuote, jossa on kitkaa vähentävä ominaisuus, on tarkoitettu käyttäjälle, joka tarvitsee osittain avustusta kääntämiseen, liikkumiseen ja siirtoihin sekä painevaurioiden ehkäisyyn.

### Kontraindikaatiot:

Käyttäjiä, joilla on heikentynyt kognitiivinen toimintakyky mutta, jotka ovat fyysisesti kykeneviä nousemaan vuoteesta, ei tule jättää yksin ST- tai 2-päällisen päälle. Tällöin tulee käyttää Vario Cover 3 -päällistä, jossa liukuläpät voidaan siirtää pois käytöstä, kun käyttäjä jää yksin. Tämä vähentää riskiä, että käyttäjä liukuu lattialle.

### Varoitus:

Varmista että käyttäjä ei istu liian lähellä patjan reunaa kun käytössä on Mattress cover koska on riski liukua pois patjasta. Varmista että polvet on 90 asteen kulmassa kun käyttäjä istuu vuoteen reunalla, jalat yltävät lattialle ja käytössä on riittävästi kitkaa reisien alla.

### Riskien arviointi:

Tee aina riskianalyysi ja toiminnallinen analyysi ennen kuin tuotetta käytetään. Näin varmistat ergonomiset ja lailliset osa-alueet kun käytät tuotetta käyttäjän siirtämiseen.

### Tuotetietoa:

On tärkeää, että tuotetta käyttävä henkilö tuntee tuotteen ja on saanut perehdytystä tuotteen käytössä sekä on lukenut käyttöohjeen. master care A/S tarjoaa tuotekoulutusta ja nettisivuiltamme löytyy kaikki tuotteiden käyttöohjeet.

### Valmistuspäivämäärä ja käyttöikä:

Tuotteen valmistuspäivä löytyy tuotetietolapusta "LOT" ja ilmaistaan VVKKPP- toisin sanoen 251020 tarkoittaa että tuote on valmistettu 20 syyskuuta 2025.

Tuotteen, jossa on nailonnen liukuva pinta, odotettavissa oleva käyttöikä on 1-3 vuotta riippuen päivittäisestä käytöstä, käyttäjän painosta, pesukertojen määrästä, lämpötiloista ja kuivaamisesta.

### Tuotteen tarkistus:

Tuote jossa liukuominaisuus on riittämätön, tuote on rikkoutunut tai muutoin vaurioitunut on poistettava käytöstä. Tällä tavoin huolehdi terveellisestä työympäristöstä niin avustajalle kuin avustettavallekin. Tee visuaalinen tarkistus usein ja mieluiten ennen joka käyttöä.

### Takuu:

master care A/S antaa tuotteilleen 2 vuoden takuun joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheistä johtuvat viat edellyttäen, että tuotetta on käytetty oikein.

### Tuotteen väärin käytöstä johtuvat seuraukset ja vammat:

Tuotteen väärin käytöstä johtuneet seuraukset tulisi aina ilmoittaa toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle Suomessa FIMEA ja valmistajalle master care A/S sekä maahantuojalle.


Valmistaja master care A/S ja maahantuoja ei ole vastuussa henkilö- vahingoista tai tuotteen vaurioitumisesta mikäli tuotetta on käytetty väärin tai sitä ei ole käytetty valmistajan suositusten mukaisesti.

# Käyttöohje - Master Turner Royal - L / XL

## Patjanpäällisen Mattress Cover ja Master Turner L asettaminen paikoilleen:



1. Aseta Mattress Cover L - patjan päällinen patjan päälle:

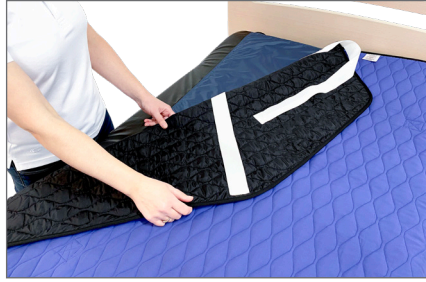

2. Aseta Master Turner-L:n nyloninen puoli patjanpäällistä Master Coveria vasten niin että liukulakanan leima "This side up" näkyy.



3. Master Turnerin suojaksi ja turhia pesuja välttämiseksi inkontinenssisuoja MC 001-1810 voi asettaa Master Turnerin päälle.

## Kääntäminen vuoteessa manuaalisesti- itsenäisesti siirtyvä potilas ( 1 avustaja):



4. Koukista potilaan toista tai molempia polvia. Potilas tarttuu sängyn kaiteesta avustaakseen mahdollisuuksien mukaan.



5. Potilas aloittaa kääntämisen työntämällä lantiota taaksepäin ja kääntämällä ylävartaloa. Avustaja tarttuu Master Turnerista mahdollisimman läheltä potilasta ja avustaa kääntämisessä.



6. Kylkiasennon tukevoittamiseksi ja mukavuuden lisäämiseksi Master Comfort Positioning Wedge MC001-8035 -kiilatyyppi voidaan käyttää potilaan vatsan edessä. Kiilatyyppin käyttö lisää turvallisuudentunnetta, tukee vatsaa ja lisää selkärangan oikaisua kylkimakuulla.

## Kääntäminen vuoteessa- avustusta tarvitseva potilas (1 avustaja):



7. Siirrä potilasta sängyn laidalle siirtämällä vuorotellen lantiota, ylävartaloa ja alaraajoja pienissä erissä. Vältä potilaan siirtämistä yhdessä liikkeessä. Koukista potilaan alaraaja polvesta, nosta sängyn laitaa ja siirry sängyn toiselle puolelle. Koukista toinen alaraaja.



8. Aseta tukikiila Position Wedge - S lähelle vatsaa ennen potilaan kääntämistä. Tartu liukulakana Master Turneristä lation molemmin puolin ja avusta potilasta kylkimakuulle. Tällä tavalla voita saada tärkeää tietoa selän toiminnasta ja kunnosta.



9. Kylkimakuulle kääntämisen jälkeen, selkätuki-tyyppi Back Wedge - Short MC 001-8070 voi asettaa potilaan selän tukemiseksi tarvittaessa. Jos asettaa, ennen potilaan kääntämistä, alaraajojen tukityyppiä Positioning Cushion – S Nylon Master liukumateriaalin kanssa alaraajan viereen, on helppoa liuttaa ylempää jalkaa oikeaan asentoon. Poista sitten Nylon Master liukumateriaali. Vältä alaraajan nostamista.

# Käyttöohje - Master Turner Royal - L / XL

## Kääntäminen vuoteessa- avustuksesta riippuvainen potilas (1 avustaja):



10. Aseta potilaan yläraaja vatsan päälle, kiinnitä liukulakana potilasnostimeen, nosta sängyn laita ja siirry sängyn toiselle puolelle. Siirrä niskatyyny sivulle ja nosta lähin yläraaja tynnylle. Aseta vatsan tukikiila Positioning Wedge – S vatsan viereen ja alaraajan tukityyny Positioning Cushion – S alaraajan viereen.



11. Aloita nostaminen nostimella. Kun olkapää ja lantion toinen puoli on nostettu patjasta liuta potilasta taaksepäin vuorotellen lantiosta ja olkapäästä pienissä erissä. Nosta asentoa nostimesta ja toista potilaan liu'uttamista kunnes potilas on kylkimakuulla.



12. Liu'uta ylempi jalka eteenpäin alaraajan tukityynyn päälle. Säädä asentoa käyttämällä potilaan alla olevaa liukumateriaalia, käännä myös lantiota. Jos tarpeen, tue selkää selkätykitynyllä Back Wedge - L MC 001-8075

## Siiräminen vuoteesta toiseen (1-2 avustajaa):



13. Aseta molemmat sängyt vierekkäin. Laita jarrut päälle. Täytä sänkyjen väliin jäävä tila Cylinder Cushions MC 001-8030 ja MC 001-8080-tukitynyillä. Parempaan työasennon saavuttamiseksi vetoremmejä MC 001-1947 voi kiinnittää Master Turnerin kiinnityslenkeihin.



14. Laita liukumateriaalia patjanpäällisen liukuestepintojen päälle. Vaakatasosiirrossa liukumateriaali täytyy peittää koko siirtoalueen.



15. Vedä rauhallisesti Master Turneria siirtäkseen potilasta vaakatasossa. Siirrä lantiota, ylävartaloa ja alaraajoja pienissä erissä jotta koko kehonpainoa ei tarvitse yhdessä liikkeessä siirtää.

## Vältä vuoteessa alasliukumista käyttämällä tukityynyjä ja -kiiloja (1 avustaja):



16. Korjaa lantion asentoa liuttamalla Master Turneria. Tarkista lantion asentoa kohottamalla kokonaan sängyn polvikulmaa.



17. Laita kaksi tukikiilatuttyynyä Positioning Wedges – S MC 001- 8040, liukupinta alaspäin, potilaan reisien alle liukulakana Master Turnerin alle. Aseta tukityyny jalkojen ja sängynpäädyn väliin. Jätä 5 cm väliä.



18. Nosta sängyn polvikulman ja sängyn ylävartalon säätöä. Jos potilaan ylävartalo kallistuu sivulle, aseta tukikiila Positioning Wedge – M, MC 001-8050 ylävartalon molemmin puolin. Tukikiilat tukee, lisää mukavuutta ja antaa potilaalle selkeää tuntotietoa.

# Käyttöohje - Master Turner Royal - L / XL

Lukitse Master Turner-L paikoilleen tarranauhakiinnityksellä MC001-1950:



19. Irroita sängyn alapäätä ja vedä patjaa hie-  
man alaspäin. Kiinnitä molemmat kiinnityslenkit  
sängyn päänalustan päättyyn.



20. Vedä kiinnityslenkin pää Master Turner  
liukulakanan nylonlenkkien läpi, kiristä ja lukitse.  
Tee sama molemmin puolin.



21. Lukitusremmit pitää Master Turneria paikalla  
kun pääty on nostettu.  
Huomioi kitka.

**Avusta potilas ylöspäin vuoteessa Master Turnerilla (1-2 avustajaa):**



22. Nosta sängyn polvikulmaa ja laske sängyn  
yläpäätä. Jos potilas voi työntää jaloilla,  
laita jalat liukuestepinnalle esim. poistamalla  
patjanpäällisen jalkopään läppä. Avustaja vetää  
Master Turnerista käyttäen hyväksi painonsiirtoa  
ja rauhallista rytmiiä.



23. Vaihtoehtoisesti: Nosta sängyn polvikulmaa  
ja laske sängyn yläpäätä tai käytä Trendelenbur-  
giä. avustaja seisoo sängynpäädyssä, irroitaa  
sängyn päätä. Pidä kiinni potilaan nilkoista ja  
työnnä potilasta. Jos potilas pystyy koukista-  
maan polvia paina jalkojen jalkapöydistä.



24. Vaihtoehtoisesti käytä potilasnostinta.  
Kiinnitä nostin lantion kohdalle ja kevennä  
lantiota nostimella patjasta. Potilasta siirretään  
ylös sängyssä työntämällä jaloista tai vetämällä  
Master Turnerin yläosasta.

**Avusta potilas ylöspäin Master Turner- L:llä (1-2 avustajaa):**



25: Irroita patjanpäällisen liukuläpät potilaan  
alta.



26: Aseta tupla liukumateriaali potilaan koko var-  
talon alle. Aseta ne kääntämällä potilas kyljelle  
tai taittotechnikalla.



27: Vedä potilasta ylös sängyssä Master Turnerin  
päällä käyttämällä Mini Masteria tai lakanaa lan-  
tion alla. Tarvittaessa nosta sängyn polvikulmaa.

# Käyttöohje - Master Turner Royal - L / XL

## Siirtyminen istumaan vuoteen reunalle nostinta käyttäen (1-2 avustajaa):



### 28. Älä käytä Master Turner Incoa tätä varten.

Aseta sängyn pääty paikoilleen. Nosta sängyn polvikulmaa ja sitten yläpäätä. Kiinnitä Liukulakanan kiinnityslenkit potilasnostimeen. Nosta kunnes ylävartalon asento kohentuu. Säätonauhoja voi käyttää potilasturvallisuuden lisäämiseksi, mukavuuden ja tukevuuden aikaansaamiseksi.



29. Aseta nylonista liukumateriaalia polvista alaspäin liukuesteen päällä. Käännä Master Turneria potilaan alaraajojen ympäri ja liu'uta nostamatta alaraajat reunan yli.



30. Voit tarvittaessa käyttää Master Turnerin liukupintaa apuna potilaan lantion liu'uttamisessa eteenpäin sängyn laidalle. Säätöremmejä Adjustment Straps MC 001-1948 voi säätää uudestaan kun potilas istuu sängyn laidalla.


## Aseta nostimen nostoliina Master Turnerin alle ja nosta potilas (2 avustajaa):



31. Kiinnitä Master Turneria potilasnostimeen ja käännä potilasta kyljelle. Taita ja aseta nostoliina Master Turnerin ja patjanpäällisen väliin.



32. Laske nostinta ja kiinnitä toiselle puolelle. Käännä potilasta ja vedä nostoliina esille. Tarkista nostoliinan paikkaa liu'uttamalla nostoliinaa Master Turnerin ja patjanpäällisen välissä.

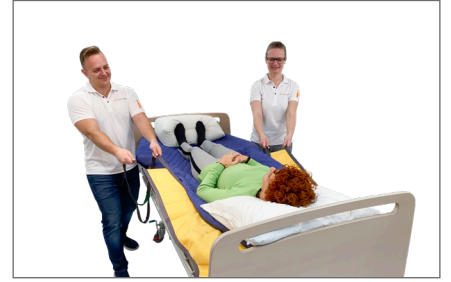

33. Pahoinvoivalle tai tuntohäiriöistä kärsivälle potilaalle: Aseta tukityyny Positioning Cushion – S jalkojen ja jalkopäädyn väliin. Avustaja vetää nostoliinan reisilenkeistä nostoliinan paikan korjaamiseksi.



34. Vedä nostoliinan reisilenkit sivulle ja Liukulakana Master Turnerin päälle. Aseta reisilenkit reisien alle. Asetteluun avustamiseksi suosittelemme Sling Sock Basic MC 003-9031. Tämä tuote vähentää kitkasta aiheutuvien vaurioiden syntyä nostamisen aikana ja helpottaa reisilenkien asettelua reisien alle nostamatta reisiä.



35. Nosta sängyn polvikulmaa ja yläpäädyn kulmaa. Kiinnitä nostoliina nostimeen ja nosta potilasta sängystä kun Master Turner on nostoliinan ja potilaan välissä.



36. Taita Master Turneria taakse-ylös nostoliinan taakse ennen potilaan laskemista pyörätuoliin. Master Turner on taitettu U:n muotoon nostoliinan ympärille.

# Käyttöohje - Master Turner Royal - L / XL

## Aseta nostimen nostoliina Master Turnerin alle ja nosta potilas (2 avustajaa) - jatkuvuus:



37. Laske potilasta pyörätuoliin. Varmista että potilas ei istu master Turnerin päällä.



38. Liuta reisilenkit Sling Sockista ja poista nostoliina Master Turnerin liukupintojen välistä. Voit myös käyttää nosturia poistamaan nostoliinaa. Näin tehtynä potilas ei tarvitse nojata eteenpäin nostoliinan poistamisen aikana.



39. Avustaja poistaa Master Turnerin potilaan alta vetämällä Master Turnerin alareunasta jolloin Master Turnerin liukupinnat liukuu toisiaan vasten. Tuotteen poistamista voi helpottaa avustamalla potilasta kallustumaan sivusuunnasta. Jotkut Master Turner -mallit voi myös kiinnittää nostimeen poistamista varten.

## Master Turner Inco:



40. Master Turner Incolla on integroitu inko-suoja. Vaikka Master Turner Inco kastuu patjanpäällinen Matress Cover ei kastu.



41. Vaihtoehtoisesti joku muu inkosuoja, kuten Inco Master MC 001-1801. Tämä vähentää pesukertoja ja pidentää liukupintojen liukuominaisuuksia ja tuotteen elinkaarta.

## Puhdistaminen ja uudelleenkäyttö:



42. Tuotetta voi käyttää eri potilaalle kun tuotetta on pesty ja puhdistettu ja niin kauan kun saumat remmit, kangas ja muut osat ovat ehjät.

## Tarkista kahvat säännöllisesti:



43. Suorita visuaalinen tarkastus kahvoista ja ristipistotikkauksista. Tarkista, onko merkkejä katkenneista saumoista tai sauman kulumisesta. Jos havaitaan, tuote tulee hylätä.



44. Ota kiinni Master Turnerin kahvoista ja vedä voimakkaasti. Jos saumasta kuuluu "naksahdusääniä" tai sauma osoittaa muita kulumisen merkkejä (katkenneet tai rispaantuneet langat), tuote tulee hylätä.



45. **TÄRKEÄÄ:** Jos havaitset rikkoutuneita saumoja tai muun materiaalin vaurioituneen Master Turneria käytettäessä, se on heti irroitettava potilasnostimesta ja korvattava toisella Master Turnerilla.

# Tuotteen laatu – Toiminnallisuus – Elämänlaatu



# Käyttöohje - Master Turner Royal - L + XL

## Tekniset tiedot

ISO sertifikaatti:

ISO 12952-1:2015 Koskee tekstiilien materiaalien syttymistä kun ne altistuu hehkuvan tupakan kuumuuteen.

REF Tuotenumero:	Koko:	Liukuosa:	Maks. Käyttäjätaino:	Materiaali:	Paketin paino:
MC 001-1734 Master Turner Royal Combi - L	P 200 x L 150 cm	28	200 kg	8% Puuvillaa, 74% Polyesteria, 16% Polyamidia, 2% Silikonia.	1,36 kg
MC 001-1747 Master Turner Royal Pro - XL	P 215 x L 200 cm	30	400 kg	8% Puuvillaa, 73% Polyesteria, 17% Polyamidia, 2% Silikonia.	1,98 kg
MC 001-2535 Master Turner Royal Inco - L	P 210 x L 150 cm	24	200 kg	6% Puuvillaa, 75% Polyesteria 6% Polyuretania, 12% Polyamidia, 1% Silikonia.	2,00 kg

## Varoitukset



Älä jätä käyttäjää makaamaan tuotteen päällä vuoteen reunalla



Älä jätä tuotetta lattialle



Varmista että käyttäjä ei takerru tarranauhoihin.



Älä jätä käyttäjää yksin kun tuote on kytketty potilasnostimeen.



Älä käytä nostoliinana. Voidaan käyttää potilasnostinta asennohoidossa ja siirtyessä sängyssä.



Varmista että asianmukaiset jarrut ovat lukittu kun siirät käyttäjää.



CE-sertifikaatti: Tämä tuote on CE hyväksytty ja noudattaa harmonisoi-  
tuja standardeja. Tämä tarkoittaa että tuotteet ovat olemassa olevien terveys- ja turvallisuusdi-  
rektiivien mukaisia. Tuote täyttää lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 – luokka 1 vaatimukset.



### Käyttäjän paino:

Suosittelut käyttäjätaino: 150kg, 180kg, 200kg tai 400kg Katso taulukkoa yllä.



### Pesu:

Tuote voi pestä konepesussa maks. 85 a-  
seessa.  
Hellävarainen pesu lisää oleellisesti tuotteen käyttöikä.



### Pesuaineen PH arvo:

Tuote kestää PH arvoltaan 5-9 sisältävät pesu- ja desinfiointiaineet.



### Huuheluaaine:

Älä käytä huuheluaainetta, sillä se heikentää huomattavasti tuotteen liukuomaisuutta.



### Rumpukuivaus:

Tämä tuote voi daan rumpukuivata hellä-  
varaisesti maks. 40°C. Ilmakuivaus pidentää tuotteen kestävyttä huomattavasti.



### Pintapuhdistus:

Tuotteen pinta voidaan puhdistaa kostealla pyyhkeellä ja saippualla.



### Desinfiointiaineet:

Tämä tuote kestää alkoholipitoisia desinfiointiaineita, joiden pH-arvo on 5–9.



### Silitys:

Ei saa silitää.



### Kuivapesu:

Ei kuivapesua.



### Valkaisu:

Ei kestä valkaisua.



### Huolto:

Tee säännöllisesti silmämääräinen tuotteen tarkistus ja huomioi että kitkapinta on toimiva, vetoketju, inkontinenssipinta ja kaikki saumat ovat ehjät ennen käyttöä. Testaa tyynyn vaahdotuovin kimmoisuus painamalla sitä. Poista tuote käytöstä mikäli se on vaurioitunut.



### Käyttöohje:

Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.



### Hävittäminen:

Varmista että hävität tuotteen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Löydät meidät:



master-care.dk