



Se mere her!



○ **Art. no. MC 001-1956**

Hmi no. 88227

Master Stop Måtte - Small

Dimensioner/Dimensions/Größe:

L 40 cm x B/W 45 cm x H 6 mm

○ **Art. no. MC 001-1957**



Hmi no. 88228

Master Stop Måtte - Large

Dimensioner/Dimensions/Größe:

L 60 cm x B/W 80 cm x H 6 mm

# 1. Anvendelse af Master Stop Måtte

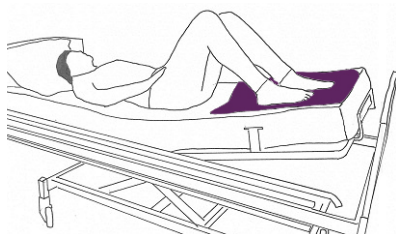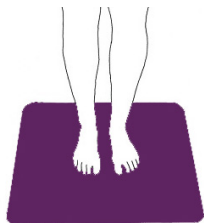

Placer Master Stop Måtte på gulvet under brugers fødder foran stolen, sengen, i badeværelset eller andre steder, hvor det skal sikres, at bruger ikke glider på underlaget.

Bruger ligger på et silkelagen, er gledet ned i seng og har brug for hjælp til, at komme højere op. Master Stop Måtte placeres under brugers fødder. Fodenden på seng hæves, og bruger kan nu selv stemme fra med fødderne.

**MÅ IKKE ANVENDES PÅ VÅDE OVERFLADER**

## PRODUKTBESKRIVELSE

Master Stop Måtte er en 6 mm tyk antiskrid-måtte.

## ANVENDELSE

Anvendes som underlag for at hindre bruger i at glide. Placeres under brugers fødder, f.eks. når bruger rejser sig op eller sætter sig ned i stol eller seng. Kan også anvendes til at stemme fra med for at komme højere op i seng.

## TEKNISTISKE SPECIFIKATIONER

Materiale: TPE (Thermo plastisk Elastomer)

Fri for PVC, phtalater og alle andre skadelige stoffer.

Max. brugervægt: 250 kg

## VASKEANVISNING

Max. vasketemperaturer 40° C

Kan spritrenses



## ADVARSEL

- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes

## VIGTIGT

- Anvend altid produktet i henhold til denne brugervejledning
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte master **care**/din forhandler
- Anvendes dette produkt ikke iht. denne brugervejledning påtager master **care** sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører personskader
- Garanti: To år på materiale- og produktionsfejl ved korrekt håndtering af produktet

