

Master BOARD

Medium / Large / Heavy

BRUGERVEJLEDNING



Master BOARD Medium



Master BOARD Large



Master BOARD Heavy

Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	*L/B	Vægt
	MC 005-1060	80951	Master BOARD inkl. cover	Medium	L 110 x B 40 cm	B	1500 g
	MC 005-1070	34170	Master BOARD inkl. cover	Medium	L 110 x B 50 cm	L	1740 g
	MC 005-1061	80952	Master BOARD Nyloncover 40	Medium	L 110 x B 44 cm	B	90 g
	MC 005-1071	34173	Master BOARD Nyloncover 50	Medium	L 110 x B 54 cm	L	100 g
	MC 005-1200	55311	Master BOARD inkl. cover	Large	L 180 x B 40 cm	B	2580 g
	MC 005-1210	33236	Master BOARD inkl. cover	Large	L 180 x B 50 cm	L	2780 g
	MC 005-1201	55312	Master BOARD Nyloncover 40	Large	L 180 x B 44 cm	B	150 g
	MC 005-1211	38948	Master BOARD Nyloncover 50	Large	L 180 x B 54 cm	L	160 g
	MC 005-1600	80953	Master BOARD Large inkl. cover	Heavy	L 180 x B 50 cm	L	3700 g
	MC 005-1211	38948	Master BOARD Nyloncover 50	Large	L 180 x B 54 cm	L	160 g

* L=lagervare, hvor det kan forventes, at varen afsendes indenfor 3 arbejdsdage
B=bestillingsvare, her kan påregnes op til ca. 3 ugers leveringstid

Master BOARD

Medium / Large / Heavy



A. Forberedelse af Master BOARD Medium



1A) Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD.



2A) Master BOARD er nu klar til brug.



Inden overflytning foretages **SKAL** hjul på begge lejer låses.



B. Anvendelse af Master BOARD Medium



1B) Vend brugeren om til den ønskede side.



2B) Hvis det er muligt anvend gerne et lagen til vending.




3B) Mens den ene hjælper holder brugeren i sideleje, placerer den anden hjælper Master BOARD fra hovedet og nedefter til hofteparti. Vær opmærksom på at boardet dækker helt op til brugerens isse, da hovedet ellers vil blive voldsomt roteret under overflytningen.



4B) Brugeren rulles nu tilbage og ned på Master BOARD, således det dækker øverste halvdel af brugerens krop.



5B) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.

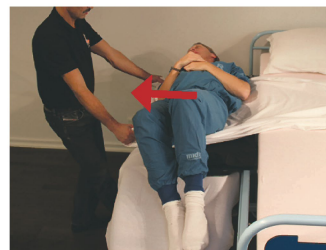

6B) Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Master BOARD påbegyndes. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Master BOARD ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælpers hjælp flytter benene med.



7B) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Master BOARD

Medium / Large / Heavy



C. Forberedelse af Master BOARD Large




1C) Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD.



2C) Master BOARD er nu klar til brug.



Inden overflytning foretages SKAL hjul på begge lejer låses.

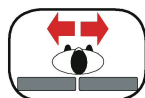

D. Anvendelse af Master BOARD Large



1D) Vend bruger om til den ønskede side.



2D) Hvis muligt anvend gerne et lagen til vendingen



3D) Mens den ene hjælper holder bruger i sideleje placerer den anden hjælper Master BOARD, således at det dækker fra hoved og nedefter ved brugerens hofte- og benparti.



4D) Bruger rulles nu tilbage og ned på Master BOARD. Sørg for at hoved og det ene eller begge ben er oppe på Master BOARD



5D) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.



6D) Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Master BOARD påbegyndes. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Master BOARD ruller med brugeren.



7D) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Master BOARD

Vaskeanvisning

Master BOARDS kan vaskes ved 80 grader C



Kun skånsom tørretumbling



ADVARSEL


Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

Produkterne kan renses med hospitalssprit og hospitalsklorin.

Max. belastning

Medium og Large:


Personvægt:
max 160 kg
Afstand mellem
flyttepunkter:
max 20 cm

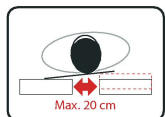

Personvægt: 160 kg

Heavy:

Personvægt:
max 280 kg
Afstand mellem
flyttepunkter:
max 20 cm

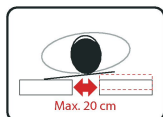

Personvægt: 280 kg



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Til opbevaring af Master BOARD



MC 002-1285
Master RACK Board Holder



MC 002-1282
Master RACK
Vægophæng

Medium / Large / Heavy

Produktbeskrivelse

Master BOARD er et polstret afstivet overflytningsboard, der består af en fleksibel plastplade fremstillet i opskummet PVC. Master Boardet kan skilles ad og vaskes. Udenpå Master BOARD anvendes som tilbehør et cover af nylon, som roterer og glider mod Boardet. Derved skabes en rul-lende bevægelse under bruger.

Master BOARD Medium er et 5-punkts Board, som dækker hofte-, skulder og hovedparti.

Master BOARD Large og Heavy er 7-punkts Boards, som dækker hele kroppens længde. Udover det medfølgende nyloncover kan Master BOARD forsynes med engangsovertræk, der er bestående af en glat folie, som har unikke glideegenskaber. Master BOARD Large og Heavy kan foldes sammen under opbevaring og alle boards hænges op på Master RACK Vægophæng eller kan stå i Master RACK Board Holder og fylder derved minimalt med plads.

Anvendelse

Master BOARD anvendes til forflytninger, hvor der skal bygges bro mellem mindre afstande eller højdeforskelle. Brugeren kan med Master BOARD forflyttes liggende mellem seng, leje, hvilestol eller kørestol, der kan lægges ned. Ved anvendelse af Master BOARD Medium kan brugeren enten selv flytte benene, eller få hjælp til dette.

Ved anvendelse af Master BOARD Large og Heavy er hele brugerens krop understøttet.

Master BOARD Heavy anvendes til ekstra tunge brugere (bariatriske brugere).

Fordele

- Nemt at placere
- Nedsætter friktion ved overflytning mellem lejer
- Udligner højdeforskelle

Engangsovertræk til Master BOARD




MC 002-1252
Large Rød




MC 002-1262/63
Junior/Medium Klar

MC 002-1251
Large Klar

Til opbevaring af Master BOARD Engangsovertræk

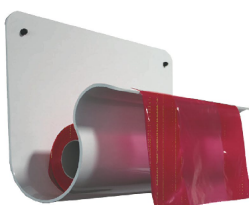

MC 002-1284
Master RACK Folie Holder

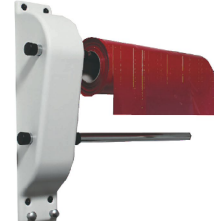

MC 002-1280
Master RACK Vægstativ