

Master BOARD

Small / Junior / Senior

BRUGERVEJLEDNING



Master BOARD Small



Master BOARD Junior



Master BOARD Senior

Når mobiliteten forringes...



...forbedrer vi livskvaliteten!

Vare	Art no.	Hmi no.	Produktbetegnelse	Model	Størrelse	Vægt
	MC 005-1030	42301	Master BOARD inkl. cover	Small	L 60 x B 50 cm	1520 g
	MC 005-1031	34172	Master BOARD Nyloncover	Small	L 60 x B 54 cm	80 g
	MC 005-1150	36482	Master BOARD inkl. cover	Junior	L 140 x B 50 cm	2440 g
	MC 005-1111	34174	Master BOARD Nyloncover	Junior	L 140 x B 54 cm	110 g
	MC 005-1130	80959	Master BOARD inkl. cover	Senior	L 130 x B 40 cm	1920 g
	MC 005-1131	80958	Master BOARD Nyloncover	Senior	L 140 x B 44 cm	100 g

Master BOARD

Small / Junior / Senior



A. Forberedelse af Master BOARD Small



1A) Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD



2A) Master BOARD er nu klar til brug.



Inden overflytning foretages **SKAL** hjul på begge lejer låses.



B. Anvendelse af Master BOARD Small



1B) Vend brugeren om til den ønskede side.



2B) Hvis det er muligt anvend gerne et lagen til vending



3B) Mens den ene hjælper holder brugeren i sideleje, placerer den anden hjælper Master BOARD under brugerens hofteparti



4B) Brugeren rulles nu tilbage og ned på Master BOARD, således det dækker brugerens hofteparti



5B) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.



6B) Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved hoftepartiet. Overflytning på Master BOARD påbegyndes.



7B) Brugeren ruller nu over på det nye leje ved hjælp af Master BOARD Small. Sørg for at brugeren enten ved egen hjælp eller hjælpers hjælp flytter benene med.



8B) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Master BOARD

Small / Junior / Senior



C. Forberedelse af Master BOARD Junior og Senior




1C) Det vedlagte cover af nylon føres over Master BOARD.



2C) Master BOARD er nu klar til brug.



Inden overflytning foretages **SKAL** hjul på begge lejer låses.

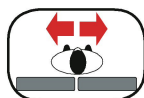

D. Anvendelse af Master BOARD Junior og Senior



1D) Vend bruger om til den ønskede side.



2D) Hvis muligt anvend gerne et lagen til vendingen



3D) Mens den ene hjælper holder bruger i sideleje placerer den anden hjælper Master BOARD således, at det dækker fra hoved og nedefter ved brugerens hofteparti



4D) Bruger rulles nu tilbage og ned på Master BOARD. Sørg for at hoved og det ene eller begge ben er oppe på Master BOARD.




5D) Det leje, som bruger oprindeligt lå på, hæves en anelse højere end det, man flytter til. Den ene hjælper griber i lagenet ved hofteparti, skubber i skulder, løfter let op i lagenet og ruller brugerens vægt op og ind på Master BOARD. Jo længere lagenet er jo lettere foretages forflytningen.



6D) Samtidig trækker hjælper på modsatte side i lagenet ved skulder- og hofteparti. Overflytning på Master BOARD påbegyndes. Brugeren flyttes derved meget let over på det nye leje, da Master BOARD ruller med brugeren. Sørg for at bruger enten ved egen hjælp eller med hjælperes hjælp flytter benene med.



7D) Brugeren ruller nu over på det nye leje ved hjælp af Master BOARD. Sørg for at brugeren enten ved egen hjælp eller hjælperes hjælp flytter benene med.

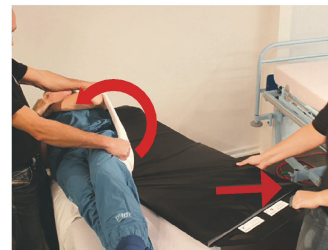

8D) Den ene hjælper ruller nu brugerens vægt over til siden, mens den anden tager fat i de nederste håndtag på Master BOARD. Derved trækkes det meget let væk under brugeren.

Master BOARD

Vaskeanvisning

Master BOARDS kan vaskes ved 80 grader C




ADVARSEL

Der må ikke anvendes skylle- eller blegemiddel. Dette forringer glideeffekten.

Produkterne kan renses med hospitalssprit og hospitalsklorin.

Max. belastning

Personvægt: max 160 kg
Afstand mellem flyttepunkter: max 20 cm

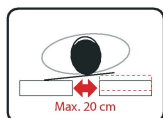

Personvægt: 160 kg



VIGTIGT

- Sørg hele tiden for at dette Master CARE hjælpemiddel er intakt ved jævnligt at efterse syninger.
- Hvis dette hjælpemiddel har en kritisk slitage eller på anden vis har skader, må det ikke benyttes.
- Er du i tvivl om brugen af dette hjælpemiddel, skal du omgående kontakte Master CARE.



ANSVAR

- Anvendes dette hjælpemiddel forkert eller u hensigtsmæssigt, påtager Master CARE sig ikke ansvaret for ulykker, der medfører alvorlige personskader.

Til opbevaring af Master BOARD



MC 002-1285
Master RACK Board Holder



MC 002-1282
Master RACK
Vægophæng

Small / Junior / Senior

Produktbeskrivelse

Master BOARD er et polstret afstivet overflytningsboard, der består af en fleksibel plastplade fremstillet i opskummet PVC. Master Boardet kan skilles ad og vaskes. Udenpå Master BOARD anvendes som tilbehør et cover af nylon, som roterer og glider mod Boardet. Derved skabes en rul-lende bevægelse under bruger.

Master BOARD Small er et 2-punkts Board, som dækker hofteparti. Master BOARD Junior er et 7-punkts Board, som dækker hele kroppens længde og anvendes til personer der er under 140 cm.

Master BOARD Senior er et 5-punkts Board, som dækker hofte-, skulder og hovedparti.

Udover det medfølgende nyloncover kan Master BOARD Junior og Senior forsynes med engangsovertræk, der er bestående af en glat folie, som har unikke glideegenskaber.

Master BOARD Junior kan under opbevaring foldes sammen og alle Boards kan hænges op på Master RACK Vægophæng eller stå i Master RACK Board Holder og fylder derved minimalt med plads.

Anvendelse

Master BOARD anvendes til forflytninger, hvor der skal bygges bro mellem mindre afstande eller højdeforskelle. Brugeren kan med Master BOARD forflyttes liggende mellem seng, leje, hvilestol eller kørestol, der kan lægges ned. Ved anvendelse af Master BOARD Small og Senior kan brugeren enten selv flytte benene, eller få hjælp til dette.

Fordele


- Nemt at placere
- Nedsætter friktion ved overflytning mellem lejer
- Udligner højdeforskelle

Engangsovertræk til Master BOARD Junior og Senior




MC 002-1262/63
Junior/Senior Klar

Til opbevaring af Master BOARD Engangsovertræk

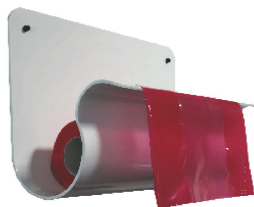

MC 002-1284
Master RACK Folie Holder

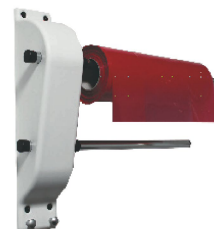

MC 002-1280
Master RACK Vægstativ