

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.


(DK) Brugervejledning

01_20241001_DK

Master Glide Thor



MC 001-1745

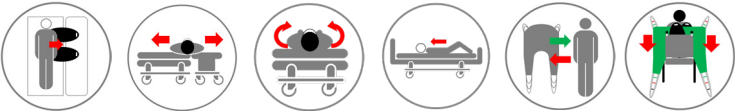

Vare nr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 001-7061	128748	Master Glide Thor (sæt á 2 stk)	5744001974155

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 17

The Original Nordic
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

- 1) Produktet har til formål at danne bro mellem 2 lejer ved liggende forflytning af brugere med nedsat fysisk funktion. Kan benyttes med nylon og/eller glat engangsovertræk.
- 2) Produktet bruges, når liftsejl pålægges og tages væk. Nedsætter risiko for shear skader, tryk og træk i huden på ryggen. Gør det lettere ergonomisk for hjælperen at pålægge og fjerne sejlet fra brugeren.

Anvendelse af produktet:

- 1) Produktet glides let ind under skulder og bækken til den side bruger skal forflyttes til. Kan med fordel placeres under et lagen således, at dette kan bruges som trækstykke under forflytningen. Brug af glidestof anbefales, hvis forflytningen vurderes ergonomisk tung.
- 2) Produktet placeres bag brugers ryg – fortrinsvis ét ad gangen. Sejlet glides ned mellem de to brædder og justeres på plads, inden brædderne flyttes igen ved at rotere dem 90 grader og trække roligt.

Kontraindikation/ Advarsel:

Ved liggende forflytning bør afstand mellem understøttelsesfladerne ikke overstige 10 cm.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal brug og slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Ved store ridser, knækkede kanter eller hvis materialet er blevet blødt, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Glide Thor

Indholdsfortegnelse

Placering af sejl under bruger liggende i seng med Master Glide Thor	side 2
Placer sejl bag brugeren i siddende stilling med Master Glide Thor	side 2
Placere sejl bag bruger i siddende stilling med Master Glide Thor - forsat	side 3
Placering af Master Glide Thor som bro ved sideværts, liggende forflytning	side 3
Tekniske specifikationer	side 4



Brugervejledning - Master Glide Thor

Placering af sejl under bruger liggende i seng med Master Glide Thor:



1. Placer 1 stk. Master Glide Thor under brugerens lænd. Skub boardet ned i madrassen og ind under brugeren.



2. Skiftevis tryk ned og skub boardet et stykke ind under brugeren, så modstanden føles minimal.



3. Roter efterfølgende boardet ind under skulder og hoved.



4. Placer board nr. 2 under det første board på samme måde som beskrevet ovenfor.



5. Placer sejlet mellem de 2 Master Glide Thor og før det ned mellem pladerne til brugerens lænd. Sejlet kan trækkes ned skiftevis i højre og venstre side.



6. Alternativt kan 2 hjælpere samtidigt trække sejlet ned mellem de to Thor boards.

Placer sejl bag brugeren i siddende stilling med Master Glide Thor:



7. Hold et Master Glide Thor board i vandret position. Før det ind bag brugerens lænd fra siden med spidsen ned mod brugerens bagdel. Kan man ikke placere boardet fra siden, kan begge boards placeres samtidig oppefra (læs fig.8).



8. Drej boardet til lodret stilling og før det helt ind bag brugerens ryg. Placer nr. 2 Master Glide Thor oppefra, mellem det første board og kørestolens ryg, så de to boards er placeret parallelt.



9. Før sejlet ned mellem de 2 Master Glide Thor og træk sejlet helt ned på plads ved lænden.

Brugervejledning - Master Glide Thor

Placere sejl bag bruger i siddende stilling med Master Glide Thor - forsat:



10. De to boards kan nu let fjernes - ét af gangen.



11. Til placering af sejlets benstroppe kan Sling Socks (MC 003-9031) med fordel benyttes for at undgå shear samt løft af brugerens ben.



12. Sejlet er nu placeret, så brugeren er klar til liftning.

Placering af Master Glide Thor som bro ved sideværts, liggende forflytning:



13. Brugeren ligger på et stiklagen. Placér ét Master Glide Thor under brugerens ene skulder ved at trække ud i lagenet og samtidig skubbe Master Glide Thor ned i underlaget og ind under brugeren i korte nyk.




14. Placér det næste Master Glide Thor på samme måde under brugerens bækken.



15. Sengene stilles sammen og det tjekkes, at alle hjul er låst og højderne er ens, inden forflytningen udføres.



16. Hjælper A skubber let på brugeren, mens Hjælper B trækker i stiklagenet. Herved glides brugeren over Master Glide Thor.

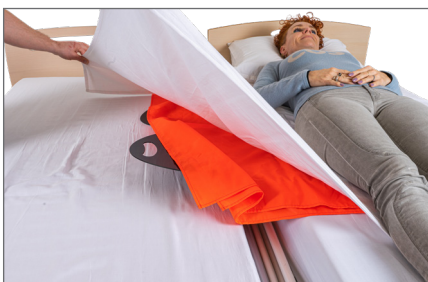

17. Hvis der mærkes u hensigtsmæssig friktion under forflytningen, kan et dobbeltlagt glide stykke med fordel placeres ovenpå Master Glide Thor.



18. Efter forflytningen holder Hjælper B fast i lagenet, mens Hjælper A trækker først det ene og efterfølgende det andet Master Glide Thor ud under brugeren.

Brugervejledning - Master Glide Thor

Tekniske specifikationer

Certificering:

REACH
DODD
BSE/TSE

Materialer: Polyethylene

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Max. brugervægt (SWL):	Max afstand mellem støtteflader:	Pakkevægt:
MC 001-7061 Master Glide Thor	L 83 x W 39 x H 0,3 cm	200 kg	10 cm	1,6 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Max 10 cm afstand mellem understøttelsesfladerne i forbindelse med forflytning.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet er defekt, har brudte overflader eller ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssig og forsvarlig forflytning kan udføres, bør produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk