

MADE IN
EUROPE




Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

01_20260414_DK

Master Glide Traume Board

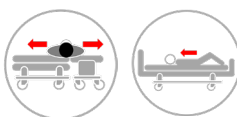

REF (Varenr.)

MC 004-1030

MC 004-1032

HMI nr.

103330

-

Navn - Størrelse

Master Glide Traume Board

Master Glide Traume Board - 160

UDI-DI/GTIN

05744001972656

05744001975008

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 18

The Original Nordic
Human Handling Concept



Scan Me

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet kan benyttes ved planforflytning af brugere mellem 2 lejer. Brug af nylon og et stiklagen under bruger anbefales.

Anvendelse af produktet:

Master Glide Traume Board kan bruges ved overflytning mellem smalle lejere fx røntgenleje og akutleje. Placer boardet halvt under brugeren, hvorefter bruger glides over på modsatte leje. Nylon bør anvendes, hvis forflytningen vurderes tung eller ved brugere, der er i risiko for at pådrage sig shear skader.

Indikation:

Boardet kan bruges i forbindelse med horisontale forflytninger fx mellem skadesleje/operationsleje og seng.

Kontraindikation:

Grundet boardets smalle bredde bør det ikke anvendes til bariatriske patienter. Der kendes ikke til andre kontraindikationer ved brug af produktet.

Advarsel:

Boardet bør ikke anvendes over større ikke-understøttede afstande end det, som er anført på boardet.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for

den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Produktionsdato og levetid:

Produktets produktionsdato kan ses på produktets gravering under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Kontrol/Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres. Hvis produktet har defekte syninger eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Glide Traume Board

Brug af Master Glide Traume Board:



1. Placer brugeren ud til kanten af madrassen.



2. Vend brugeren let til siden og placer Master Glide Traume Boardet så det dækker hoved og bækken.



3. Hvis brugeren har tunge ben eller der er risiko for traume, kan 2 stk Master Glide Traume Board benyttes.



4. Placer glidestof ovenpå boardet for at minimere friktion under forflytningen.



5. Placer sengene mod hinanden i samme højde. Husk at låse alle bremser.



6. I et roligt tempo trækkes brugeren over på modsatte seng via lagnet.



7. Fjern glidestykket ved at trække i laget længst fra brugeren.

Brugervejledning - Master Glide Traume Board

Tekniske specifikationer

REF - Navn:	Størrelse:	Håndtag:	Max. brugervægt:	Produktvægt:
MC 004-1030 Master Glide Trauma Board	L 100 x B 49 x H 0,5 cm	1	150 kg	3,60 kg
MC 004-1032 Master Glide Traume Board - 160	L 160 x B 49 x H 0,5 cm	1	150 kg	

Materialer:
PE

Produkterne lever op til følgende standards:

REACH

RoSH

DODD Frank

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Max. 20 cm afstand mellem understøttelsesfladerne i forbindelse med forflytning med Master Board.



Max. 5 cm hældning mellem understøttelsesfladerne.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt (SWL - safe working load):
Anbefalet max. brugervægt: 150 kg.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet er defekt, har brudte overflader eller ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssig og forsvarlig forflytning kan udføres, bør produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

