

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

Basic Belt


15_20250402_DK



MC 001-1310



MC 001-1311

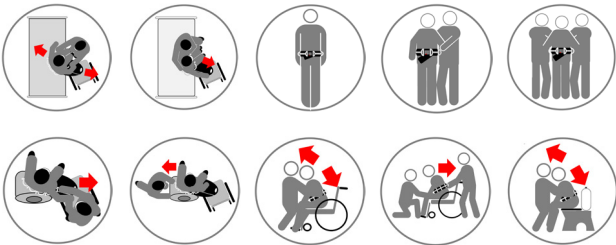

REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 001-1310	109640	Basic Belt - M	05744001970393
MC 001-1311	109943	Basic Belt - L	05744001973165

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 15 04

The Original Nordic
Human Handling Concept



Scan Me

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

Brugervejledning - Basic Belt

Indholdsfortegnelse

Produktinformation:	side 2
Montering af Basic Belt:	side 3
Siddende til stående position:	side 3
Gangtræning med Basic Belt:	side 3
Sætte bruger ned fra stående position:	side 4
Overflytning mellem kørestol og seng:	side 4
Tekniske specifikationer:	side 5



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges ved facilitering under fx gang eller ved forflytninger i siddende hos brugere med nedsat funktionsniveau fysisk og/eller kognitivt.

Produktet bør ikke bruges som løfteanordning, da dette kan medføre skader for bruger og hjælper.

Anvendelse af produktet:

Basic Belt monteres omkring taljen på bruger. Via håndtagene kan hjælper facilitere brugeren i forskellige forflytninger uden at holde direkte fast i bruger. Ligeledes giver håndtagene hjælperen mulighed for at "forlænge" armene således, at hjælper kan opnå en bedre arbejdsstilling.

Indikation:

Bruges til personer som grundet nedsat fysisk eller kognitiv funktion har brug for let støtte i gangfunktionen, til at komme fra siddende til stående eller i den siddende forflytning.

Kontraindikationer:

Hvis brugeren ikke har kontrol over sin overkrop, skal en anden metode vælges til at ændre brugerens position.

Advarsel:

Master Belt er ikke en løfteanordning og må ikke bruges som sådan. Master Belt må ikke bruges sammen med en lift. Master Belt må ikke bruges til at fastholde brugeren.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Produktionsdato og levetid:

Produktets produktionsdato kan ses på produktets label under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Kontrol/Eftersyn:

Produktet bør efterses jævnligt. Har produktet defekte syninger, brudte overflader eller er på anden vis i stykker, bør produktet kasseres.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produkt-skader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Basic Belt

Montering af Basic Belt:



1. Basic Belt monteres rundt om brugers talje. Basic Belt fastgøres ved at benytte dets regulerbare låsespænde.



2. For at tilpasse Basic Belt til brugers talje trækkes der i selve bæltets ende - samtidig trækkes i modsatte retning i bæltets gjord i låsespændet. Stram til.

Siddende til stående position:



3. Bruger og hjælper sidder på sengekanten. Hjælperen kan støtte brugeren på begge sider af hofterne.



4. Hjælper støtter brugeren i at komme til stående stilling.



5. Rollator kan evt. placeres foran brugeren.

Gangtræning med Basic Belt:



6. Hjælperen stiller sig på siden af bruger og guider brugeren ved at holde i Basic Belts håndtag.



7. Er der to hjælpere, kan hjælper 2 støtte overroppen eller guide benene.

Brugervejledning - Basic Belt

Sætte bruger ned fra stående position:



8. Hjælperen stiller sig foran bruger og tager fat i håndtag på begge sider af Basic Belt.



9. Hjælperen støtter sit knæ mod brugers og bøjer ned i knæ med ret ryg for at følge med brugers bevægelse, når bruger sætter sig ned i sengen/stolen.

Overflytning mellem kørestol og seng:



13. Brugeren har et Basic Belt monteret rundt om taljen, og et Master Glide glidebræt placeres mellem kørestol og seng.



14. Hjælperen tager fat i håndtag på begge sider af Basic Belt og støtter forflytningen til siden.

Brugervejledning - Basic Belt

Tekniske specifikationer

REF (Vare nr) - Navn	Størrelse:	Antal håndtag:	Max. brugervægt:	Produktindhold:	Produktvægt:
MC 001-1310 Basic Belt - M	Taljemål: 75 - 110 cm	9	150 kg	37% Polyester, 31% Polyurethan, 16% Nylon, 10% Polyethylen, 3% Bomuld, 2% Polyamid	0,40 kg
MC 001-1311 Basic Belt - L	Taljemål: 85 - 120 cm	11	150 kg	38% Polyester, 30% Polyurethan, 14% Nylon, 12% Polyethylen, 3% Bomuld, 2% Polyamid	0,38 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 150 kg



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 40 °C.
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm.
Ved skader skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

