

MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.


(DK) Brugervejledning

26_20250114_DK

StayUp Strap



	Varenr.	HMI nr.	Navn	UDI-DI/GTIN	Størrelse
○	MC 001-1944	136866	StayUp Strap	5744001974827	L 75 x B 3,6 cm
○	MC 001-1943	-	StayUp Strap - 10 pcs	5744001974919	L 75 x B 3,6 cm

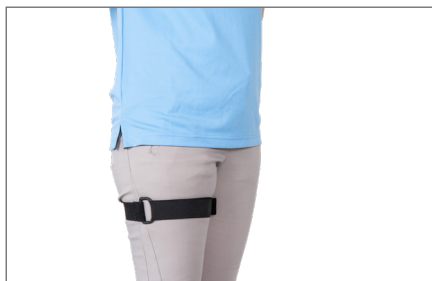

1. StayUp Strap monteres omkring låret udenpå bukserne.



2. Før båndet igennem plastringen.



3. Stam båndet til og luk burrebåndet mod elastikken.



4. Bukserne åbnes og slippes. De vil kun falde ned til StayUp Strap. Uanset om man står eller sidder til sit toiletbesøg, falder bukserne ikke helt ned til gulvet.

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Brugervejledning - StayUp Strap

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde.

Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktets formål er, at forhindre bukserne i at falde ned på gulvet i forbindelse med toiletbesøg og hermed minimere risikoen for fald hos brugere med nedsat balance.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle brug således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Kontroller at der er tilstrækkelig binding mellem burrebånd og elastikken til at holde bukserne oppe. Hvis ikke eller hvis produktet i øvrigt er i stykker, skal det kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til enhver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål / brug.

ADVARSLER



StayUP Strap fjernes efter brug, for at forhindre ændring i cirkulation.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015
Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrsantændelighed - Del 1: glødende cigaret.

ISO 09 09 09 01

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk



Brugervægt:

Ingen max brugervægt.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 60 °C.
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling: Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning.



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der er tilstrækkelig binding mellem burrebånd og elastikken til at holde bukserne oppe. Hvis ikke eller hvis produktet er i stykker, skal det kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

