

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

27_20260429_DK

Master Skjold



REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
○ MC 001-5005	30752	Master Skjold - S	05744001971260
○ MC 001-5010	30753	Master Skjold - M	05744001971277
○ MC 001-5015	30754	Master Skjold - L	05744001971284

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 03 24

The Original Nordic
Human Handling Concept



Scan Me

Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet fjerner friktionen fra kørestolens dæk under forflytning og bruges til at afskærme dækket, så bruger ikke hænger fast i gummi ved forflytning eller får beskidte bukser. Skal monteres og fjernes ved hver forflytning.

Anvendelse af produktet:

Produktet placeres på dækket inden forflytning og fjernes igen efter.

Indikation:

Til brugere, som ved forflytning til og fra kørestol rammer dækket og ikke kan korrigerer for dette enten grundet fysisk eller kognitiv nedsat funktion.

Kontraindikation:

Hvis brugerne grundet kognitiv nedsat funktion, ikke kan forstå at Master Skjold skal fjernes efter forflytningen og inden at stolen sættes i bevægelse eller hvis brugeren ikke fysisk kan fjerne Master Skjold, og en hjælper ikke kan støtte i disse situationer, bør produktet ikke benyttes.

Advarsel:

Sikker altid at produktets bredde passer til dækkets bredde, inden det påføres.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning.

Produkter bør efterses jævnligt, og hvis overfladen er defekte eller i stykker, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Skjold

Valg af størrelse:



1. Størrelse af Master Skjold vælges ud fra dækkets bredde.



2. Master Skjold monteres let på dækket. Skjoldet må ikke glide på dækket og skal ikke presses ned over dækket. I så fald vælges en mindre/større variant.

Montering og brug:



3. Placer kørestolen langs sengekanten.



4. Monter Master Skjold på kørestolsdækket, hvor bagdelen vil ramme dækket.



5. Bruger kan nu forflytte sig ugeneret over dækkets gummibelægning.



6. Fjern Master Skjold efter brug, da den ellers vil kunne sætte sig fast i bremsen eller flække.

Brugervejledning - Master Skjold

Tekniske specifikationer

REF - Navn	Størrelse dæk bredde:	SWL:	Produktvægt:
MC 001-5005 Master Skjold - S	max. 25 mm	135 kg	0,14 kg
MC 001-5010 Master Skjold - M	max. 31 mm	135 kg	0,14 kg
MC 001-5015 Master Skjold - L	max. 33 mm	135 kg	0,14 kg

Materialer:

ABS

ADVARSLER



Sørg for, at alle relevante bremsere er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produktet er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt (SWL - safe working load):

Anbefalet max. brugervægt: 135 kg.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnlige, og hvis overfladen er defekt eller i stykker, bør produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk

Find os på:

