

# MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

# (DK) Brugervejledning

28\_20260420\_DK

## Master Stop



### Master Stop

### Master Stop Måtte

	REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn	UDI-DI/GTIN	Størrelse
<input type="radio"/>	MC 001-1929	102406	Master Stop 30x0,6m	5744001970829	L 30 x B 0,6 m
<input type="radio"/>	MC 001-1956	88227	Master Stop Måtte - S	5744001970959	L 40 x B 45 cm
<input type="radio"/>	MC 001-1957	88228	Master Stop Måtte - L	5744001970966	L 80 x B 60 cm
<input type="radio"/>	MC 001-1959	81192	Master Stop 30x1,2m	5744001970973	L 30 x B 1,2 m



1. Master Stop kan bruges under brugers fødder, hvis brugers fødder fx glider, når bruger skal skubbe fra med fødderne for at komme op i seng eller vende sig.



2. Master Stop kan bruges under en brugers fødder eller under en måtte, hvis disse glider mod gulvet.



3. Master Stop kan bruges under fx et skærebræt for at forhindre, at det glider, mens man skærer.

The Original Nordic  
Human Handling Concept



SCAN ME

Developed &  
Manufactured by:



master-care.dk

# Brugervejledning - Master Stop

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde.

Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

## MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

## Erklærede formål for produktet:

Produktet har til formål at øge af friktion mellem to overflader fx mellem bord og skærebæret eller mellem fødder og madras.

## Indikation:

Kan benyttes hvis bruger har svært ved at holde fødderne i underlaget, når han/hun skal skubbe sig op i sengen eller skal rejse sig. Kan også benyttes hvis bruger har svært ved til at fastholde skærebæret fx under madlavning.

## Kontraindikation:

Produktet bør benyttes med forsigtighed, hvis bruger har tendens til at snuble over ting. Andre kontraindikationer kendes ikke.

## Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at aktiviteten foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

## Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

## Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 1-3 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Kontroller at der er tilstrækkelig friktion mod produktet og produktets bagside. Hvis ikke eller hvis produktet i øvrigt er i stykker, skal det kasseres.

## Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

## ADVARSLER



Bør anvendes med forsigtighed, hvis brugeren har tendens til at snuble i fx tæpper mm.



### CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Medicinsk udstyr, lever op til Regulativet for medicinsk udstyr MDR 2017/745.

For mere information, videoer  
Quick Guide mm.,  
se [www.master-care.dk](http://www.master-care.dk)



### Brugervægt:

Ingen max brugervægt.



### Vask:

Dette produkt kan vaskes i hånden eller i vaskemaskine ved max. 60 °C. Når produktet er rent og intakt kan det genbruges af andre brugere.



### Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



### Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



### Tørretumbling:

Dette produkt bør IKKE tørres i tørretumbler, da det kan medføre at produktet krymper eller smelter.



### Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



### Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



### Strygning:

Tåler ikke strygning



### Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



### Blegning:

Tåler ikke blegning.



### Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der er tilstrækkelig binding mellem burrebånd og elastikken til at holde bukserne oppe. Hvis ikke eller hvis produktet er i stykker, skal det kasseres.



### Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



### Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:



master-care.dk