

MADE IN EUROPE



Vores produkter og råvarer er produceret i Europa.

Vælg kvalitet, spar penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

29_20250114_DK

Auto Slide

The **Original** Auto Slide



MC 001-9140



MC 001-9110



MC 001-9120



MC 001-8210



MC 001-8200



MC 001-8230



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 12 81 01

The Original Nordic
Human Handling Concept



Scan Me

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
☐ MC 001-8200	124600	Auto Slide Back - Velour	05744001971727
☐ MC 001-8210	124601	Auto Slide Turner - Velour	05744001971734
☐ MC 001-8230	124984	Auto Slide Seat - Velour	05744001971741
☐ MC 001-9110	38950	Auto Slide Back - Air	05744001971819
☐ MC 001-9120	38951	Auto Slide Seat - Air	05744001971826
☐ MC 001-9140	128782	Auto Slide Turner - Air	05744001971840

Brugervejledning - Auto Slide

Indholdsfortegnelse

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:	side 2
Montering af Auto Slide Seat:	side 3
Montering af Auto Slide Back:	side 3
Montering af Auto Slide Turner:	side 3
Placering og brug af Auto Slide:	side 4
Sikkerhed og funktion:	side 4
Tekniske specifikationer	side 5



m-care.dk

Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produkt nedsætter friktion mellem bruger og bilsæde ved ind- og udstigning og er derfor velegnet hos brugere med smerter i hofte/ ryg eller til forebyggelse af smerter.

Anvendelse af produktet:

Monter produktet på bilsædet. Roter toppen let mod døråbningen og sæt dig ovenpå. Glid/drej ind på sædet. Små justeringer i bækkenet/ lænden kan laves under kørsel uden at skulle løfte bagdelen fra underlaget.

Indikation:

Produktet er beregnet til brugere, som har svært ved at komme ind og ud af bilen grundet fysisk eller kognitiv nedsat funktion.

Kontraindikation:

Produktet må ikke bruges af personer, som ikke anvender sikkerhedssele under kørsel eller forstår vigtigheden af at have selen på, da dette kan medføre øget risiko for at glide ud af sædet fx når bilen bremser.

Advarsel:

Produktet skal altid benyttes i kombination med sikkerhedssele.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Produktionsdato og levetid:

Produktets produktionsdato kan ses på produktets label under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Kontrol/Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet har defekte syninger, spænder eller brudte overflader, bør produktet kasseres. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig friktionsnedsættelse til en sundhedsmæssigt forsvarlig forflytning for både hjælper og bruger, bør kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Auto Slide

Montering af Auto Slide Seat:



1. Placer Auto Slide Seat på bilsædet med den lille del nederst og så de to nylonoverflader kan glide på hinanden.



2. Før han-delen af låsespændet ind mellem sæderyggen og bilsædet og ned under bilsædet. Klik han og hun del af spændet sammen.



3. Stram stroppen, så Auto Slidens bund ligger fast på bilsædet. Drej derefter øverste del af Auto Sliden ud mod døråbningen.

Montering af Auto Slide Back:



4. Placer Auto Sliden på bilsædet med den lille del nederst og så de to nylonoverflader kan glide på hinanden.



5. Fastgør Auto Slide Back omkring sæderyggen ved brug af låsespændet. Drej derefter øverste del af Auto Sliden ud mod døråbning.

Montering af Auto Slide Turner:



6. Placer Auto Sliden på bilsædet med den lille del nederst og så de to nylonoverflader kan glide på hinanden.



7. Auto Slide Turner ligger nu løst på sædet. Drej derefter øverste del af Auto Sliden ud mod døråbning.

Brugervejledning - Auto Slide

Placering og brug af Auto Slide:




8. Sæt dig på Auto Slide Back, så rundingen og den påsyede label vender mod sæderyggen.



9. Drej og flyt sædepartiet ind på bilsædet. Glid evt. baglæns for at komme endeligt på plads i siddestillingen.



10. Det unikke med vores Auto Slides er, at de glider i alle retninger og dermed letter repositionering under kørsel. Samtidig har Seat og Back modellerne også ekstra lang vanding til siden som letter ind- og udstigning i fx høje biler.

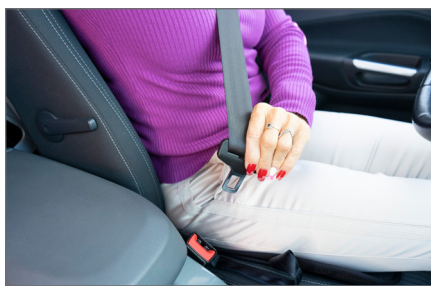

11. Fastgør sikkerhedsselen og stræk benene. Benenes vægt låser automatisk Auto Slide Back under kørsel. Små sideværts eller bagudrettede tilpasninger kan stadig let udføres.

Sikkerhed og funktion:



12. Alle Auto Slide modeller låser automatisk ved, at vægten af de udstrakte ben, trykker forkanten af den øverste glidedel direkte mod bilsædet.



13. Det unikke ved alle Auto Slides er, at de kan rotere samt glider i alle retninger OG samtidig nedsætter al unødvendig friktion. Glidet fremad bremses af lårenes tyngde direkte mod sædet, hvor øverste glidedel ikke rammer den nederste glidedel fortil.



14. Håndtag kan anvendes af både bruger selv eller evt. af en hjælper for at tilpasse siddestillingen.

Brugervejledning - Auto Slide

Tekniske specifikationer

REF (Varenr.) - Navn:	Størrelse:	Max. brugervægt:	Produktindhold:	Produktvægt:
MC 001-8200 Auto Slide Back - Velour	L 50 x B 50 cm	180 kg	57% Polyester, 19% Polyethylen, 14% Polyamid, 9% Nylon, 1% Silikone	0,44 kg
MC 001-8210 Auto Slide Turner - Velour	L 50 x B 50 cm	180 kg	51% Polyester, 21% Polyethylen, 16% Polyamid, 10% Nylon, 2% Silikone	0,32 kg
MC 001-8230 Auto Slide Seat - Velour	L 50 x B 50 cm	180 kg	56% Polyester, 19% Polyethylen, 15% Polyamid, 9% Nylon, 2% Silikone	0,42 kg
MC 001-9110 Auto Slide Back - Air	L 50 x B 50 cm	180 kg	62% Polyester, 16% Polyethylen, 13% Polyamid, 8% Nylon, 1% Silikone	0,54 kg
MC 001-9120 Auto Slide Seat - Air	L 50 x B 50 cm	180 kg	58% Polyester, 18% Polyethylen, 14% Polyamid, 9% Nylon, 1% Silikone	0,56 kg
MC 001-9140 Auto Slide Turner - Air	L 50 x B 50 cm	180 kg	61% Polyester, 17% Polyethylen, 13% Polyamid, 8% Nylon, 1% Silikone	0,40 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Spænd altid sikkerhedsselen under kørsel.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt:

Anbefalet max. brugervægt: 180 kg



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 40 °C.
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, spænde, sømme mm.
Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

