

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

33_20260423_DK

Master Leg



MC 001-1680



MC 001-1681



MC 001-1683



Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 15 03

The Original Nordic
Human Handling Concept



Scan Me

Developed &
Manufactured by:



master-care.dk

-
-
-

REF (Varenr.)	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 001-1680	103158	Master Heavy Leg	05744001970508
MC 001-1681	105469	Master Single Leg	05744001970515
MC 001-1683	139404	Master Leg Royal	05744001974971

Brugervejledning - Master Leg

Indholdsfortegnelse

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:	side 2
Løft af ben i sideleje:	side 3
Brug af Master Leg ved mobilisering / træning:	side 3
Master Heavy Leg:	side 4
Master Leg Open - forflytning i siddende:	side 4
Tekniske specifikationer	side 5



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vigtig information inden produktet/-erne tages i brug:

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet bruges sammen med en lift til at løfte benet frit af underlaget hos brugere med kræftnedsættelse i benene. Dette kan være hensigtsmæssigt fx i forbindelse med sårpleje for at nedsætte statisk løftearbejde.

Master Leg Open kan også bruges til at støtte og stabilisere brugers ben under assisteret forflytning med fx glidebræt.

Anvendelse af produktet:

Master Leg monteres rundt om benet og tilkobles lift. Benet kan mobiliseres frit med minimal vægtbelastning.

Indikation:

Master Leg benstroppen kan benyttes, når bruger enten grundet nedsat fysisk eller kognitiv funktion, ikke selv kan løfte eller holde benet løftet fx i forbindelse med sårskifte eller nedre hygiejne.

Kontraindikation:

Produktet må ikke bruges som et liftsejl, men derimod bruges til liftning af ben fri fra underlaget til fx sårpleje mm.

Advarsel:

Tjek altid at stropperne er korrekt monteret i liftåget, inden benet liftes fra underlaget.

Produktet kan kun bruges på liftåg med kroge.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Produktion og levetid:

Produktets produktionsdato kan ses på produktets label under "LOT" og vises som ÅÅMMDD - fx 251020, som refererer til, at produktet er produceret d. 20. september 2025.

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes.

Kontrol/Eftersyn:

Produkter bør efterses jævnligt. Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig støtte, bør kasseres. Produkter bør jævnligt efterses, og hvis defekte syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Leg

Løft af ben i sideleje:



1. Monteres i rygleje.
Harmonika-fold halvdelen af Master Leg så stropperne vender nedad.



2. Roter brugers ben og skub Master Leg ned i madrassen og ind under benet.



3. Træk det foldede stykke ud.



4. Luk burrebåndet rundt om brugers ben.



5. Vend brugeren til sideleje og lift benet op.
Stabil sideleje kan opnås ved brug af Mave- og Rygkile.

Brug af Master Leg ved mobilisering / træning:



6. Master Leg kan bruges til mobilisering og træning hos bruger med nedsat funktion i benet.

Brugervejledning - Master Leg

Master Heavy Leg:



7. Master Heavy Leg monteres på henholdsvis lår og underben.



8. Monter stropperne, så det passer med hvilken knæbøjning, som ønskes.



9. Benet kan nu mobiliseres og fx give plads ved nedre hygiejne.

Master Leg Open - forflytning i siddende:



10. Monter Master Leg Open rundet om brugers underben.



11. Der skal være lidt rum mellem brugers ben. Placer en Roto Master under brugers fødder.



12. Mini Master og Glidebræt kan med fordel benyttes under forflytningen til/fra seng.

Brugervejledning - Master Leg

Tekniske specifikationer

ISO klassificering:

ISO 12952-1:2015

Tekstiler - Vurdering af sengeudstørs antændelighed - Del 1: glødende cigaret.

REF - Navn:	Størrelse:	Håndtag:	SWL:	Produktindhold:	Produktvægt:
MC 001-1680 Master Master Heavy Leg	L 60 x B 35 cm	12	200 kg	52% Polyurethan, 26% Polyester, 21% Polyamid, 1% Silikone	0,58 kg
MC 001-1681 Master Single Leg	L 60 x B 35 cm	6	150 kg	47% Polyurethan, 27% Polyester, 24% Polyamid, 2% Silikone	0,34 kg
MC 001-1683 Master Leg Royal	L 100 x B 22 cm	2	150 kg	79% Polyester, 14% Polyamid, 6% Bomuld, 1% Silikone	0,21 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig bruger på produktet på sengekanten.



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Efterlad aldrig en bruger liggende på produktet, mens dette er koblet på en lift.



Må ikke bruges som liftsejl – kan med fordel kombineres med lift til fx. vendinger i seng.



Sørg for, at alle relevante bremses er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Brugervægt (SWL - safe working load):
Anbefalet max. brugervægt: 150 - 200 kg.



Vask:

Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved max. 60 °C.
Lavere vaskegrader vil forlænge levetiden væsentligt.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.
Lufttørring forlænger levetiden væsentligt.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning



Kemisk rensning:

Tåler ikke rensning.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Produktet skal kontrolleres jævnlig og gerne inden hver brug. Kontroller, at der ikke er skader på stof, stropper, sømme mm.
Har produktet høj friktion eller på anden vis er i stykker, skal produktet kasseres.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

