

MADE IN
EUROPE



Vores produkter og
råvarer er produceret
i Europa.

Vælg kvalitet, spar
penge og skån miljøet.

(DK) Brugervejledning

Master Bed Grip

34_20240930_DK



MC 003-3510



MC 003-3520



MC 003-3530



MC 001-1313



-
-
-
-

Varenr.	HMI nr.	Navn - Størrelse	UDI-DI/GTIN
MC 003-3510	36414	Master Bed Grip - Soft	5744001972472
MC 003-3520	36415	Master Bed Grip - Hard	5744001972489
MC 003-3530	63305	Master Bed Grip - Single	5744001972496
MC 001-1313	89661	BASIC Grip	5744001970416

Forordning MDR 2017/745 for medicinsk udstyr klasse 1



ISO 12 31 12 02

The Original Nordic
Human Handling Concept



Developed &
Manufactured by:



Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden produktet/produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master care A/S.

Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forordningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:

Produktet monteres på sengerammen og bruges hos brugere med nedsat fysisk funktion til fx at trække sig op til siddende i seng.

Anvendelse af produktet:

Benyttes til at understøtte brugeren i selv at komme fra liggende til siddende i sengen eller til holde balancen under siddende forflytninger. Brugerens evne til at gribe om håndtagene samt behovet for antal greb er afgørende for valg af produkt.

Kontraindikationer/Advarsel:

Produktet kan monteres på langt de fleste sengerammer og -gærder. Er der tvivl om, hvorvidt sengen kan holde til brugers vægt/kraftpåvirkning, bør sengeproducenten kontaktes.

Risikovurdering:

Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:

Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og på vores hjemmeside kan findes vejledninger i brug på langt de fleste produkter.

Levetid:

Produktet forventes at have en levetid på 2-5 år ved normal slitage og vask. Produktets levetid afhænger af brug, belastning samt hvordan og hvor ofte produktet vaskes og tørres.

Produkter bør efterses jævnligt. Hvis produktet har defekte syninger eller brudte overflader, bør produktet kasseres.

Garanti:

master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, hvis produktet har været anvendt korrekt.

Utsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:

Utsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette nationale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktskader, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte formål /brug.



Brugervejledning - Master Bed Grip

Montering af Master Bed Grip:



1. Master Bed Grip monteres i fx sengerammen eller sengegavl, så ønsket trækretning opnås.



2. Master Bed Grip - Soft og Hard: Brugeren kan trække sig til siddende ved at benytte grebene et efter et.



3. Master Bed Grip - Single: Monteres i fx sengerammen eller sengegavl, så ønsket trækretning opnås. Længden af Master Bed Grip - Single kan reguleres via det sorte spænde.

Kom fra liggende til siddende:



4. Master Bed Grip kan med fordel placeres langs brugers side, så den er let tilgængelig.



5. Benyt grebene til at komme til siddende. Elever evt. hovedgæret.



6. Sving benene ud over sengekanten og kom til siddende.

Siddende forflytning fra stol til seng – delvis aktiv bruger:



7. Bruger placerer kørestolen relevant ift. sengen. Benyt evt. glidebræt.



8. Bruger læner sig frem ved hjælp af Master Bed Grip og kan støtter sig til sengen under forflytningen.

Brugervejledning - Master Bed Grip

Tekniske specifikationer

Varenummer - Navn:	Størrelse:	Antal håndtag:	Max. brugervægt:	Indhold:	Pakkevægt:
MC 003-3510 Master Bed Grip - Soft	L 180 x B 9 cm	8	160 kg	79% polyester, 21% polyethylen	0,48 kg
MC 003-3520 Master Bed Grip - Hard	L 180 x B 15 cm	8	160 kg	78% polyester, 22% poly-carbonat	0,32 kg
MC 003-3530 Master Bed Grip - Single	L 150 x B 5 cm	1	160 kg	95% bomuld, 5% nylon	0.12 kg
MC 001-1313 BASIC Grip	L 140 x B 8 cm	5	180 kg	100% polyester	0,22 kg

ADVARSLER



Efterlad aldrig produktet liggende på gulvet.



Sørg altid for, at brugeren ikke hænger fast i stropperne.



Sørg for, at alle relevante bremses er låst, inden forflytning foretages.



CE-mærkning:

Produkterne er godkendt i henhold til gældende forordning for CE-mærkning og lever op til Forordning MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk Udstyr, klasse 1.



Vask:

Master Bed Grip Single, Soft og Hard kan vaskes ved 60 °C. Basic Grip kan vaskes i vaskemaskine ved max. 85 °C.



Vaskemidlets pH værdi:

pH værdi for vaskemiddel / desinfektionsmiddel mellem pH 5 - 9.



Skyllemiddel:

Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette forringer glideegenskaberne væsentligt.



Tørretumbling:

Dette produkt må kun tørretumbles skånsomt og ved max. 40 °C.



Overfladisk rengøring:

Dette produkt kan rengøres overfladisk med klud og sæbe.



Desinficering:

Dette produkt tåler overtørring med alkoholholdige desinficeringsblandinger mellem pH 5-9.



Strygning:

Tåler ikke strygning.



Kemisk rengøring:

Tåler ikke rengøring.



Blegning:

Tåler ikke blegning.



Eftersyn:

Fortag jævnlig visuel inspektion og tjek at alle synlige, greb og materialer stadig er hele og funktionelle i forhold til brug.



Brugervejledning:

Læs denne brugervejledning nøje inden ibrugtagning.



Bortskaffelse:

Sørg altid for at bortskaffe efter gældende regler.

Find os på:

For mere information, videoer
Quick Guide mm.,
se www.master-care.dk